

Látogasson el a
hartmannwebshop.hu
oldalunkra!



hartmannwebshop.hu

Ápolás és
Inkontinencia

HARTMANN



„Jól
érezem magam!”

HARTMANN-RICO Hungária Kft.
2051 Biatorbágy, Paul Hartmann u. 8.
Telefon: 06-23-530-900
www.hartmann.hu



Az egészségügy
élvonalában

MoliCare[®]
Biztonság. Minden nap.

Az életminőség javítása

A HARTMANN átfogó bőrápoló koncepciójának segítségével családtagja megőrizheti méltóságát és javulhat az életminősége.



Beszéljünk az inkontinenciáról!



A legtöbb országban a 65 év felettek körülbelül egyharmada, a szociális otthonok lakóinak pedig nagyjából fele érintett inkontinenciával – és ez az arány egyre nő. Az inkontinenciát társadalmunk mégis tabutémának tekinti. Az érintettek közül sokan inkább elfogadják életmódjuk súlyos korlátait, mint hogy beszéljenek valakivel a problémáról.

Családtagjainak vagy barátainak azzal segíthet, ha elfogadja a helyzetet és beszél velük a problémáról.

Mi partnerei leszünk az inkontinencia kezelésében, és segítséget nyújtunk az inkontinenciában érintett családtagjával való kapcsolatának javításához. Az általunk megalkotott „Aktív bőrvédelem” koncepció az ápolási tudomány legújabb eredményein alapul, magában foglalja az inkontinenciához társuló dermatitisz (IAD) elkerülését célzó megelőző intézkedéseket, és kiterjed az inkontinencia esetén szükséges valamennyi teendőre.

A brossúrában található tippek segíthetnek, hogy az Önre és az ápolószemélyzetre nehezedő terhek enyhüljenek, és elősegítik családtagjai életminőségének javulását.

HARTMANN – Az Ön partnere

Tartalom	
Beszéljünk az inkontinenciáról!	3
Jó tudni	4
Teendők inkontinencia esetén	5
Segítsük a kontinenciát	6
Legnagyobb szervünk, a bőr	8
Miért fontos a bőr védelme?	10
Az inkontinenciához társuló dermatitiszről (IAD)	11
Egészséges bőr a MoliCare® Skin segítségével	13
MoliCare® Skin bőrtisztító termékek	14
MoliCare® Skin bőrvédő termékek	15
Egyéni igényekre szabott inkontinencia termékek	16
Inkontinencia termékek típusai	17
Bőrápolók: Hogyan rendeljünk?	18
MoliCare® nedvszívó termékek	20
MoliCare® Lady Pad	24
MoliCare® Lady Pants	26
MoliCare® Men Pants	30

Jó tudni

Amikor valaki nem képes teljes mértékben kontrollálni húgyhólyagjának működését, azt vizeletvisszatartási problémának vagy inkontinenciának nevezzük. Egyes nők szülés után, mások stressz hatására vagy sportolás közben tapasztalhatják ezt. Minél idősebb valaki, és minél rosszabb általános fizikai állapotban van, annál nagyobb nála a vizelet- vagy székletinkontinencia kialakulásának kockázata.

Az olyan betegségek, mint a demencia, a cukorbetegség vagy az elhízás, valamint egyes gyógyszerek szedése szintén szerepet játszanak a probléma kialakulásában.

Az inkontinencia tehát nem betegség, hanem tünet, amelynek okait orvosnak kell feltárni. Az orvos tudja ellátni a legjobb tanácsokkal a kontinencia elősegítéséről és az inkontinenciában érintett személy életkörülményeinek javításáról.



Teendők inkontinencia esetén

1. Segítsük a kontinenciát

Első lépésként meg kell próbálni elősegíteni a kontinenciát. Számos országban folyamatos intézkedéseket tesznek a kontinenciát elősegítő szakértői irányelvek frissítésében. Kérdezze róluk orvosát vagy kontinencia tanácsadóját. A következő oldalon példákat fog találni arra, hogy milyen módon segítheti családtagjait.

2. Kíméletesen tisztítsuk és alaposan ápoljuk a bőrt

Felnőttkori inkontinencia esetén különösen fontos a bőr tisztítása és védelme, mert ilyenkor a bőr folyamatos sérülésnek van kitéve és különösen magas a bőrirritáció kockázata. Válasszon MoliCare® Skin bőrápoló termékeket erre a célra: a MoliCare® Skin termékcsalád az inkontinencia miatt igénybe vett felnőtt bőr egészségének megőrzésére lett kifejlesztve. A termékcsalád tökéletes kiegészítője a HARTMANN nedvszívó inkontinencia termékeinek, és biztosítja, hogy azok nedvszívó képessége ne csökkenjen a bőrápolók használata miatt.

3. Használjunk személyre szabott inkontinencia termékeket

A szakemberek olyan inkontinencia termékek használatát javasolják, amelyeket kifejezetten az adott típusú inkontinenciára fejlesztettek ki, és nedvszívó kapacitásuk igazodik a vesztett vizelet mennyiségéhez. Napjainkban már különböző termékek kaphatóak férfiak és nők számára egyaránt, amelyek tökéletes biztonságot nyújtanak, és védik a bőrt – amennyiben megfelelően választjuk ki őket. A HARTMANN átfogó termékkínálattal rendelkezik, amely még a különleges igényeket is kielégíti. Biztosak vagyunk benne, hogy teljesíteni tudjuk Ön és családtagjai igényeit.

Segítsük a kontinenciát

Testmozgás és a medencefenék izomzatának erősítése

Célzott medencefenék-erősítő gyakorlatokkal mindenkinél javítható a kontinencia. A kiadós mennyiségű testmozgás általánosságban véve is nagyon jót tesz a testi egészségnek. Ha lehetséges, sétáljon családtagjaival.

Toalett-tréning

A húgyhólyag „megtanítható” a rendszeres időközönkénti ürítésre. Ennek eléréséhez a vizelést tudatosan késleltetni kell egy adott időtartamig.

Környezet

Demenciában szenvedők esetében segíthet, ha környezetüket és a mellékhelyiséghez vezető utat úgy alakítja ki, hogy az a lehető legkönnyebben felismerhető és elérhető legyen, ehhez használhat akár feltűnő színeket is.

Ruházat

A ruházat körülményes le- és felvétele könnyen vezethet apró balesetekhez. Ügyeljen arra, hogy családtagja könnyen kezelhető ruházatot viseljen (például belebújós nadrágot).

Folyadékbevitel

A csökkentett folyadékbevitel nem javítja az inkontinenciát – éppen ellenkezőleg. Húgyúti fertőzést okozhat és súlyosbíthatja a tüneteket. Tehát bátorítsa családtagját arra, hogy napközben elegendő vizet, gyümölcslevet vagy édesítés nélkül készített gyümölcssteát igyon. Tartózkodni kell a vízhajtó hatású italok, például a kávé és a fekete tea fogyasztásától. Este érdemes kevesebbet inni. Ha családtagja egy háztartásban él Önnel, jegyezze fel, hogy mennyi folyadékot iszik, így számon tarthatja a bevitt folyadék mennyiségét

A kiadós testmozgás nagyon jó hatású.




Legnagyobb szervünk, a bőr

A felnőttek bőrének felülete csaknem két négyzetméter nagyságú. Így a bőr testünk legnagyobb szerve. Szórtüszőket, verejtékmirigyeket, vérereket, érzékelő sejteket, valamint idegsejteket tartalmaz, amelyek információkat küldenek az agynak. Legfontosabb feladatai:

- Védelmi vonalat képez a környezeti hatásokkal szemben.
- Megakadályozza a kórokozók túlzott elszaporodását.
- Szabályozza a testhőmérsékletet.
- Megakadályozza a bőrön át történő vízvesztést, ezáltal a kiszáradást.

Miért válik a bőr sérülékenyebbé a kor előrehaladtával?


A test sok más anyagcsere-folyamatához hasonlóan, a bőr megújulása is lelassul az életkor előrehaladtával: a fiatalok bőre körülbelül 28 naponta újul meg, az idősebbeknél ez 40 napba telik. A bőr szárazabbá és kevésbé ellenállóvá válik. Az alábbi ábrán a fiatal és idős bőr szerkezete közti különbségek láthatóak.

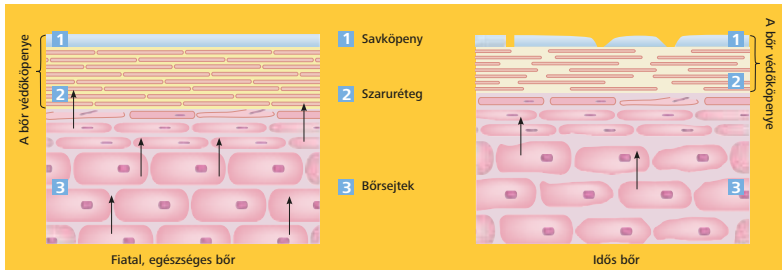

A bőr a korrallal veszít természetes ellenálló képességéből. A savköpeny és a bőr legfelső rétege, az epidermisz (felhám) vékonyabbak lesznek, áteresztőképességük megnő, a sejtregeneráció pedig korlátozott

Mit jelent a „bőrszemleges pH-érték”?

A kémiában megkülönböztetünk savakat és bázisokat. Az átlagértéket, a 7,0 értékű pH-t tekintjük pH-semlegesnek. A bőr átlagos pH értéke ezzel szemben 4,5–5,5, azaz tulajdonképpen savas pH-jú. Ez az enyhén savas érték szükséges a bőr természetes hámlási folyamatához. Éppen ezért a csupán pH-semleges (azaz a bőr számára nem pH-semleges) tisztálkodási szerek nem ajánlottak, mivel ezek jelentősen megzavarják a bőr regenerációs folyamatát.

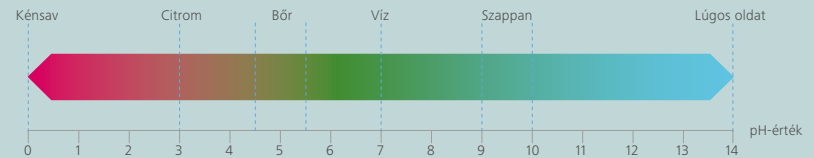


A bőr táplálása

A sok friss gyümölcs és zöldség, rostok és telítetlen zsírsavak fogyasztása egészséges – bőrünk számára is, hiszen a bőr regenerációjához szükséges van tápanyagokra. Az életkor előrehaladtával egyre fontosabb, hogy extra tápanyagokkal lássuk el a bőrt, és speciálisan az idős bőr számára kifejlesztett termékek segítségével állítsuk vissza a nedvességtartalmát. Az egészséges bőr megőrzése különösen fontos inkontinencia esetén. A csecsemőknek szánt termékek nem felelnek meg erre a célra.



Miért fontos a bőr védelme?

Időskori inkontinencia esetén a már eleve csökkent ellenálló képességű bőr a vizeletben és az emésztőenzimekben található ammónia hatásának van kitéve. Ennek eredményeképpen a bőr pH-értéke a lúgos tartomány felé tolódik el. Ezt a hatást tovább súlyosbítja, ha minden inkontinencia epizód után szappannal és vízzel mossuk le a bőrt, mert ez tovább gyengíti a bőr természetes savköpenyét. Ennek következtében a kórokozók könnyebben behatolnak a bőrbe, és fájdalmas gyulladást okoznak. Ilyenkor inkontinenciához társuló dermatitiszról (IAD) beszélünk. Az inkontinenciában szenvedő felnőttek különösen gondos bőrápolásával elkerülhető az IAD kialakulása. A HARTMANN Aktiv bőrvédelem koncepciója segíti a bőr egészségének megőrzésében.

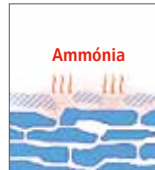

„Minél hosszabb ideig érintkezik a bőr vizelettel vagy széklettel, annál nagyobb az IAD kockázata?” (Bliss D.Z.)



Bliss D. Z., Zehrer C., Savik K., Smith G., Hedblom E.; An economic evaluation of four skin damage prevention regimes in nursing home residents with Incontinence; in: Wound, Ostomy and Continence Nurses Society, March/April 2007.

Az inkontinenciához társuló dermatitiszról (IAD) ○ Inkontinencia

Az inkontinenciához társuló dermatitisz egy irritatív kontakt dermatitisz, amely vizelettel vagy széklettel való érintkezés következtében az intim területek bőrének fájdalmas gyulladásához vezet. Általában enyhe bőrpírral (ún. erythema) kezdődik, ami égő és viszkető érzést is okoz. Ha a gyulladás súlyosbodik, rendkívül fájdalmas hólyagok és felmaródások alakulnak ki. A nedves, meleg és már előzetesen felsértett bőr mellett ideális felületként szolgál a bakteriális és gombás fertőzések terjedéséhez. Ezek további bőr- és húgyúti fertőzésekhez vezetnek.

Fontos: az IAD olyan bőrbetegség, amelyet a túl sok nedvesség okoz, és nem tévesztendő össze a nyomás okozta bőrbetegségekkel (felfekvés/dekubitusz).

Kiknél áll fenn az IAD kockázata?

Nem minden inkontinens vagy húgyhólyag problémában szenvedő felnőttnél alakul ki IAD. A vizelettel székletinkontinencián kívül a szappanos vízzel végzett gyakori mosakodás is érzékenyebbé teszi a bőrt a nedvesség okozta irritációkra. A száraz, hámló bőrű emberek is érzékenyebbek és megnövekszik náluk is az IAD kialakulásának kockázata, csakúgy, mint a cukorbetegéknél, a rossz általános egészségi állapotú egyéneknél, a rossz tápláltságu személyeknél (alultápláltaknál, túlsúlyosoknál, elhízottaknál), a folyamatos gondozást igénylőknél és a fekvőbetegeknél. Ezen kívül, bizonyos gyógyszerek szedése is gyengítheti a bőrt, és megnövelheti az IAD-vel szembeni érzékenységet. Javasoljuk, hogy beszéljen orvosával erről a kérdésről.



Egészséges bőr a MoliCare® Skin segítségével



Aktív bőrvédelem, mert a megelőzés a legjobb védekezés

A MoliCare® Skin bőrtisztító és bőrpoló termékcsaládot kifejezetten az inkontinenciában szenvedő felnőttek bőrápolási igényeit és a legfrissebb kutatási eredményeket szem előtt tartva fejlesztettük ki. Ezek a termékek a természetes védőréteg megőrzésével óvják a bőrt.

A szakértők egyetértenek abban, hogy az összehangolt inkontinenciakezelést alkalmazó megelőzésnek a következő lépéseket célszerű magában foglalnia:

1. Ideális esetben az egyes inkontinencia epizódok után mielőbb meg kell tisztítani a bőrt – nagyon kíméletesen, dörzsölés nélkül. Használhat például előre nedvesített bőrpoló törölkendőket vagy bőrbarát (pH 4,5 és 5,5 közötti) tisztítószert.

Fontos: a szappannal és vízzel naponta többször végzett lemosás vagy a fent leírtnál lúgosabb pH-értékű szappannal végzett tisztítás károsítja a bőr természetes védőrétegét.

2. A bőr lemosása után minden esetben bőrvédő terméket kell alkalmazni, amely hidratálja és táplálja a bőrt, és védőréteget képez rajta. Lehetőség szerint azonos gyártótól származó termékeket célszerű használni, mert ezeket úgy fejlesztették, hogy a bőrvédő termék nem csökkenti az inkontinencia termék nedvszívó képességét.

Fontos: a csecsemők számára kialakított termékek nem alkalmasak a felnőtt bőr tisztítására és védelmére, mert nem tartalmazzák azokat az összetevőket, amelyekre az inkontinencia miatt igénybe vett felnőtt bőrnek szüksége van.

MoliCare® Skin bőrtisztító termékek

A MoliCare® Skin bőrtisztító termékek víznélküli, kímélő tisztítást tesznek lehetővé az inkontinencia epizódok után. Normál esetben (vizelet lemosására) használjon nedves törölkendőt, erősen (széklettel) szennyezett területek tisztítására pedig használja a kellemetlen szagokat is semlegesítő, rendkívül kíméletes tisztítóhabot. Mindkét termék bőrszemleges pH-értékű és megőrzi a bőr természetes védőrétegét.

Aktív bőrvédelem

- Kreatint tartalmaznak, amely támogatja a bőr természetes védekező funkcióját.
- Tisztítóhab az erősen szennyezett területekhez.
- Hidratáló pantenolt tartalmaznak.
- Modern tartósítószerkeket tartalmaznak, amelyek feleslegessé teszik a káros parabének használatát.



Nedves mosdatókesztyű a fekvőbeteg teljes testének lemosásához, nedves törölkendő és bőrtisztító hab.

MoliCare® Skin bőrápoló termékek

Az idős, száraz és igénybe vett bőr intenzív ápolására a teljes test felületén alkalmazható MoliCare® Skin bőrápoló termékeket ajánljuk, mint például a Nutriskin Protection Complex-et tartalmazó testápolót.



Bőrápoló olaj és testápoló


MoliCare® Skin bőrvédő termékek

A MoliCare® Skin termékcsalád cink-oxidos bőrvédő kréme (ágyék területén alkalmazandó) és bőrvédő habja (fartájék ápolása) a bőr regenerációját támogató tápláló anyagokat tartalmaznak. Kiváló minőségű összetételük révén e termékek hidratálják a bőrt és átlátszó védőréteget képeznek rajta. Ennek köszönhetően a bőr állapota vizuálisan könnyen megfigyelhető az inkontinencia termék cseréje során. A védőhabból képződő filmréteghez még az öntapadó kötszerek is hozzátapadnak. **Mi több,** tökéletesen kiegészítik a HARTMANN inkontinencia termékeit és biztosítják azok teljes nedvszívó képességét.

A Nutriskin Protection Complex

megőrzi a bőr természetes védőrétegét, és az alábbi összetevőinek köszönhetően védelmet nyújt az agresszív anyagokkal szemben:

- Hidratáló aminosavak
- Nyugtató mandulaolaj
- A lenmagolaj tápanyagokban gazdag esszenciális telítetlen zsírsavai
- Élénkítő kreatin

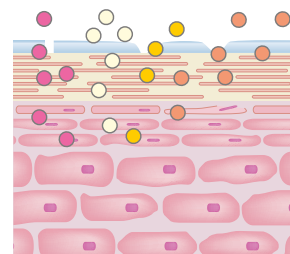

- Mandulaolaj
- Esszenciális telítetlen zsírsavak
- Kreatin
- Aminosavak




Bőrvédő hab, Cink-oxid krém.

Egyéni igényekre szabott inkontinencia termékek

Mindenki más típusú inkontinencia terméket igényel: olyat, ami megfelel fizikai igényeinek, inkontinenciája súlyosságának, mobilitási szintjének és nemének. Hibát követünk el, ha e téren kompromisszumot kötünk, hiszen az inkontinencia termékek hatékony működéséhez elengedhetetlen a megfelelő termék kiválasztása. A termékválaszték a különféle betétektől az ultramagas nedvszívó képességű inkontinencia pelenkákig terjed. Több termék az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő (régii OEP) által támogatott, házi orvos receptre felírható, felírásuk előzetes szakorvosi javaslatot igényel. De mitől lesz jó egy inkontinencia termék? Általános szabály, hogy **a lehető legvékonyabb, de megfelelő nedvszívó képességű legyen.**

A jó inkontinencia termék:

- csak annyira vastag, ami ahhoz szükséges, hogy a bőrt szárazon tartsa
- gyorsan a belső nedvszívó magba vezeti a vizeletet, a bőrrel érintkező felülete kényelmesen szárazon tartja a bőrt
- megőrzi a bőr természetes pH-értékét
- légáteresztő, páraáteresztő, és megelőzi a bőr bepállását
- könnyen felhelyezhető és levehető
- támogatja a bőr természetes védőfunkcióját
- megakadályozza a szivárgást

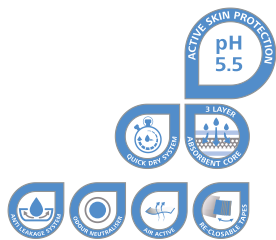

Inkontinencia termékek típusai



1. Inkontinencia betétek nők számára: Az egészségügyi betéhez hasonló, kifejezetten nők számára készült, anatómiailag formált inkontinencia betétek enyhe vizeletvesztés esetére. Puha, bőrbarát fedőréteggel vannak ellátva, viseletük kényelmes és biztonságos. Nemcsak a nedvességet, hanem a kellemetlen szagokat is magukban tartják. A hátoldalon széles ragasztócsíkkal rögzíthetőek a fehérműhöz.



2. Inkontinencia betétek férfiak számára: Férfiak számára tervezett, anatómiailag formált betétek enyhe vizeletvesztésre. Puha fedőrétegük nem irritálja a péniszt, így növelve a biztonság- és komfortérzetet. Hátoldalukon a fehérműhöz igazodó ragasztócsík segíti az egyhelyben maradást.



3. Nagy kapacitású inkontinencia betétek rögzítőnadrággal: Nagy kapacitású inkontinencia betétek szuperabszorbens réteggel ellátva, középsúlyos inkontinencia esetére. Ezek a betétek két belső védőgáttal vannak ellátva, hogy megakadályozzák a folyadék kiszivárgását. A hátoldalon telítettségi indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell cserélni a betétet. Többször mosható hálós neccnadrággal rögzíthetőek.




4. Nappali és éjszakai inkontinencia pelenkák: Nagy nedv szívóképeségű, anatómiailag formált pelenkák visszanedvedesedést gátló réteggel ellátva, súlyos inkontinencia esetére. Bőrbarát tulajdonságokkal rendelkeznek, a csípőrésznél légáteresztő anyagból készülnek, hogy megelőzzék a bőrirritáció kialakulását. A hátoldalon telítettségi indikátorcsík mutatja, hogy mikor kell cserélni a pelenkát.



5. Mobil inkontinencia nadrágpelenkák: Aktív életet élő érintettek részére kifejlesztett inkontinencianadrágok. A pelenkák összes előnyös tulajdonságával rendelkeznek. A nadrág oldalt feltéphető a gyors és higiénikus csere érdekében.



6. Alátét az ágynemű védelmére: Cellulózából készült puha alátétek, polietilén védőfóliával fedve a hátoldalon, az ágy és az ágynemű védelmére.

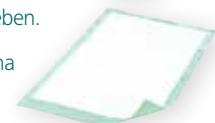

Bőrszemleges pH 5.5, megőrzik a bőr természetes, enyhén savas védőrétegét. Parabénmentes, bőrgyógyászatilag tesztelt, bőrbarát termékek.



Cikkszám	Fotó	Termék megnevezés	Leírás	Kisz.	db/karton
Víz nélküli bőrtisztítás					
9950293		MoliCare Skin bőrtisztító hab	Intenzíven tisztító hab hidratáló és tápláló kreatinnal. Támogatja a bőr természetes védőmechanizmusát. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Használatához nem szükséges víz és szappan. Praktikus, jól adagolható és egyszerűen felvihető. Megkönnyíti a szennyezett bőrfelület tisztítását, pl. székletinkontinencia vagy sztóma esetén.	400 ml	12
9950820		MoliCare Skin nedves törölkendő	A szennyezett bőrfelület gyors és kíméletes tisztítására alkalmas, alkoholmentes nedves törölkendő, kamillakivonattal. Használatához nem szükséges víz és szappan. Extra puha és nagy méretű, 20x30 cm-es kendők visszazárható, praktikus csomagolásban. Hűthető és mikrohullámmal melegíthető kendők.	50 lap/csomag	12
9950830		MoliCare Skin nedves mosdató-kesztyű	Komplett megoldás a teljes test gyors és kíméletes letisztítására. Használatához nem szükséges víz és szappan. Alkoholmentes, higiénikus és bőrbarát tisztítást tesz lehetővé. Tápláló és hidratáló hatású aloe verát, glicerint és pantenolt tartalmaz.	8 db/csomag	24
9951382		MoliCare Skin higiéniai törölkendő	Extra puha, kellemes illatú, impregnált törölkendők, kamillakivonattal. Praktikus és higiénikus tisztítást tesz lehetővé bárhol és bármikor. Alkalmas a test bármely részének tisztítására vagy felfrissítésére. Használatához nem szükséges víz és szappan. Visszazárható csomagolásban. Kellemes illatú.	10 db/csomag	20
Bőrtisztítás					
9950301		MoliCare Skin sampon	Az érzékeny fejbőr és a haj kíméletes és alapos tisztítására alkalmas sampon, ápoló pantenollal és mandulaolajjal.	500 ml	12
9950281		MoliCare Skin ápolófürdő	Tisztító és bőrpoló fürdőkészítmény az érzékeny, száraz és irritált bőrre, tápláló pantenollal és mandulaolajjal. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Ideális egy relaxáló fürdőhöz.	500 ml	12
9950271		MoliCare Skin tusfürdő	Mindennapi kíméletes tisztítást és ápolást tesz lehetővé pantenollal és mandulaolajjal. Pumpás kiszerezésben az egyszerű használat érdekében. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Tusoláshoz és lemosáshoz is alkalmas.	500 ml	12

Hogyan rendeljünk? Az alábbi HARTMANN termékek a gyógyszertárakban elérhetők és a hartmannwebshop.hu oldalon megrendelhetők.

Házhozszállítás A HARTMANN a megrendelt inkontinencia termékeket közvetlen az Ön otthonába vagy a kért címre szállítja!

Cikkszám	Fotó	Termék megn.	Leírás	Kisz.	db/karton
Bőrápolás					
9950331		MoliCare Skin kézkrém	Intenzív és hosszan tartó ápolást nyújt a nagyon száraz, repedezett bőrnek, mindennapos használatra. A kreatin támogatja a bőr természetes védőmechanizmusát. Víz-az-olajban (W/O) emulzió.	200 ml	12
9950311		MoliCare Skin bőrfrisítő gél	Megnyugtatja és enyhíti a feszes, fáradt izmokat, ágyban fekvő betegek esetén is. A nyak, váll, kar és láb masszírozására, ép bőrfelületen alkalmazandó. Tápláló pantenolt és mandulaolajat tartalmaz. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású.	200 ml	12
9950321		MoliCare Skin testápoló	Intenzív testápoló száraz, irritált vagy idős bőrre. Nutriskin Protection Complex, tápláló pantenollal és természetes mandulaolajjal. Víz-az-olajban (W/O) emulzió. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású. Pumpás kiszerezésben az egyszerű használat érdekében.	500 ml	12
9950341		MoliCare Skin testápoló olaj	Intenzív ápolást biztosít a nagyon száraz, irritált vagy idős bőrnek. Kreatinnal és repceolajjal ápolja a bőrt. Vékony rétegben masszírozza be. Kellemes illatú, szagsemlegesítő hatású.	500 ml	12
Bőrvédelem					
9950352		MoliCare Skin Cink-oxid krém	Bőrvédő krém 20% cink-oxidral, elősegíti az irritált, gyulladt, kipirosodott bőr regenerációját. A Nutriskin Protection komplex megőrzi a bőr természetes védőrétegét és regenerálja azt, összetevőinek köszönhetően védelmet nyújt az agresszív anyagokkal szemben. Ápoló összetevőivel (kreatin, lenmagolaj, mandulaolaj, E-vitamin, arginin) extra védelemmel látja el a száraz, érzékeny, kidörzsölt bőrt. Méhviasszal (cera alba), amely enyhíti a bőrproblémákat. Víz-az-olajban (W/O) emulzió. Könnyen elosztható és dörzsölés nélkül letörölhető.	200 ml	12
9950372		MoliCare Skin bőrvédő hab	Megbízható, hosszan tartó, intenzív védelem az irritált bőrre. Védőréteget képez a bőrön, amely engedi a bőrt lélegezni. Nutriskin Protection komplex, hidratáló kreatint, pantenolt, lenmagolajat és ureát tartalmaz. Nagyon gyorsan felszívódik.	100 ml	12
9950362		MoliCare Skin bőrvédő spray	A nagyon száraz, vékony bőr (például könyök, sarok, térd) speciális védelmére, tápláló pantenollal és mandulaolajjal. Védőréteget képez a bőrön és megelőzi a bőr további kiszáradását. A gáttájéki területén nem alkalmazza.	200 ml	12
9950860		MoliCare Skin Barrier krém	Átlátszó védőréteget képez a bőrön, amely engedi a bőrt lélegezni. Nutriskin Protection komplex, hidratáló és tápláló argininnel, kreatinnal, mandulaolajjal és lenmagolajjal ápolja a bőrt. Víz-az-olajban (W/O/W) emulzió. Nem tartalmaz cink-oxidot.	200 ml	12

MoliCare® Premium

ÚJ



Új, anatómiai kialakítású MoliCare® Lady
Pad és Pants nők részére



Új, anatómiai kialakítású MoliCare® Men
Pants férfiak részére

Az új MoliCare® Premium termékekkel tegye azt, ami boldoggá teszi!



Ha húgyhólyag gyengeséget tapasztal, kérjen időben illetékes és támogató orvosi tanácsot. A megfelelő nedvszívó betétekkel vagy nadrágokkal, a kihívásokminimálisra csökkenthetőek, így ön kényelmesen érezheti magát a saját bőrében!

Ezt megérdemli!

Az új anatómiailag kialakított MoliCare® Premium Lady termékcsalád a szükséges védelmet biztosítja egy új megjelenésben, speciálisan a nők részére tervezve.

Győződjön meg róla, hogy támaszkodhat a MoliCare® Prémium Lady nedvszívó betétek és nadrágok gyors nedvszívására, az optimális védelmet nyújtó kifolyás elleni rendszerre és a szagsemlegesítésre.

Tapasztalja meg az egészséges bőrt, amelyet a puha, légáteresztő rostok és az Aloe Vera-val kezelt felső réteg biztosít, így a bőr megtartja természetes pH 5.5 értékét.

Mely MoliCare® termék a megfelelő nekem?

Válassza ki az Önnek megfelelő nedvszívó kapacitást, amelyet könnyen azonosíthat a színezett cseppek számával.

Minél több a cseppek száma, annál nagyobb a termék nedvszívó kapacitása. Ne feledje, hogy a nap folyamán cserélgethet a termékek közt.

Válassza ki a stílusát:

A nedvszívó betéteket saját alsóneműjébe rögzítve viselheti. A nedvszívó nadrágot, mint fehérneműt viselheti.

Enyhe	Enyhétől a közepesig	Közepes
Betétek	Betétek	Nadrágok
 	 	 
 	 	 
 	 	
 	 	
 	 	

MoliCare® Lady Pad

Anatomiailag formázott nedvszívó betétek nőknek, enyhe és közepes inkontinenciára.

Puha légáteresztő anyag



bőrbarát
Aloe Vera

Aloe Verával kezelt puha felület



3 rétegű nedvszívó párna a nedvességet biztonságosan magába zárja, így a bőr száraz és egészséges marad



MoliCare® Lady Pad
0,5 csepp*
nagyon enyhe inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
1 csepp
enyhe inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
1.5 csepp
enyhe inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
2 csepp
enyhe inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
3 csepp
enyhe inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
3.5 csepp
közepes inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
4 csepp
közepes inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
4.5 csepp
közepes inkontinenciára



MoliCare® Lady Pad
5 csepp
közepes inkontinenciára



* a felülete nem kezelt Aloe Vera-val

MoliCare® Lady Pants

Anatómiailag formázott nedvszívó
fehérműk nőknek, közepes
inkontinenciára.



Puha, légáteresztő
anyag az egészséges
bőrért

Fehérműhöz
hasonló kialakítású



bőrbarát

Aloe Verával kezelt
puha felület

Tökéletes védelem a gyors nedvszívásnak,
a kifolyás elleni védőgátaknak és a
szagsemlegesítésnek köszönhetően



MoliCare® Lady Pants

5 csepp
közepes inkontinenciára

Méret:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm



Fehérműhöz hasonló, kényelmes viselet

ÚJ



MoliCare® Lady Pants

7 csepp
közepes inkontinenciára

Méret:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm



Az új MoliCare® Premium termékekkel a biztos védelem tudatában élheti életét!



Sok férfit érint a húgyhólyag-gyengeség problémája. Kérjen időben illetékes és támogató orvosi tanácsot! A megfelelő nedvszívó betétekkel vagy nadrágokkal a kihívások minimálisra csökkenthetők, így ön kényelmesen érezheti magát a mindennapokban!

Ezt megérdemli!

A **MoliCare® Premium Men** termékek kényelmes, diszkrét viseletet és egyszerű használatot biztosítanak. Az új anatómiailag kialakított nedvszívó betétek és nadrágok a szükséges védelmet nyújtják Önnek.

A kényelmesre szabott, elülső részükön - ahol a férfiaknak leginkább szüksége van rá - különösen megerősített nadrágok alsónadrággént viselhetőek, a betéteket a fehérenműbe kell helyezni.

Őrizze meg bőre egészségét a **MoliCare® Premium Men** termékekkel, melyek puha, bőrrel érintkező felső rétege megtartja a bőr természetes pH 5.5 értékét.

Mely MoliCare® termék a megfelelő nekem?

Válassza ki az Önnek megfelelő nedvszívó kapacitást, amelyet könnyen azonosíthat a színezett cseppek számával.

Minél több a cseppek száma, annál nagyobb a termék nedvszívó kapacitása. Ne feledje, hogy a nap folyamán cserélgethet a termékek közt.

Válassza ki a stílusát:

A nedvszívó betéteket saját alsóneműjébe rögzítve viselheti.
A nedvszívó nadrágot, mint fehérenműt viselheti.

Enyhe

Enyhétől
a közepesig

Közepes

Betétek

Betétek

Nadrágok



MoliCare® Men Pants

Anatómiailag formázott nedvszívó
fehérenmük férriaknak, közepes
inkontinenciára.



Fehérenmühöz
hasonló
kialakítású,
szürke színű



Tökéletes védelem a gyors
nedvszívásnak, a kifolyás
elleni védőgátaknak és
a szagsemlegesítésnek
köszönhetően

Extra védelem elől, a férriak
igényeinek megfelelően



MoliCare® Men Pants

5 csepp
közepes inkontinenciára
Méretek:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm



Fehérenmühöz hasonló, kényelmes viselet



MoliCare® Men Pants

7 csepp
közepes inkontinenciára
Méretek:
M: 80-120 cm
L: 100-150 cm

