

Alkohol alapú felületfertőtlenítő szerek helyes használata

HARTMANN



Fertőtlenítőszerral átitatt törlőkendő

Azonnal alkalmazható.



Felhasználásra kész oldat

Öntse az oldatot egyszer
használatos törlőkendőre!



Felhasználásra kész hab

Fújja a habot közvetlenül a
felületre vagy egy egyszer
használatos törlőkendőre!

Használat

HELYES:

- ✓ Fertőtlenítés előtt távolítsa el a látható szennyeződéseket a felületről
- ✓ Egyenletesen nedvesítve be a felületet a szerrel
- ✓ Várja meg, amíg a fertőtlenítőszert teljesen rászárad a felületre
- ✓ Iktassa ki a tűzveszélyes eszközöket és biztosítson megfelelő szellőzést, mert a termék a magas alkoholtartalom miatt gyúlékony
- ✓ Használat után a kendőt dobja a háztartási hulladékgyűjtőbe
- ✓ Használat után azonnal zárja vissza a terméket

TILOS:

- ✗ A fertőtlenítőszert hígítása
- ✗ A padló ill. nagyobb felületek alkoholtartalmú termékkel történő fertőtlenítése
- ✗ A felületfertőtlenítő termékek kézfertőtlenítésre való használata
- ✗ A nem megfelelő mértékű benedvesítés
- ✗ A felületek szárazon való áttörése
- ✗ A fertőtlenítőszert bejuttatása a műszerek, eszközök belsejébe

Termékek

A gyors felületfertőtlenítő termékeknek alapvető elvárás a baktericid, a yeasticid és a burokkal rendelkező vírusok (pl. a HIV-, az Influenza- és a Koronavírus) elleni hatékonyság.



Magas alkoholtartalmú termékek

Kizárólag alkoholálló felületekre ajánlott.
(Nem használható pl. akril vagy plexi felületeken.)



Fertőtlenítőszerral átitatott
törlőkendő:

• **Bacillof® Tissues**

Felhasználásra kész oldat

• **Bacillof® AF**

Alacsony alkoholtartalmú termékek

Alkoholra érzékeny felületekre is használható
(pl. monitorok, kijelzők, billentyűzetek).



Fertőtlenítőszerral átitatott
törlőkendő

• **Bacillof® 30 Tissues**

Felhasználásra kész oldat

• **Bacillof® 30 Foam**



bode.hu · missionprevention.hu
hartmann.hu · sterillium.hu

HARTMANN-RICO Hungária Kft.



Lezárás dátuma: 2020. 10. 20.

A FERTŐTLENÍTŐSZER ALKALMAZÁSÁKOR ÜGYELJEN A BIZTONSÁGRA!
HASZNÁLAT ELŐTT MINDIG OLVASSA EL A CÍMKÉT ÉS A HASZNÁLATI
ÚTMUTATÓT!