

Veroyal®

Pression artérielle

Veroyal®

Pression artérielle

Tensiomètre de bras pour une mesure précise et confortable



- ✓ Mesure très précise et entièrement automatique de la pression artérielle
- ✓ Brassard universel pratique avec ajustement ergonomique et contrôle intégré de positionnement correct



Tensiomètre de poignet pour une mesure simple et rapide

- ✓ Mesure très précise et entièrement automatique de la pression artérielle
- ✓ Contrôle visuel intégré de positionnement correct de la manchette


Avantages des tensiomètres Veroyal®

- ✓ Manipulation facile et intuitive
- ✓ Grand écran pour une lecture facile des valeurs mesurées
- ✓ Détection et affichage des arythmies cardiaques
- ✓ Classification intégrée du risque cardiovasculaire grâce à l'échelle d'évaluation de l'OMS
- ✓ Vos valeurs mesurées avec d'autres appareils Veroyal®, par ex. : la balance intelligente, peuvent aussi être sauvegardées et associées à vos mesures de tension artérielle sur Veroyal®medi.connect
- ✓ Câble USB inclus



Afin de simplifier le stockage et la gestion des données, l'utilisateur peut transférer les valeurs mesurées au logiciel Veroyal® medi.connect

Quelques règles d'or pour bien mesurer sa tension artérielle

-  1. Prendre toujours sa tension à la même heure car notre tension artérielle varie tout au long de la journée.
-  2. Ne pas fumer ou boire de café dans l'heure précédant la mesure.
-  3. Prendre sa tension après deux ou trois minutes de repos en position assise ou détendue.
-  4. Ne pas prendre sa tension en ayant une forte envie d'uriner.
-  5. Lire attentivement le mode d'emploi avant d'effectuer une mesure.
-  6. Ne pas bouger et ne pas parler pendant la mesure.
-  7. Attendre au moins une minute entre deux mesures consécutives.
-  8. Prendre régulièrement sa tension.

Veroyal®

Pression artérielle



Veroyal® Tensiomètre de bras
Pour une mesure confortable et très précise.
CNK : 3534088



Veroyal® Tensiomètre de poignet
Pour une mesure simple et rapide.
CNK : 3534096



Prenez votre santé en main

Avec les appareils de mesure Veroyal®, vous pouvez apporter une aide précieuse à votre médecin et contribuer activement à votre bonne santé.



N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Saintes
BELGIQUE
www.veroyal.be





Neem uw gezondheid ter harte.
Met de meetapparaten van Veroyal® kunt u uw arts ondersteunen en actief iets voor uw gezondheid doen.



Veroyal® Bloeddruk

Bovenarmbloeddruk-
meter voor nauwkeurige
en comfortabele metingen



- ✓ Volautomatische bloeddrukmeting met hoge meetnauwkeurigheid
- ✓ Comfortabele, universele manchet met ergonomische pasvorm en met een geïntegreerde controle voor een correcte positie van de manchet



Polsbloeddrukmeter
voor eenvoudige en
snelle metingen

- ✓ Volautomatische bloeddrukmeting met hoge meetnauwkeurigheid
- ✓ Met visuele controle voor een correcte positie van de manchet

Voordelen van Veroyal®

- ✓ Eenvoudige, intuïtieve bediening
- ✓ Groot scherm voor het makkelijk aflezen van de gemeten waarden
- ✓ Herkent en toont hartritmestoornissen (aritmie) op het scherm
- ✓ Eenvoudig meetwaarden analyseren dankzij het verkeerslichtsysteem
- ✓ Gegevens compatibel met alle Veroyal®-apparaten, zoals de intelligente personenweegschaal
- ✓ USB-kabel inbegrepen



Eenvoudig beheren en opslaan van de gemeten waarden met de Veroyal® medi.connect software

Enkele gouden regels voor een juiste bloeddrukmeting

1. Meet uw bloeddruk altijd op hetzelfde tijdstip want deze varieert in de loop van de dag.
2. Rook of drink geen koffie een uur voor de meting.
3. Ga zitten, neem twee of drie minuten rust en meet in een ontspannen houding.
4. Meet uw bloeddruk niet met een volle blaas.
5. Lees voor het meten aandachtig de gebruiksaanwijzing.
6. Beweeg of praat niet tijdens de meting.
7. Wacht minstens een minuut tussen twee bloeddrukmetingen.
8. Meet regelmatig uw bloeddruk.



Veroyal® Bloeddruk



**Veroyal® Bovenarm-
bloeddrukmeter**
Voor nauwkeurige en
comfortabele metingen.
CNK : 3534088



**Veroyal®
Polsbloeddrukmeter**
Voor eenvoudig en snel
meten.
CNK : 3534096

N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Sint-Renelde
BELGIË
www.veroyal.be

