

Veroval®



Veroval®



V tomto krátkém video návodu vám vysvětlíme,
jak jednoduše přenesete data z vašeho Veroval® tlakoměru...

Veroval®



... do Veroval® Medi.connect softwaru.


Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková, and the HARTMANN logo is visible. The main navigation bar includes options for 'Přehled', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', 'Domácí test', and 'Nastavení'. Below this, there are filters for 'poslední měření', 'poslední týden', and 'minulý měsíc'. The interface is divided into several panels:

- Krevní tlak (Blood Pressure):** A circular gauge showing 'Systola', 'Diastola', and 'Pulz'.
- Hmotnost (Weight):** A circular gauge showing 'Kg' and 'BMI'.
- Teplota (Temperature):** A circular gauge with a thermometer icon and buttons for 'ráno', 'v poledne', and 'večer'.
- Domácí test (Home Test):** A table with columns 'Test', 'Datum', 'Výsledek', and 'přítel test'.

Test	Datum	Výsledek	přítel test
Cholesterol	-	-	-
Střevo	-	-	-
Žaludek	-	-	-
- EKG (ECG):** A panel with buttons for 'OK', 'SLOW', 'FAST', 'ERROR', 'PAUSE', 'RHYTHM', and 'WAVE', along with a 'Zobrazit podrobné vyhodnocení' link.

Otevřete si Veroval® Medi.connect na vašem počítači,...

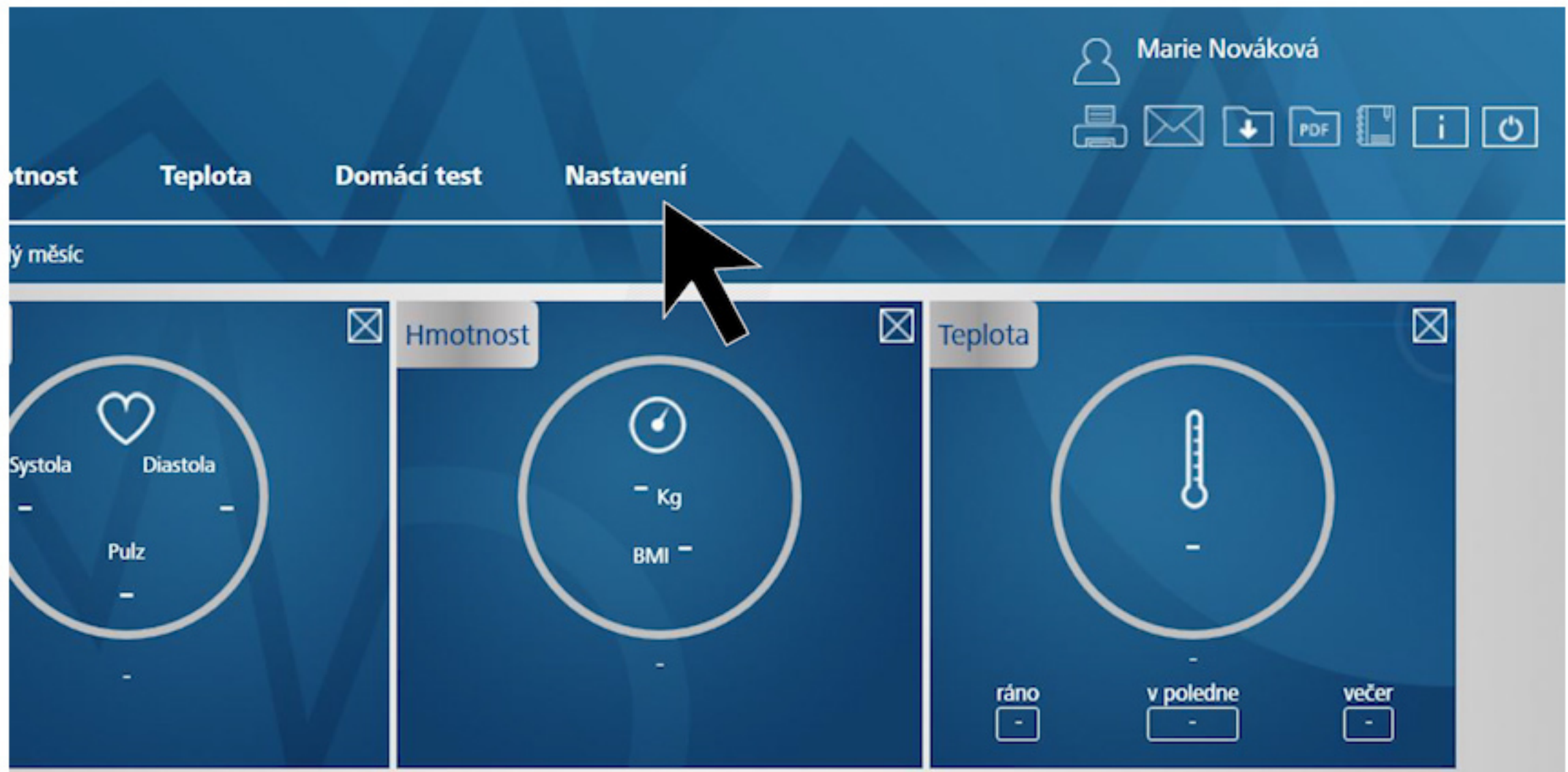

... přejděte na „Nastavení“.

medi.connect

Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

Systém Krevní tlak EKG Hmotnost Teplota Připomínky

Muž Žena

Ulice

PŠČ

Město

věk (roky) Výška Centimetry


Ochrana heslem není nastavena

Následně v řádku níže na „Krevní tlak“.

The screenshot shows the 'Veroval® medi.connect' web application interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková. The navigation menu includes 'Přehled', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', 'Domácí test', and 'Nastavení'. The 'Nastavení' (Settings) page is active, with a sub-menu showing 'Můj profil', 'Systém', 'Krevní tlak', 'EKG', 'Hmotnost', 'Teplota', and 'Připomínky'. The 'Krevní tlak' (Blood Pressure) settings section is expanded, showing two time intervals: 'ráno (05:00 - 08:59)' and 'večer (18:00 - 19:59)'. A horizontal timeline below these intervals allows for selecting measurement times, with markers at (00:00) and (23:59). The 'Volba přístroje' (Device Selection) section lists three options: 'Tensoval Duo Control', 'Veroval tlakoměr na paži', and 'Veroval tlakoměr na zápěstí'. At the bottom, there are buttons for 'Uložit' (Save), 'Obnovit' (Reset), and 'Obnovit' (Refresh).

Na stránce nastavení „Krevní tlak“ klikněte...

Veroval[®]

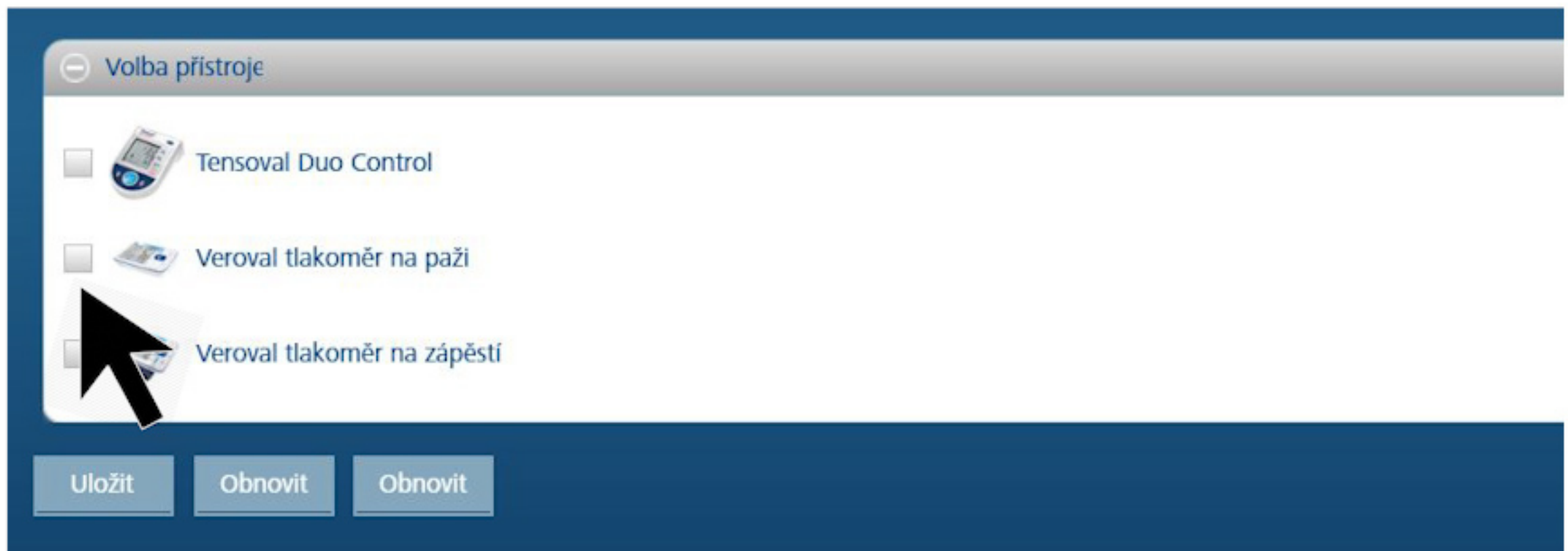

... na požadovaný tlakoměr.

Volba přístroje

Tensoval Duo Control


Veroval tlakoměr na paži

Veroval tlakoměr na zápěstí

1. Paměť uložená v přístroji

2. Paměť uložená v přístroji

Uložit Obnovit Obnovit

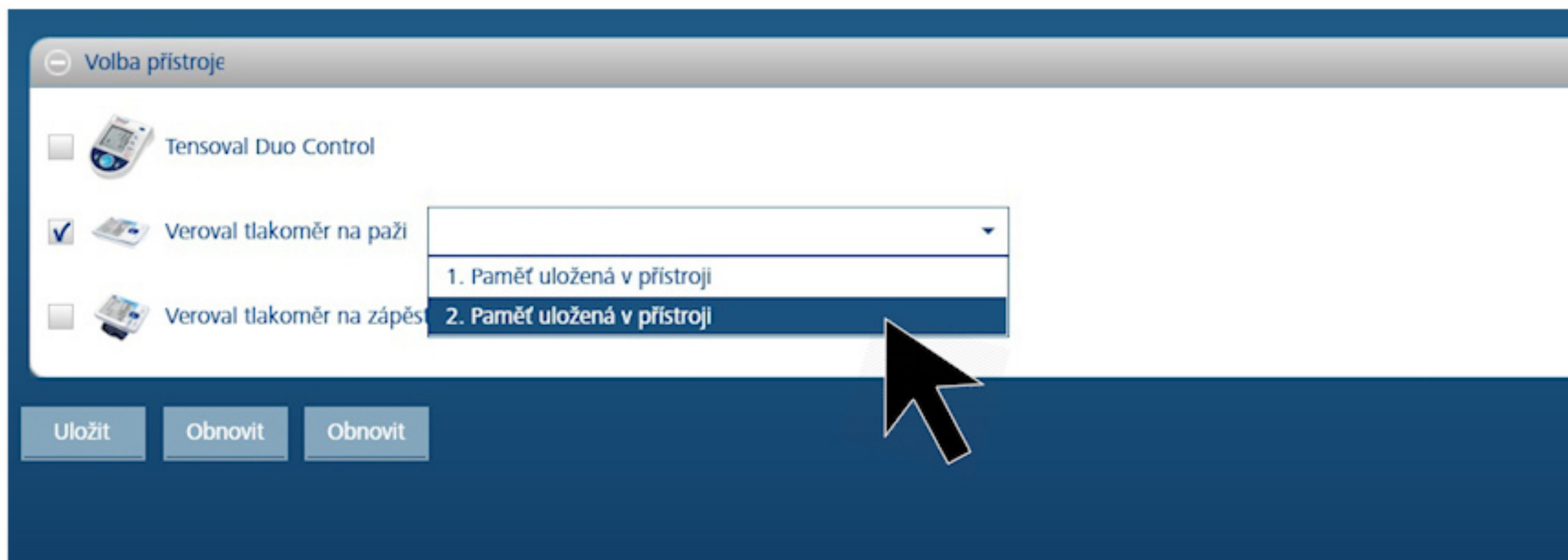


Vyberte uživatele a uložte.

Tento krok stačí provést pouze jednou.




K přenesení dat klikněte na „Krevní tlak“ v horním části rejstříku.

Veroval®

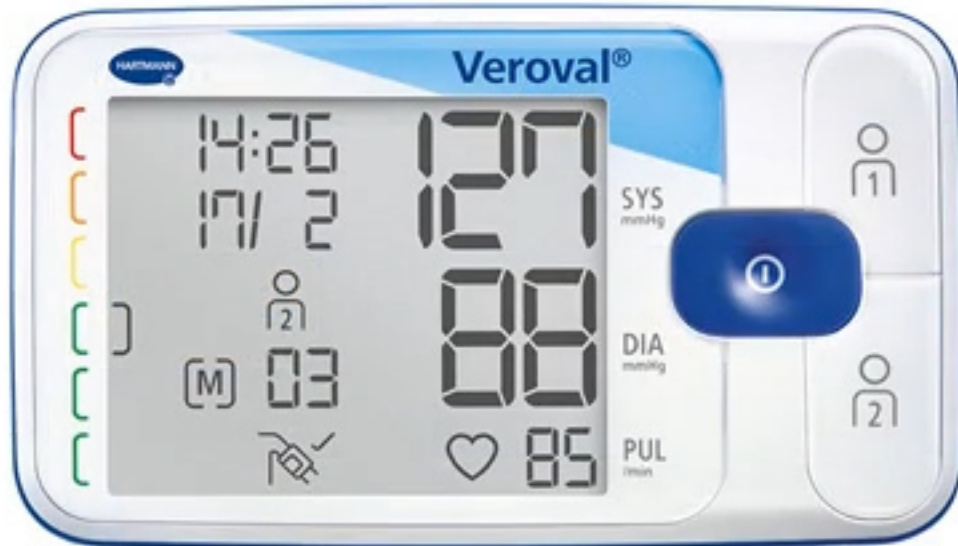


Zasuňte pouze užší konec USB kabelu do krabičky
na zadní straně vašeho tlakoměru...

Veroval®

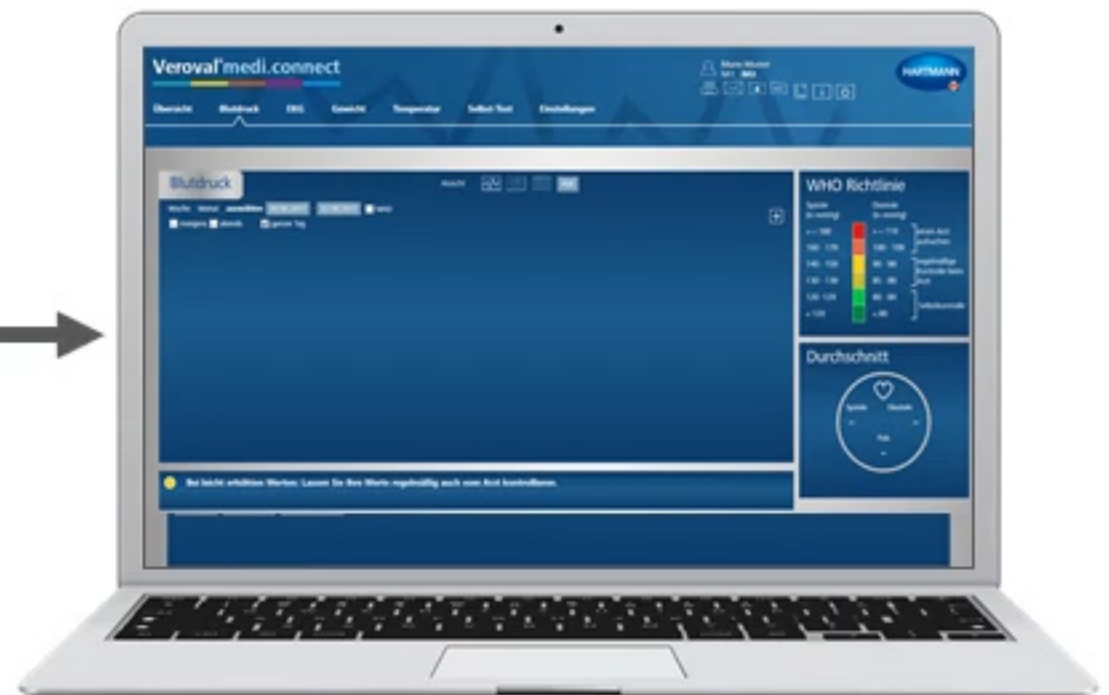


... a spojte širší konec s vaším PC.

Veroval®

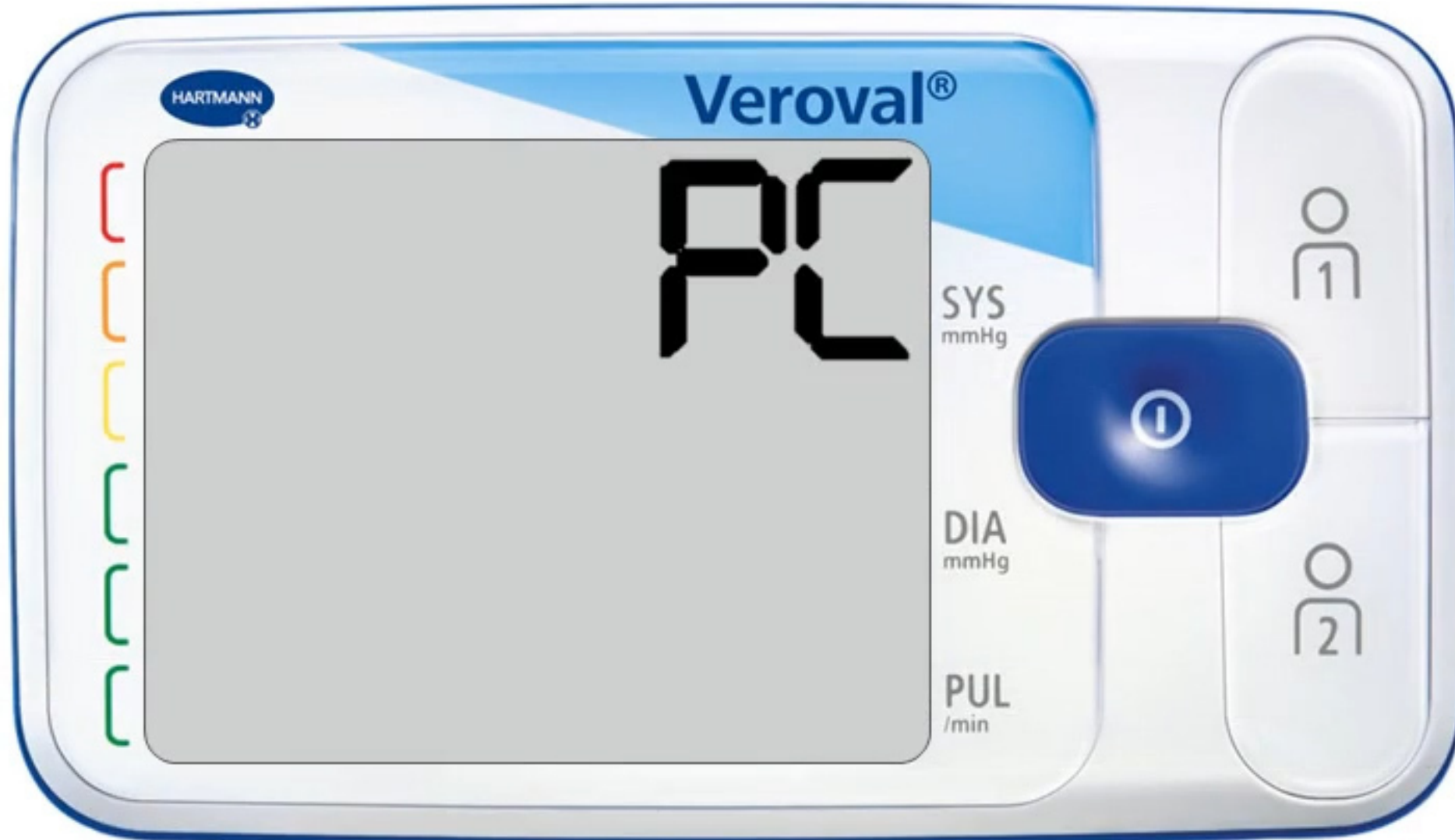

Na displeji vašeho tlakoměru se objeví „PC“.

Veroval®

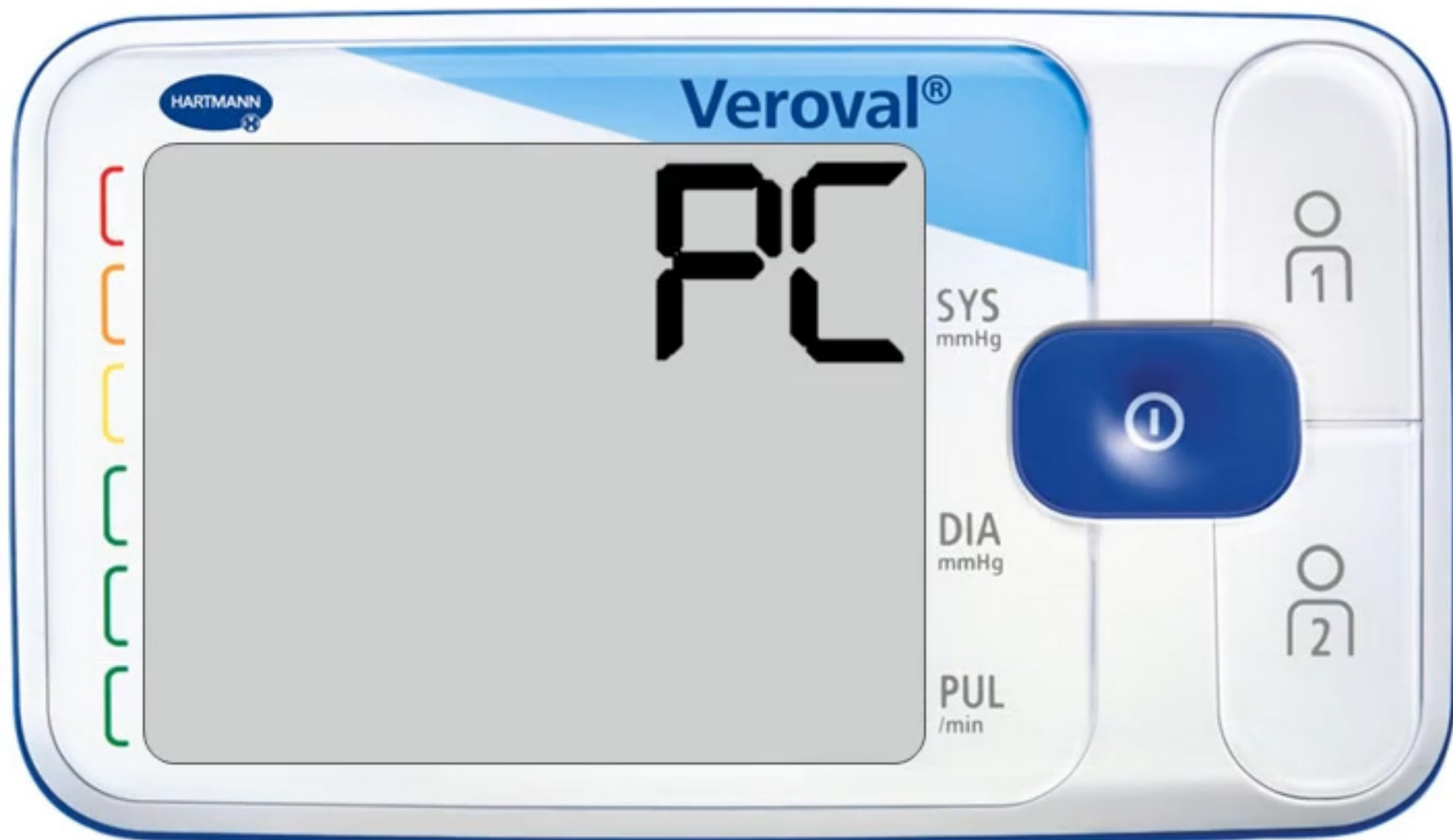

Máte 30 sekund na přenesení dat, jinak se přístroj přepne do pohotovostního režimu.

The screenshot shows the Veroval user interface. At the top, there is a navigation bar with the user's name 'Marie Nováková' and 'M1 M2'. To the right is the 'HARTMANN' logo. Below the name are several icons: a printer, an envelope, a download arrow, a PDF icon, a document icon, an information 'i' icon, and a power icon. A black mouse cursor is pointing at the download arrow icon. Below the navigation bar is a main content area. On the left, there is a dark blue panel with a white plus sign icon. On the right, there is a table titled 'WHO směrnice' (WHO guidelines) showing blood pressure ranges for Systola (in mmHg) and Diastola (in mmHg). The table is color-coded and includes instructions for each range.

Systola (in mmHg)	Color	Diastola (in mmHg)	Instruction
≥ 180	Red	≥ 110] vyhledat lékaře
160 - 179	Orange	100 - 109	
140 - 159	Yellow	90 - 99] pravidelná kontrola u lékaře
130 - 139	Light Green	85 - 89	
120 - 129	Green	80 - 84] Samokontrola
< 120	Dark Green	< 80	

Klikněte vpravo nahoře na tlačítko „Přenos dat“ ...

The screenshot displays the Veroval user interface. At the top right, the user is identified as Marie Nováková (M1 M2) with the HARTMANN logo. Navigation tabs for 'Domácí test' and 'Nastavení' are visible. A 'Náhled' (Preview) section contains icons for a waveform, a clock, a list, and a PDF. A dialog box titled 'Vybrat přístroj' (Select device) is open, showing a list of devices. A mouse cursor points to the first device: 'Veroval tlakoměr na paži' (Wrist cuff) with '2. Paměť uložená v přístroji' (2. Memory stored in device). Below it, an alternative option is shown: 'Veroval EKG a tlakoměr' (EKG and cuff) with '1. Paměť uložená v přístroji' (1. Memory stored in device). To the right, a 'WHO směrnice' (WHO guidelines) section features a color-coded scale for systolic and diastolic blood pressure. The 'Průměr' (Average) section at the bottom right shows a heart icon and labels for 'Systola' and 'Diastola'.

Marie Nováková
M1 M2
HARTMANN

Domácí test Nastavení

Náhled

Vybrat přístroj

Aktuálně zvolená kategorie přístroje: Přístroje pro měření tlaku:
Pro spuštění stahování dat prosím klepněte na odpovídající obrázek.

Veroval tlakoměr na paži
2. Paměť uložená v přístroji

Alternativně můžete také přenášet data z těchto tříd přístrojů:

Veroval EKG a tlakoměr
1. Paměť uložená v přístroji

WHO směrnice


Systola (in mmHg)	Diastola (in mmHg)	Upravení
>= 180	>= 110] vyhledat lékaře
160 - 179	100 - 109	
140 - 159	90 - 99] pravidelná kontrola u lékaře
130 - 139	85 - 89	
120 - 129	80 - 84] Samokontrola
< 120	< 80	

Průměr

Systola Diastola

... a ve výběru na požadovaný přístroj.

Veroval®

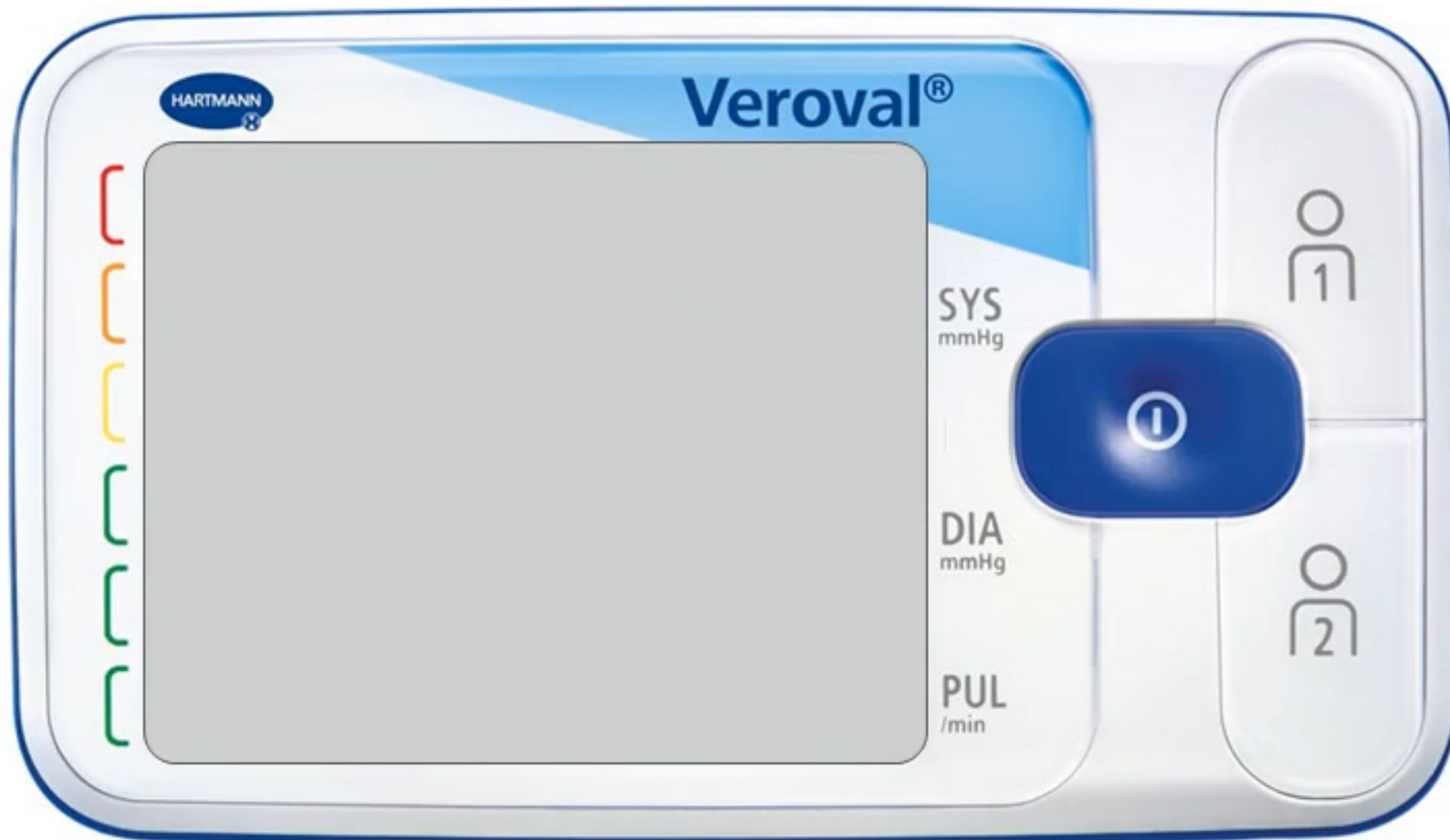


Pokud data nebudou přenesena do 30 sekund, přepne se přístroj do pohotovostního režimu.

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. The top navigation bar includes the application name, user information (Marie Nováková, M1, M2), and the HARTMANN logo. The main menu features options for Přehled, Krevní tlak (selected), EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, and Nastavení. The central panel shows the 'Krevní tlak' section with a date range from 18.07.2017 to 24.07.2017 and a search button. A data visualization area contains a message: 'Data byla přenesena. Vyčkejte, prosím.' To the right, the 'WHO směrnice' section provides a color-coded scale for blood pressure ranges and corresponding medical actions. Below this is the 'Průměr' section with a circular gauge for average values.


Systola (in mmHg)	Diastola (in mmHg)	Recommended Action
> = 180	> = 110	vyhledat lékaře
160 - 179	100 - 109	pravidelná kontrola u lékaře
140 - 159	90 - 99	
130 - 139	85 - 89	Samokontrola
120 - 129	80 - 84	
< 120	< 80	

V tomto případě, prosím, opakujte připojení.

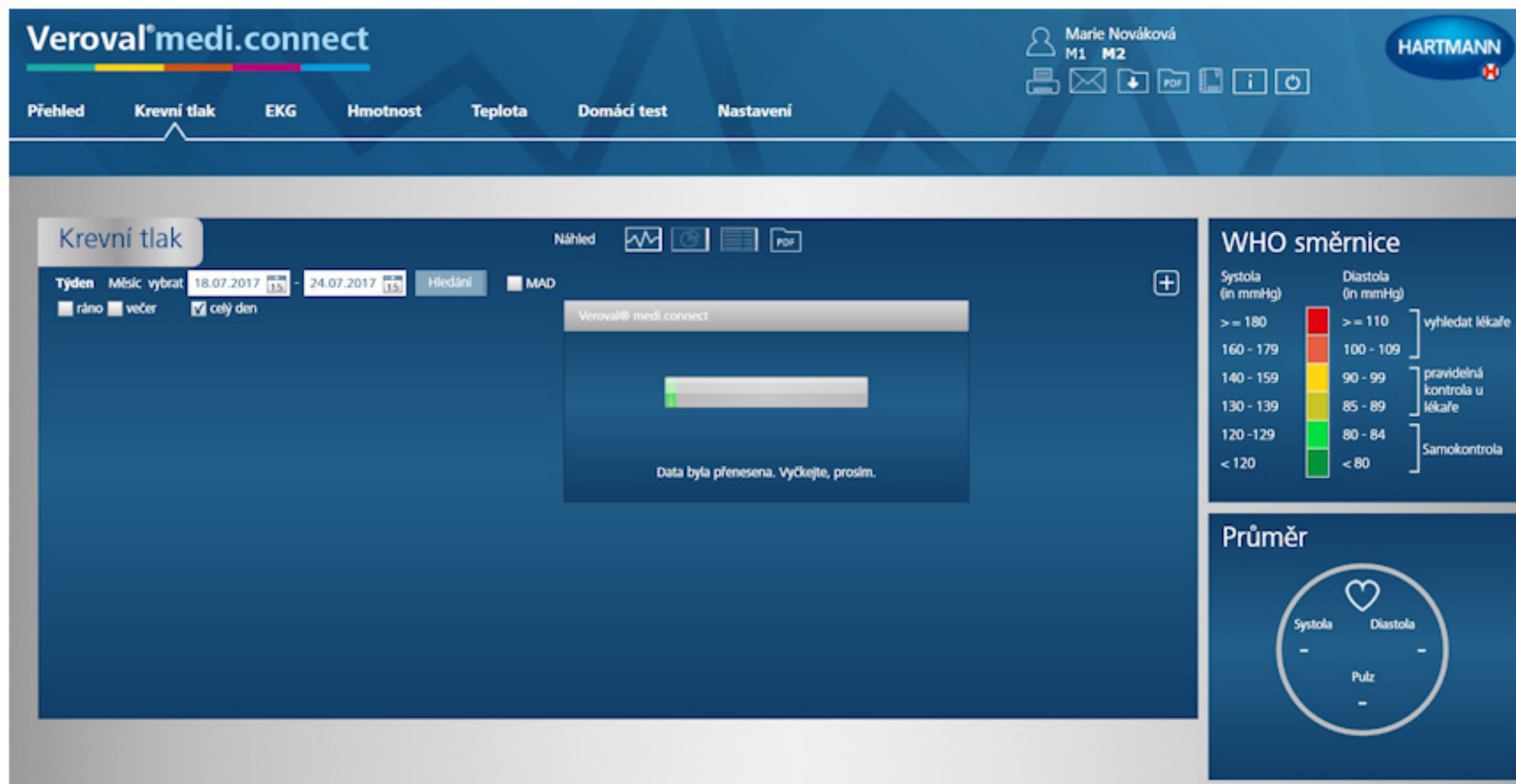

Nyní se přenáší data.

Veroval®

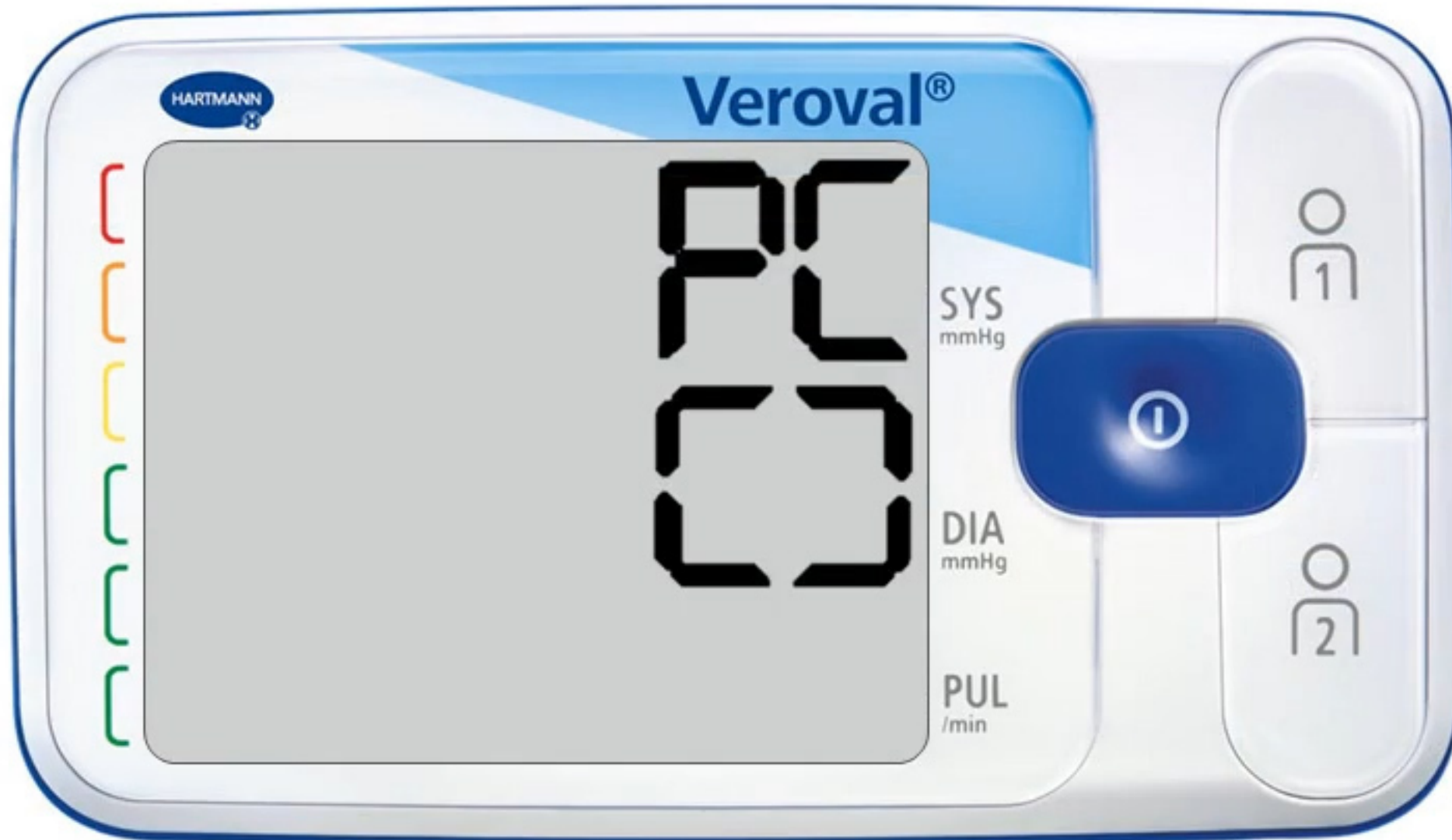

Úspěšné přenesení dat se zobrazí pomocí hranaté závorky.

The screenshot shows the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková (M1, M2) with the HARTMANN logo. The main navigation bar includes: Přehled, Krevní tlak, EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, and Nastavení. The 'Krevní tlak' (Blood Pressure) section is active, displaying a date range from 18.07.2017 to 24.07.2017. A dialog box titled 'Přenos dat z celé paměti uživatelů v tomto přístroji' (Data transfer from all users' memory in this device) is open, showing a table of data transfer details. A mouse cursor is pointing at the 'Storno' (Cancel) button. To the right, there is a 'WHO směrnice' (WHO guidelines) section with a color-coded scale for systolic and diastolic blood pressure, and a 'Průměr' (Average) section with a circular gauge.

WHO směrnice

Systola (in mmHg)	Diastola (in mmHg)	Učinnost
>= 180	>= 110	vyhledat lékaře
160 - 179	100 - 109	pravidelná kontrola u lékaře
140 - 159	90 - 99	
130 - 139	85 - 89	Samokontrola
120 - 129	80 - 84	
< 120	< 80	

Průměr

Systola: - Diastola: -
Pulz: -

Po dokončení zvolte vaše úložiště...

The screenshot shows the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Marie Nováková (M1, M2) with the HARTMANN logo. The main navigation bar includes: Přehled, Krevní tlak (selected), EKG, Hmotnost, Teplota, Domácí test, and Nastavení.

The central panel is titled "Krevní tlak" and displays a data transfer confirmation dialog. The dialog title is "Přenos dat z celé paměti uživatelů v tomto přístroji". It shows the following data:


Paměť uložena v přístroji	Uživatel	Celkový počet přenesených měření	Duplicitní záznamy	Nová měření	Detail
<input checked="" type="checkbox"/>	1	není k dispozici	1	0	1

Below the table, there is a message: "Stisknutím tlačítka Uložit dojde k uložení dat všech zvolených uživatelů." and two buttons: "Uložit" and "Storno". A mouse cursor is pointing at the "Uložit" button.

On the right side, there are two panels:

- WHO směrnice**: A color-coded chart showing blood pressure ranges and corresponding actions:
 - >= 180 (red): vyhledat lékaře
 - 160 - 179 (orange): pravidelná kontrola u lékaře
 - 140 - 159 (yellow): pravidelná kontrola u lékaře
 - 130 - 139 (light green): pravidelná kontrola u lékaře
 - 120 - 129 (green): pravidelná kontrola u lékaře
 - < 120 (dark green): Samokontrola
- Průměr**: A circular gauge showing average values for Systola, Diastola, and Pulz, all currently at a dash (-).

... a klikněte na „Uložit“.

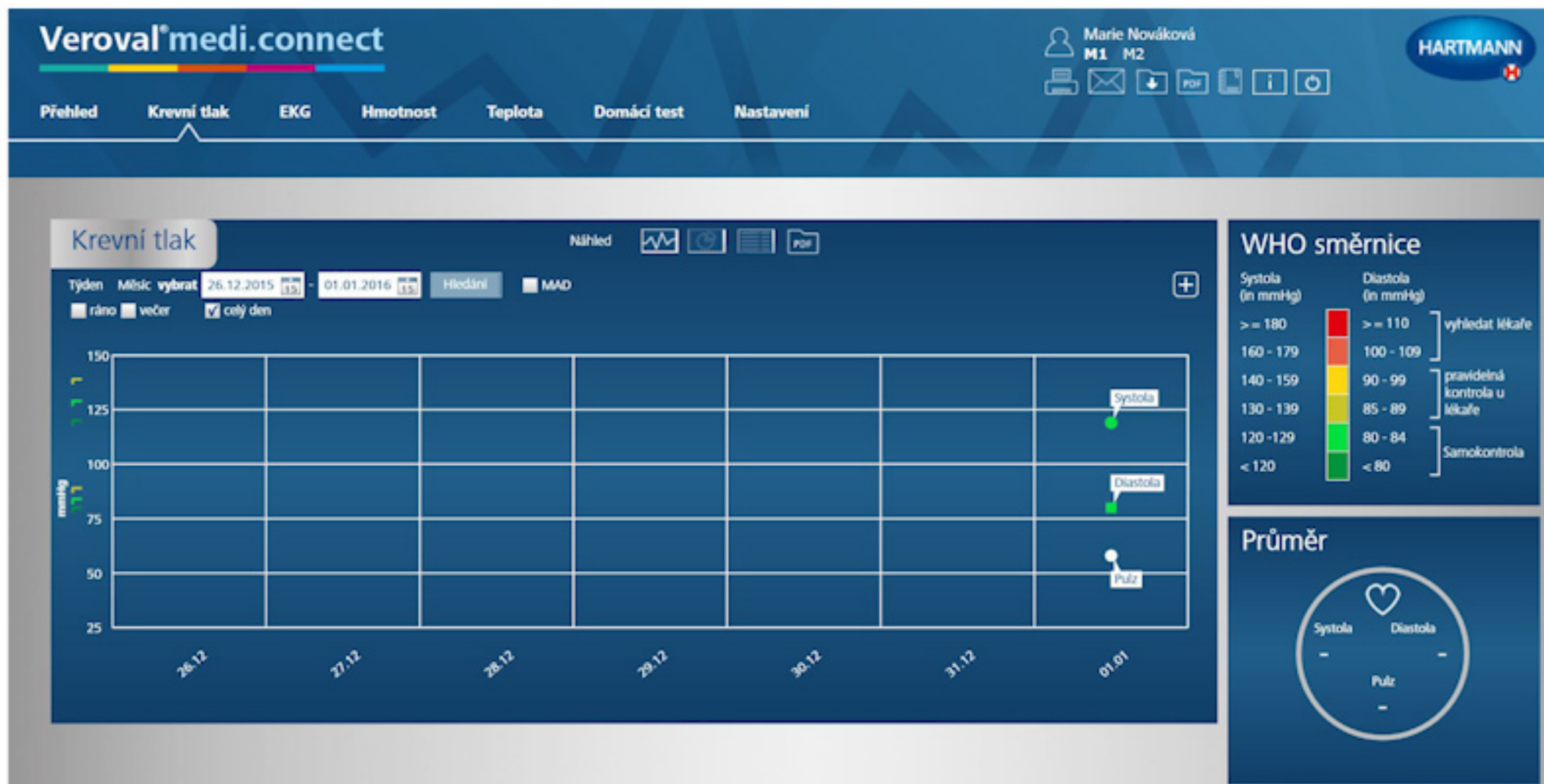

Nyní můžete všechna uložená data v horní části rejstříku „Krevní tlak“ vyhledat a zobrazit např. jako grafiku,...

Veroval® medi.connect

Marie Nováková
M1 M2

HARTMANN

Přehled **Krevní tlak** EKG Hmotnost Teplota Domácí test Nastavení

Krevní tlak

Náhled

Týden Měsíc vybrat 26.12.2015 - 01.01.2016 Hledání

Datum	Čas	Systola	Diastola	Pulz	Porucha srdečního rytmu	Poznámky
01.01.2016	01:02	119	80	58		

WHO směrnice

Systola (in mmHg)	Diastola (in mmHg)	akce
> = 180	> = 110	vyhledat lékaře
160 - 179	100 - 109	pravidelná kontrola u lékaře
140 - 159	90 - 99	
130 - 139	85 - 89	Samokontrola
120 - 129	80 - 84	
< 120	< 80	

Průměr

Systola - Diastola -
Pulz -

... výpis měření...

The screenshot displays the Veroval software interface. At the top, there are navigation buttons: 'Tisk', 'PDF', 'Zvolit nové', and 'Zavřít'. The main content area is titled 'Přehled měření krevního tlaku: 26.12.2015 - 01.01.2016'. Below this, patient information is listed in a grid format:

Pohlaví	Žena	Ulice			
Jméno	Marie	poČ			
Příjmení	Nováková	Město			
Datum narození	03.02.1965	Věk (roky)	52	Výška	165
				Online služba	

Below the patient information, there is a section for 'Medikace' (Medication) with the text 'K dispozici nejsou žádná data.' (No data available).

Krevní tlak

Celkový počet měření pro zvolené časové období: 1

Datum	Čas	WHD	Sys. mmHg	Diast. mmHg	Pulz/mín	Porucha srdečního rytmu	MAD	manuálně	Provést analýzu	Denní doba	Medikace/ Poznámka
01.01.2016	01:02	●	119	80	58		93		✓		

MAD = Střední arteriální tlak

On the right side of the interface, there is a vertical sidebar with a scale for blood pressure (mmHg) ranging from 10 to 109, and a circular gauge labeled 'Diastola'.

... nebo PDF.

Veroval®

