


### Drogues

### Multi-test rapide

### Voici comment procéder :

1

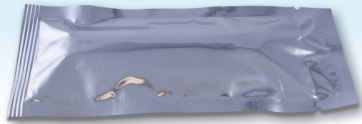

#### Préparation :

Amenez le sachet avec cassette-test à température ambiante (15 °C à 27 °C) avant le début du test. Retirez le test de dépistage de drogue du film d'emballage.

2



- Recueillir l'urine fraîche dans un récipient. Si l'urine est trouble, attendez que les composés se déposent dans le fond du récipient avant de faire le test.
- Retirez le cache de protection et plongez le test de dépistage de drogue dans l'urine jusqu'au repère pendant au moins 10 secondes. Assurez-vous que la cassette-test n'est immergée que jusqu'au bord inférieur.
- Veillez à ne pas toucher la fenêtre d'évaluation et à n'y verser aucune urine.


3



- Remettez le cache de protection sur la cassette-test et posez-la sur une surface plane. Ne touchez et ne déplacez plus la cassette-test. Veuillez attendre l'apparition des deux lignes de couleur dans la zone réactive.


4

- Lisez le résultat après 5 minutes environ, mais veuillez ne pas dépasser 10 minutes.
- Le test de dépistage de drogue doit être analysé avec une clarté ambiante suffisante afin de pouvoir identifier les lignes faiblement colorées.

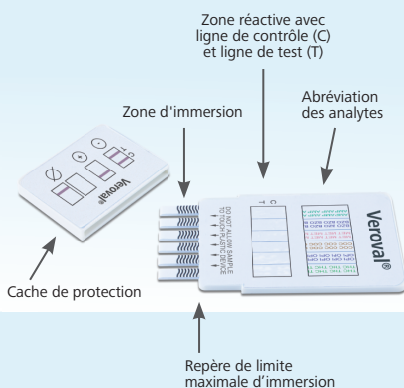

Pour évaluer le résultat, vérifiez tout d'abord la présence d'une ligne dans la fenêtre de test sous (C). Peu importe l'intensité de la teinte de la ligne de contrôle. Chaque bandelette doit être analysée individuellement.

#### Résultat négatif

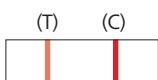


Le résultat est négatif en cas d'apparition d'une **ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone de contrôle (C)** et d'une **ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone réactive (T)**. Ceci veut dire que l'échantillon d'urine est exempt de drogues.

La concentration de ces drogues spécifiques (ou de leurs dérivés) dans l'échantillon se situe en-dessous du seuil de détectabilité.

#### Indications et contraintes :

- Le multi-test rapide n'est pas un dispositif médical et ne peut donc pas être utilisé à des fins diagnostiques.
- Le test est positif si **aucune ligne** n'apparaît dans la zone de test (T).
- La prise délibérée d'adultérants peut nuire au test. En cas de soupçon sur la véracité des résultats, il est nécessaire de renouveler le test à l'aide d'un nouvel échantillon d'urine.
- L'auto-test ne peut pas différencier l'abus de drogues et la prise de médicaments similaires sur ordonnance médicale.
- Bien qu'une falsification du test ne puisse être envisagée en raison de la grande variété de substances, il n'est pas possible d'exclure la probabilité qu'une autre substance ou qu'une erreur technique ou inhérente à une procédure ait pu fausser le résultat du test.


#### Résultat positif

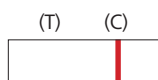

Le **résultat est positif** en cas d'apparition d'une **ligne rouge clair à rouge foncé dans la zone de contrôle (C)** et d'**absence de ligne rouge dans la zone réactive (T)**.

La concentration de ces drogues spécifiques (ou de leurs dérivés) dans l'échantillon se situe au-delà du seuil de détectabilité. Il n'est pas possible d'en conclure le niveau de concentration ainsi que la gravité de la consommation correspondante.

#### Résultat non valide

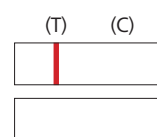

Le test n'a **pas été correctement réalisé** et est non valide en cas d'**absence de ligne de contrôle (C)** ou de **présence d'une seule ligne de test (T)**.

Vérifiez si vous avez précisément suivi tous les points du mode d'emploi. Réalisez un nouveau test avec un nouvel échantillon d'urine.