

Notfallknopf

DE Gebrauchsanleitung

Bitte lesen Sie diese Gebrauchsanleitung vor der ersten Anwendung sorgfältig durch, denn eine korrekte Nutzung von Veroval® Easy Life ist nur bei richtiger Handhabung des Systems möglich. Betreiben Sie den Notfallknopf gemäß den Informationen in der Gebrauchsanleitung. Bewahren Sie diese sorgfältig auf und machen Sie sie anderen Benutzern zugänglich. Überprüfen Sie die Geräte auf äußere Unversehrtheit der Verpackung und auf die Vollständigkeit des Inhalts.

Lieferumfang

- 1 Notfallknopf inklusive Batterie
- 1 Gebrauchsanleitung
- 1 Halskette
- 2 Armbandriemen



Gerätebeschreibung

- 1 Notfallknopf
- 2 LED-Anzeige
- 3 Halskette
- 4 Armbandriemen (2x)


Aufgabe des Notfallknopfs

- Durch Drücken des Notfallknopfs werden automatisch Notfall-Benachrichtigungen an zuvor bestimmte Personen versendet.
- Der Notfallknopf kann als Armband oder Halskette getragen werden.
- Der Notfallknopf arbeitet mit einer langlebigen Batterie und überträgt drahtlos seine Daten an die Basisstation.
- Der Notfallknopf ist wasserdicht nach IP68 und kann unter fließendem Wasser gereinigt werden.

Installation und Inbetriebnahme


Installation

1. Entfernen Sie bei Erstgebrauch den Plastikstreifen am Notfallknopf um das Gerät in Betrieb zu setzen. Nach ca. 30 Sekunden ist das Gerät betriebsbereit.
2. Drücken und halten Sie die gelbe Taste der Basisstation 3 Sekunden lang.
3. Lassen Sie die gelbe Taste los, sobald die gelbe Hintergrundbeleuchtung anfängt zu blinken und die Basisstation 2 Pieptöne abgibt.
4. Die Basisstation gibt dann einen weiteren Piepton ab und wechselt in den Installationsmodus.
5. Drücken Sie die Testtaste am Notfallknopf, um den Installationscode an die Basisstation zu übermitteln.
6. Bei erfolgreicher Installation gibt die Basisstation zur Bestätigung 2 Pieptöne ab.
7. Drücken Sie die gelbe Taste der Basisstation um den Installationsmodus zu verlassen.
8. Der Manager (siehe Rollenprofile in Gebrauchsanleitung Veroval® Easy Life Start-Set) erhält nach kurzer Zeit eine Push-Benachrichtigung und muss nun den Notfallknopf in der Easy Life App einrichten. Fügen Sie eine genauere Beschreibung ein.

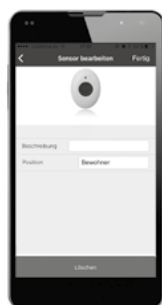

Testen des Notfallknopfs

Drücken Sie den Notfallknopf. Sie erhalten eine akustische Rückmeldung von der Basisstation, wenn der Notfallknopf eingelesen wurde und in der App wird ein „Benutzeralarm mobil“ angezeigt.

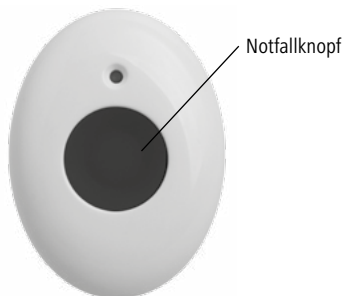

Überprüfen des Notfallknopfs über die Veroval® Easy Life App

- Um zu prüfen, ob der Notfallknopf Daten an die App übermittelt, öffnen Sie bitte die App und wählen Sie im Menü „Sensoren“ aus.
- Hier können Sie erkennen, ob der Notfallknopf aktiv (blaue Farbe) ist.
- Die Farbe Rot zeigt an, dass der Notfallknopf nicht in Reichweite ist bzw. die Batterie leer ist.

Tragevarianten

- Der Notfallknopf kann als Anhänger mit Halskette oder als Armband getragen werden.

Variante 1 Halskette:

1. Drehen Sie den Notfallknopf auf die Rückseite.
2. Ziehen Sie die Kette vorsichtig in paralleler Richtung zum Notfallknopf durch die Öse.



Variante 2 Armband:

1. Drehen Sie den Notfallknopf auf die Rückseite.
2. Nehmen Sie die Armbandriemen und haken Sie sie vorsichtig an den Seiten des Notfallknopfs ein.



Niedriger Batteriestand

- Ein niedriger Batteriestand bei den Zubehörteilen löst ein Ereignis aus, das in der Ereignisliste der Easy Life App angezeigt wird und per Push-Benachrichtigung an den Manager (siehe Rollenprofile in Gebrauchsanleitung Veroval® Easy Life Starter-Set) geschickt wird.
- Bitte kaufen Sie einen neuen Notfallknopf, damit Sie eine weitere einwandfreie Nutzung des Systems gewährleisten können.

Erklärung von Fehleranzeigen

- Nutzen Sie die folgenden Informationen und unsere FAQ (häufig gestellten Fragen) auf unserer Internetseite, um Fehler selbst zu beheben.
- Bevor Sie die Geräte reklamieren, prüfen Sie bitte, ob die Batterien leer sind und tauschen Sie diese ggf. aus.

Aufgetretener Fehler	Behebung
Der Notfallknopf blinkt nicht beim Drücken oder die Basisstation gibt keinen Bestätigungston.	Bitte überprüfen Sie, ob der Batteriestand des Notfallknopfs niedrig ist. Überprüfen Sie ebenfalls die korrekte Installation und die Entfernung zur Basisstation.
Es werden keine Daten von dem Notfallknopf gesendet.	Bitte überprüfen Sie, ob der Batteriestand niedrig ist. Überprüfen Sie ebenfalls die korrekte Installation und die Entfernung zur Basisstation.

Funkreichweite

- Die Funkreichweite nimmt mit zunehmendem Abstand des Notfallknopfs zur Basisstation ab, d. h. es ist auf eine relativ nahe Platzierung zu achten.
- Durch verschiedene Materialien und Störquellen kann die Funkreichweite reduziert werden. Berücksichtigen Sie daher folgende Punkte:
- Ein Mindestabstand zu Wärmequellen, Lampen und Belüftungssystemen von ca. 1,2 m ist empfehlenswert.
- Baumaterialien (Wände) und Hindernisse im Raum könnten die Funksignale stören und müssen in die Planung mit einbezogen werden.



Hinweise zu Batterien

Verschluckungsgefahr

Kleinkinder könnten Batterien verschlucken und daran ersticken. Daher Batterien für Kleinkinder unerreichbar aufbewahren.

Explosionsgefahr

- Keine Batterien ins Feuer werfen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder kurzgeschlossen werden.
- Wenn eine Batterie ausgelaufen ist, Schutzhandschuhe anziehen und das Batteriefach mit einem trockenen Tuch reinigen. Sollte Flüssigkeit aus einer Batteriezelle mit Haut oder Augen in Kontakt kommen, die betroffene Stelle mit Wasser reinigen und ggf. ärztliche Hilfe aufsuchen.
- Schützen Sie Batterien vor übermäßiger Wärme.
- Keine Batterien zerlegen, öffnen oder zerkleinern.



Sicherheitshinweise zu den Geräten

- Das Gerät besteht aus hochwertigen elektronischen Präzisionsteilen. Die Lebensdauer des Gerätes hängt vom sorgfältigen Umgang ab.
- Schützen Sie das Gerät vor starken Erschütterungen, Schlägen oder Vibrationen und lassen Sie es nicht auf den Boden fallen.
- Den Notfallknopf nicht öffnen.
- Das Gerät darf nicht abgeändert, auseinander genommen oder selbst repariert werden. Reparaturen dürfen nur von autorisierten Fachkräften durchgeführt werden.
- Das Gerät weder extremen Temperaturen, noch Feuchtigkeit, Staub oder direkter Sonneneinstrahlung aussetzen, da dies zu Funktionsstörungen führen kann.
- Beachten Sie bitte die Lager- und Betriebsbedingungen im Abschnitt „Technische Daten“. Eine Lagerung oder Benutzung außerhalb der festgelegten Temperatur- und Luftfeuchtebereiche kann die Genauigkeit der Sensorwerte sowie die Funktion des Sensors und des Gerätes beeinflussen.

Hinweise zur Entsorgung

Im Interesse des Umweltschutzes dürfen verbrauchte Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bitte beachten Sie die jeweils gültigen Entsorgungsvorschriften oder nutzen Sie öffentliche Sammelstellen.



Dieses Produkt unterliegt der Europäischen Richtlinie 2012/19/EU über Elektro- und Elektronik-Altgeräte und ist entsprechend gekennzeichnet. Entsorgen Sie elektronische Geräte nie mit dem Haushaltsabfall. Bitte informieren Sie sich über die örtlichen Bestimmungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Schutz der Umwelt und der menschlichen Gesundheit.

Zeichenerklärung



Beachtung der Bedienungsanleitung



Bitte beachten



Temperaturbegrenzung



Luftfeuchtebegrenzung



Trocken aufbewahren



Entsorgungshinweis Pappe



Symbol zur Kennzeichnung von Elektro- und Elektronikgeräten



Verpackung umweltgerecht entsorgen



Verpackung umweltgerecht entsorgen



Chargencode



Kennzeichnung nach der Richtlinie 2011/65/EU



Verpackung umweltgerecht entsorgen

IP68 Schutz gegen zeitweiliges Untertauchen

Garantiebedingungen

Sie haben ein HARTMANN-Qualitäts-Produkt erworben. Wir bedanken uns für Ihre Entscheidung. Um die HARTMANN-Qualität sicherzustellen, wurde jedes Produkt vor der Auslieferung ausführlich auf einwandfreie Funktion geprüft und ohne im Test erkennbare Defekte ausgeliefert. Sollte es dennoch einmal zu einem Schaden gekommen sein, gelten nachfolgende Regelungen:

Garantie

Die Garantie beträgt 2 Jahre ab Kaufdatum gemäß Kaufbeleg.

Lieferumfang und Kaufbeleg

Bitte legen Sie das Produkt mit allen Bestandteilen des Lieferumfangs sowie Ihren Original-Kaufbeleg bei der Beanspruchung der gesetzlichen Garantie oder Gewährleistung demjenigen vor, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Er wird sich um die weitere Vorgehensweise kümmern. Oder senden Sie das Produkt zusammen mit einer Kopie des Kaufbeleges, Ihrer Adresse, Ihrer Telefonnummer und Ihrer E-Mail-Adresse (wenn vorhanden) sowie mit der Beschreibung der Störung an die entsprechende Serviceadresse ihres Landes.

Gewährleistungsfrist

Die gesetzliche Gewährleistungsfrist wird durch diese Garantie nicht eingeschränkt. Die Garantiezeit wird verlängert, wenn dies eine gesetzliche Regelung vorsieht. In Ländern, in denen eine zwingende Garantie über die gewährte Garantiezeit hinaus und/oder eine Ersatzteillagerhaltung und/oder eine Schadensersatzregelung gesetzlich vorgeschrieben sind, gelten die dortigen gesetzlichen Vorschriften.

Kontaktdaten bei Kundenfragen

Deutschland:

PAUL HARTMANN AG
Service Center Diagnostic
Friedrich-Penseler-Str. 17
21337 Lüneburg
☎ 0800-400 400 9
(gebührenfrei innerhalb Deutschlands)
Mo.-Fr. von 08.00 bis 16.00 Uhr
customer.care.center@hartmann.info
www.veroval.de

Österreich:

UTS Geräte Service Ges.m.b.H.
Sendnergasse 30,
2320 Schwechat
☎ +43 1 706 14 15
Mo.-Fr. von 7.30 bis 17.00 Uhr
office@uts.at
www.veroval.at

Schweiz:

IVF HARTMANN AG
Victor-von-Bruns-Strasse 28
8212 Neuhausen
☎ +41 52 674 31 11
Mo.-Fr. von 7.30 bis 17.00 Uhr
info@ivf.hartmann.info
www.veroval.ch

Belgien:

N.V. PAUL HARTMANN S.A.
Avenue Paul Hartmannlaan,1
1480 Saintes/Sint-Renelde
☎ +32 2391 44 44
audiodiagnostic.phbe@hartmann.info
www.veroval.be

Stand der Information: Juni 2017

Technische Daten

Batterie: 1 x CR2032 3V Lithiumbatterie
Frequenz: 869,2375 MHz
Funkreichweite: > 400 m im offenen Gelände
Betriebs-/Lagerbedingungen:
– Umgebungstemperatur: –10 °C bis +45 °C
– Luftfeuchtigkeit: bis zu 85 %, nicht kondensierend
Maße: 48 x 36 x 13,5 mm

Hersteller:

Climax Deutschland GmbH
Max-Planck-Straße 10
50858 Köln

Vertrieb:

Deutschland:
PAUL HARTMANN AG,
89522 Heidenheim
info@hartmann.info

Österreich:

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.,
2355 Wiener Neudorf
office@at.hartmann.info

Schweiz:

IVF HARTMANN AG
8212 Neuhausen
info@ivf.hartmann.info

Belgien:

N.V. PAUL HARTMANN S.A.
1480 Saintes/Sint-Renelde
info@be.hartmann.info