

### Bouton d'urgence

#### FR Mode d'emploi

Veillez lire attentivement ce mode d'emploi avant d'utiliser le système pour la première fois. Le système Veroval® Easy Life ne donnera les résultats escomptés que s'il est manipulé correctement. Utilisez le bouton d'urgence conformément aux informations présentes dans ce mode d'emploi. Conservez soigneusement ce mode d'emploi et faites en sorte qu'il soit accessible à d'autres utilisateurs. Vérifiez l'intégrité de l'emballage et de son contenu.

#### Contenu du conditionnement

- 1 bouton d'urgence avec la pile incluse
- 1 mode d'emploi
- 1 collier
- 2 bracelets



#### Description du dispositif

- 1 Bouton d'urgence
- 2 Affichage LED
- 3 Collier
- 4 Bracelets (2x)

#### Fonction du bouton d'urgence

- En appuyant sur le bouton d'urgence des alertes sont automatiquement envoyées aux personnes enregistrées.
- Le bouton d'urgence peut être porté comme un bracelet ou comme un collier.
- Le bouton d'urgence fonctionne avec une pile de longue durée et transmet ses données sans fil à la station de base.
- Le bouton d'urgence a un IP d'étanchéité de 68 et peut être nettoyé sous l'eau courante.

### Installation et mise en service

#### Installation


1. Retirez la bande de plastique au niveau du bouton d'urgence lors de la première utilisation pour mettre l'appareil en service. L'appareil est prêt à l'emploi, après environ 30 secondes.
2. Appuyez et maintenez enfoncé la touche jaune de la station de base pendant 3 secondes.
3. Relâchez la touche jaune lorsque le rétroéclairage jaune commence à clignoter et la station de base émet deux signaux sonores.
4. La station de base émet un autre bip puis passe en mode d'installation.
5. Appuyez sur la touche de test se trouvant sur le bouton d'urgence pour fournir le code d'installation à la station de base.
6. Lorsque l'installation a été effectuée avec succès, la station de base émet deux signaux sonores.
7. Appuyez sur la touche jaune de la station de base pour quitter le mode d'installation.

8. Le gestionnaire (voir les profils de rôle dans le mode d'emploi du kit de démarrage Veroval® Easy Life) reçoit immédiatement une notification push et doit configurer le bouton d'urgence dans l'application Easy Life. Ajoutez une description plus détaillée.



#### Test du bouton d'urgence

Appuyez sur le bouton d'urgence. Vous entendrez retentir un signal sonore de la station de base lorsque le bouton d'urgence fonctionne et le message « Alarme mobile de l'utilisateur » s'affichera dans l'application.

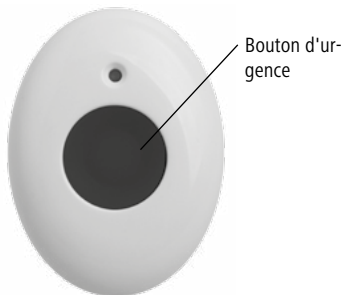

#### Vérifier le bouton d'urgence sur l'application Veroval® Easy Life

- Pour vérifier si le bouton d'urgence transmet les données à l'application, veuillez ouvrir l'application puis sélectionner dans le menu « Capteurs ».
- Vous pouvez voir ici si le bouton d'urgence est actif (couleur bleue).
- La couleur rouge indique que le bouton d'urgence n'est pas dans la portée ou que la pile est vide.

#### Variantes de port

- Le bouton d'urgence peut être porté comme un bracelet ou comme un collier.

Variante 1 comme collier :

1. Tournez le bouton d'urgence sur la face arrière.
2. Insérez la chaîne doucement à travers l'œillet dans la direction parallèle au bouton d'urgence.



Variante 2 comme bracelet :

1. Tournez le bouton d'urgence sur la face arrière.
2. Prenez le bracelet et fixez-le délicatement sur les côtés du bouton d'urgence.



#### Niveau de piles faible

- Un niveau de piles faible des accessoires déclenche un événement qui est affiché dans l'historique des événements et est envoyé par notification push au gestionnaire (voir les profils de rôle dans le mode d'emploi du kit de démarrage Veroval® Easy Life).

- Veuillez acheter un nouveau bouton d'urgence, afin de vous assurer une utilisation efficace et continue du système.

#### Explication des messages d'erreur

- Utilisez les informations suivantes et notre FAQ (questions fréquentes) proposée sur notre site Internet pour trouver les causes d'erreurs : [www.veroval.info](http://www.veroval.info)
- Avant de faire une réclamation, veuillez vérifier tout d'abord si les piles sont vides et les changer si besoin.

Erreur	Solution
Le bouton d'urgence ne clignote pas lorsque vous appuyez sur la touche de test ou la station de base n'émet aucun signal sonore.	Veillez vérifier que le niveau de la pile du bouton d'urgence est suffisant. Vérifiez également si l'installation est correcte et la distance avec la station de base.
Aucune donnée n'a été envoyée depuis le bouton d'urgence.	Veillez vérifier que le niveau de la pile du bouton d'urgence est suffisant. Vérifiez également si l'installation est correcte et la distance avec la station de base.

#### Portée radio

- La portée radio diminue plus la distance du bouton d'urgence augmente avec la station de base ; il est donc important d'assurer une position relativement proche.
- La portée radio peut être réduite par divers matériaux et sources d'interférences. Par conséquent, veuillez tenir compte des points suivants :
  - Une distance minimale d'environ 1,2 m des sources de chaleur, des systèmes d'éclairage et de ventilation est recommandée.
  - Les matériaux de construction (murs) et les obstacles dans l'espace pourraient interférer avec les signaux radio et doivent être pris en considération au moment de la planification.

#### ⚠ Indications sur les piles

##### Risque de suffocation

Les enfants en bas âge pourraient avaler les piles et s'étouffer. Par conséquent, conservez les piles hors de portée des enfants.

##### Risque d'explosion

- Ne pas jeter les piles au feu.
- Les piles ne doivent pas être rechargées ni court-circuitées.
- Si une pile a fui, porter des gants de protection et nettoyer le compartiment à piles avec un chiffon sec. Si le liquide d'une pile entre en contact avec la peau ou les yeux, rincer la zone concernée avec de l'eau et le cas échéant consulter un médecin.
- Protégez les piles de la chaleur excessive.
- Ne jamais désassembler, ouvrir ou broyer une pile.

#### ⚠ Remarques relatives à la sécurité des appareils

- L'appareil contient des composants électroniques de précision de haute qualité. La précision de la valeur mesurée et de la durée de vie de l'appareil reposent sur une utilisation précautionneuse.
- Protégez l'appareil des fortes secousses, des chocs ou des vibrations et veillez à ce qu'il ne tombe pas sur le sol.
- N'ouvrez pas le bouton d'urgence.
- Il est interdit de modifier l'appareil, de le démonter et de le réparer soi-même. Les réparations doivent être uniquement effectuées par des personnes agréées.
- Pour éviter un dysfonctionnement de l'appareil, ne l'exposez pas à des températures extrêmes, à l'humidité, à la poussière et aux rayons du soleil.

- Veuillez respecter les conditions de fonctionnement et de stockage indiquées dans la section « Caractéristiques techniques ». Le stockage ou l'utilisation à une température ou à une humidité hors des plages prescrites peut influencer la précision des mesures du capteur ainsi que le fonctionnement de l'appareil.

### Indications pour l'élimination

Pour la protection de l'environnement, ne jetez pas les piles usagées avec vos ordures ménagères. Reportez-vous aux réglementations en vigueur sur l'élimination des déchets ou utilisez les centres de collecte publics.



Ce produit répond à la directive européenne 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques et porte le marquage correspondant. N'éliminez jamais les appareils électroniques avec les déchets ménagers. Veuillez vous informer sur les réglementations locales relatives à l'élimination des produits électriques et électroniques. Les conditions correctes d'élimination visent à protéger l'environnement et la santé.

### Légendes

- Veuillez consulter le mode d'emploi
- Mise en garde
- Seuils de température
- Limite de l'humidité de l'air
- Stockage au sec
- Indications pour l'élimination des cartons
- Symbole pour identifier les appareils électriques et électroniques
- Veuillez éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement
- Veuillez éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement
- Code de lot
- Marquage selon la directive 2011/65/UE sur les dispositifs médicaux
- Veuillez éliminer l'emballage dans le respect de l'environnement
- IP68** Protection contre les effets d'une immersion temporaire

### Conditions de garantie

Cher client, chère cliente, vous avez choisi un produit HARTMANN de qualité. Nous vous remercions d'avoir acheté ce produit. Pour assurer la qualité HARTMANN, chaque produit a été testé avant la livraison pour son bon fonctionnement et a été livré sans défaut reconnaissable lors du test. Néanmoins, en cas de survenu d'un dommage, veuillez suivre les dispositions suivantes :

### Garantie

La garantie est valable pendant 2 ans à compter de la date d'achat figurant sur la preuve d'achat.

### Contenu de l'emballage et preuve d'achat

Veuillez placer le produit avec tous les composants du contenu de l'emballage ainsi que votre preuve d'achat originale lors de la réclamation de la garantie légale ou de la garantie du produit et le rapporter où vous l'avez acheté. La suite de la pratique sera ensuite prise en charge. Ou veuillez envoyer le produit accompagné d'une copie de la preuve d'achat, de votre adresse et de votre numéro de téléphone, et de votre adresse courriel (le cas échéant) ainsi que de la description du défaut à l'adresse du service correspondant à votre pays.

### Durée de garantie

La durée de garantie légale n'est pas limitée par cette garantie. La durée de garantie est prolongée lorsqu'une disposition légale le prévoit. Dans les pays où la durée de garantie et / ou un inventaire des pièces de rechange et / ou une indemnisation sont prévus par la loi en matière de garantie obligatoire, les dispositions légales en vigueur sont applicables.

### Coordonnées du service clientèle

France :  
Lab. PAUL HARTMANN S.a.r.l.  
S.A.V. Autotensiomètres  
Route de Sélestat  
Châtenois  
67607 Sélestat Cedex  
☎ 03.88.82.44.36

Belgique :  
N.V. PAUL HARTMANN S.A.  
Avenue Paul Hartmann, 1  
1480 Saintes / Sint-Renelde  
☎ 02.391.44.44

Suisse :  
IVF HARTMANN AG  
Victor-von-Bruns-Strasse 28  
8212 Neuhausen  
☎ +41 52 674 31 11  
Du lundi au vendredi de 7h30 à 17h00  
info@ivf.hartmann.info  
www.veroval.ch

Date de dernière révision du mode d'emploi : juin 2017

### Données techniques

Pile : 1 pile au lithium CR2032 3 V  
Fréquence radio : 869,2375 MHz  
Portée radio : > 400 m dans un espace ouvert  
Conditions d'utilisation / de stockage :  
– Température ambiante : de -10 °C à +45 °C  
– Humidité de l'air : jusqu'à 85 %, sans condensation  
Dimensions : 48 x 36 x 13,5 mm

Fabricant :  
Climax Deutschland GmbH  
Max-Planck-Straße 10  
50858 Köln

Distributeur :  
France :  
Lab. PAUL HARTMANN S.à.r.l.  
Châtenois – 67607 Sélestat CEDEX

Belgique :  
N.V. PAUL HARTMANN S.A.  
1480 Saintes/Sint-Renelde  
info@be.hartmann.info

Suisse :  
IVF HARTMANN AG  
8212 Neuhausen  
info@ivf.hartmann.info