

Preobčutljivost na gluten

Hitri test za potrditev celiakije

10 min



Natančnost
98 %



Pogosta težava za želodec in črevesje: beljakovina gluten

Pogoste nejasne težave s prebavo – kot npr. napenjanje ali tudi driska – lahko nastanejo zaradi preobčutljivosti na gluten, beljakovine, ki jo najdemo v številnih živilih. Dodatni znaki preobčutljivosti na gluten, ki se imenuje celiakija, so lahko opazna izguba teže, znaki pomanjkanja ali kožne bolezni.

Spoznajte vzrok svojih težav: hitri test za preobčutljivost na gluten

S hitrim testom za preobčutljivost na gluten Veroval® lahko hitro in zagotovo ugotovite, ali je vzrok vaših težav preobčutljivost na gluten. Če je res tako, se lahko posvetujete z zdravnikom, ali bi bila brezglutenska dieta smiselna rešitev.

Kako zanesljiv je test Veroval®?

Hitri test za preobčutljivost na gluten smo razvili z namenom, da zagotovimo natančnost in gotovost moderne diagnostike tudi na domu. Temelji na ugotavljanju prisotnosti protiteles proti transglutaminazi (protitelesa IgA), ki kažejo na preobčutljivost na gluten. Ta test je primeren tako za postavljanje prve diagnoze, kakor tudi za ocenjevanje učinkovitosti terapije.

Pri brezglutenskem prehranjevanju protitelesa proti tTG-IgA začnejo izginjati v nekaj tednih. Po 6 mesecih ni več mogoče potrditi prisotnosti protiteles.

Z raziskavo za oceno učinkovitosti je bila dokazana več kot 98 % natančnost.

Ali je izvedba testa zapletena?

Ne: vse kar potrebujete, so čiste roke, ura in ravna površina mize. Natančen potek testa najdete na zadnji strani. Da bi vedeli, kako odčitati in si razlagati rezultat, morate temeljito prebrati navodila za uporabo. Preden izvedete test, morate razumeti vse podrobnosti.

Pomembne informacije:

Do pozitivnih rezultatov testa lahko pride tudi zaradi nenevarnih vzrokov – po drugi strani pa negativni rezultati ne pomenijo, da je vse v redu. Dokončno diagnozo naj postavi zdravnik.

* Lažni negativni rezultat = napačno je prikazan negativen rezultat testa, čeprav je rezultat dejansko pozitiven.

www.veroval.si

Materiali

- 1 testna kasetta v zaščitni foliji
- 1 pipeta
- 1 posoda s puifrom za redčenje vzorca
- 2 pripomočka za samodejno zbadanje (1 rezervni) s sterilno lanceto za odvzem vzorca krvi



STERILE R CE 0120

- 1 steklena kapilarna cevka v zaščitnem vsebniku
- 1 alkoholna blazinica



- 1 obliž



- 1 navodila za uporabo

Razlaga simbolov

Upoštevajte navodila za uporabo	Diagnostika in vitro (Samo za zunanjo uporabo)	Uporabno do (glejte odtis na embalaži)
Hranite na suhem mestu pri 10 °C – 27 °C. Ne zamrzujte.	Vsebina zadostuje za 1 testiranje	Samo za enkratno uporabo
Proizvajalec	Sterilizacija z obsevanjem	Oznaka kompleta (glejte odtis na embalaži)
Reakcijski čas v testni kaseti	Hitri test za samotestiranje	

NanoRepro AG
Untergasse 8
D-35037 Marburg



Distribucija:
SI – PAUL HARTMANN Adriatic d.o.o.
Letališka cesta 3c
1000 Ljubljana
info@si.hartmann.info

Navodila za uporabo v slovenskem jeziku
Pregledano novembra 2015 (Razl.00)

Veroval[®]

TEST ZA SAMOTESTIRANJE



Preobčutljivost na gluten

Hitri test za samotestiranje

Test izvedete na spodnji način:

- 1** • Komponente testa položite na mizo pred seboj. Zaščitne folije še ne odprite.




- (1) posoda s pufrom za redčenje vzorca
(2) alkoholna blazinica
(3) pripomoček za samodejno zbadanje
(4) steklena kapilarna cevka v zaščitnem vsebniku
(5) testna kasetna v zaščitni foliji
(6) pipeta
(7) obliž

Priprava

- Testna kasetna in pufer za redčenje vzorca morata imeti pred začetkom testa sobno temperaturo (od 15 °C do 27 °C). Odprite posodo s pufrom za redčenje vzorca tako, da snamete pokrovček in vsebnik položite pokonci na mizo.




- 3**
- Odprite zaščitni vsebnik (4) in previdno odstranite stekleno kapilarno cevko.
 - Iz konice prsta iztisnite kapljico krvi.

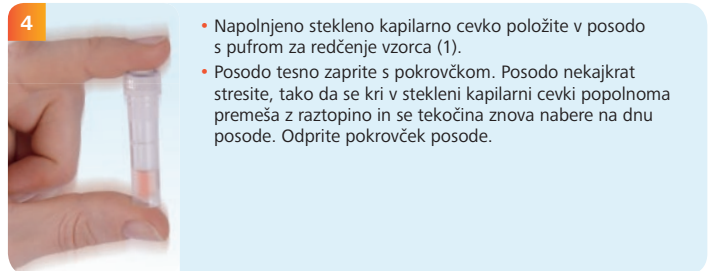

- 4**
- Napolnjeno stekleno kapilarno cevko položite v posodo s pufrom za redčenje vzorca (1).
 - Posodo tesno zaprite s pokrovčkom. Posodo nekajkrat stresite, tako da se kri v stekleni kapilarni cevki popolnoma premeša z raztopino in se tekočina znova nabere na dnu posode. Odprite pokrovček posode.



- Siv pokrovček pripomočka za samodejno zbadanje (3) odvijajte, dokler se ne zrahlja. Nato ga obrnite še dvakrat.
- Konico kazalca zmasirajte in očistite z alkoholno blazinico (2). Počakajte, da se prst posuši.
- Pripomoček za zbadanje pritisnite z okroglo odprtino na stranski del čiste konice prsta (a) in pritisnite na sprožilno (b).

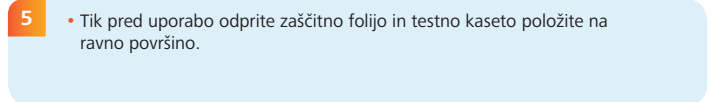


- 5** • Tik pred uporabo odprite zaščitno folijo in testno kaseto položite na ravno površino.



- 6**
- S pipeto (6) odzimate nekaj kapljic razredčenega vzorca.
 - Iz napolnjene pipete (6) kapnite 5 kapljic na okroglo polje uporabe (5) na testni kaseti (5). **Prosimo, pazite, da okence za rezultat (T) ali (C) ne pride v stik s tekočino.** Ko nanesete kapljice, se ne dotikajte in ne premikajte testne kasete.
 - **Rezultat lahko odčitate 10 minut po tem, ko dodate 5 kapljic.**

Za oceno rezultata najprej preverite, ali je v testnem okencu pod (C) vidna črta. Ni pomembno, kako močno ali rahlo je izražena kontrolna črta


Pozitiven rezultat

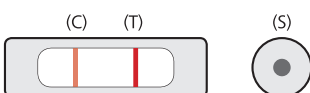

Rezultat testa je **pozitiven**, če se v **kontrolnem okencu** prikaže svetlo do temno rdeča črta (C) in je tudi v **testnem okencu (T)** moč videti svetlo ali temno rdečo črto.

Test kaže, da je bila v vašem krvnem vzorcu dokazana prisotnost protiteles IgA, ki so povezana s preobčutljivostjo na gluten. Potrditev teh protiteles kaže na večjo verjetnost preobčutljivosti na gluten. Da bi dobili dokončno diagnozo, morate obiskati zdravnika.


Negativen rezultat

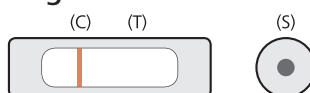

Rezultat testa je **negativen**, če se v **kontrolnem okencu** prikaže svetlo do temno rdeča črta (C) in v **testnem okencu (T)** ni mogoče videti svetlo ali temno rdeče črte.

Test kaže, da v krvnem vzorcu ni ugotovljenih protiteles IgA, ki kažejo na preobčutljivost na gluten. Preobčutljivost na gluten se zato lahko skoraj povsem izključi. Če vaše prebavne težave ali drugi simptomi ne izginejo, morate pri zdravniku dobiti dodatno diagnostično pojasnitev.

Neveljaven rezultat

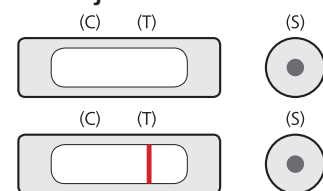

Če **kontrolne črte (C) ne morete videti ali je vidna samo ena testna črta (T)**, testa niste izvedli pravilno in ni veljaven.

Preverite, ali ste natančno izvedli vse točke v navodilih za uporabo. Izvedite nov test z novim krvnim vzorcem.