

# Veroval®




# Veroval®




**Il contenuto di questo video può anche essere scaricato in formato pdf.**

# Veroval®

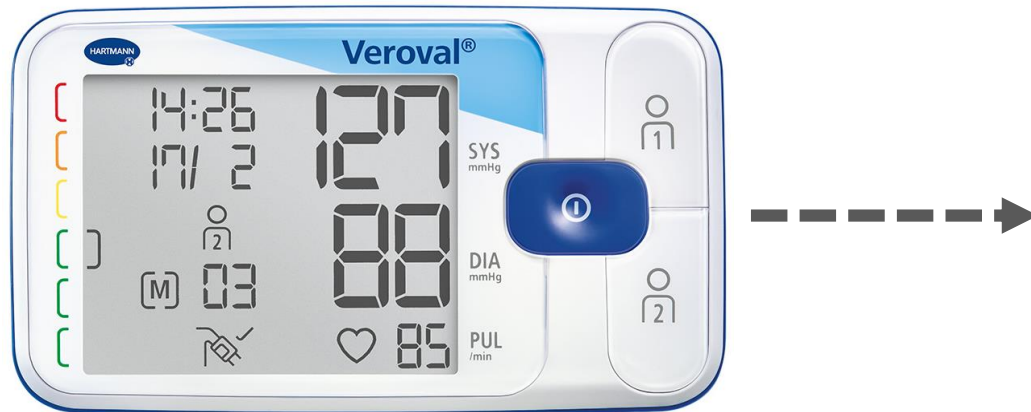

**In questo breve video viene spiegato come i dati del vostro dispositivo Veroval® misuratore di pressione da braccio...**

# Veroval®

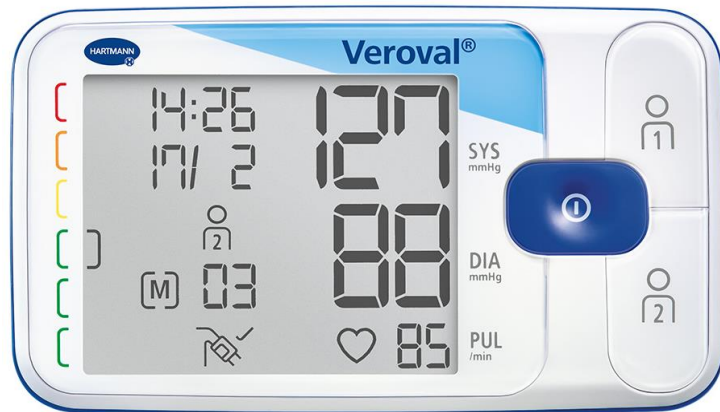

**...possono essere facilmente trasferiti nel software Veroval®  
medi.connect.**

# Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi, and the HARTMANN logo is visible. The navigation menu includes: Panoramica, Pressione arteriosa, ECG, Peso, Temperatura, Self-test, and Impostazioni. Below the menu, there are tabs for 'ultima misurazione', 'ultima settimana', and 'Ultimo Mese'. The main content area is divided into several panels:

- Pressione arteriosa:** A circular gauge showing Systole, Diastole, and Polso.
- Peso:** A circular gauge showing weight in Kg and BMI.
- Temperatura:** A circular gauge showing temperature with input fields for 'mattina', 'a mezzogiorno', and 'sera'.
- Self-test:** A table with columns for Test, Data, Risultato, and prossimo test. The table contains data for Colesterolo, Intestino, and Stomaco.
- ECG:** A panel with buttons for OK, SLOW, FAST, ERROR, PAUSE, RHYTHM, and WAVE. A link below reads 'Visualizzare valutazione dettagliata'.

Per prima cosa occorre aprire Veroval® medi.connect sul PC...

Veroval® medi.connect

Mario Rossi

HARTMANN

Panoramica Pressione arteriosa ECG Peso Temperatura Self-test Impostazioni

ultima misurazione ultima settimana Ultimo Mese

Pressione arteriosa

Sistole Diastole

Polso

Peso

Kg

BMI

Temperatura

mattina a mezzogiorno sera

... cliccare su «Impostazioni»...

# Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web application interface. At the top, the user is identified as Mario Rossi. The main navigation bar includes tabs for 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', 'Self-test', and 'Impostazioni'. Below this, a secondary navigation bar shows 'Il mio profilo', 'Sistema', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', and 'Promemoria'. The 'Il mio profilo' section is active, showing a form with the following fields:

|                   |   |            |                                 |
|-------------------|---|------------|---------------------------------|
| Sesso *           | <input type="radio"/> uomo <input checked="" type="radio"/> donna                           | Via        | <input type="text"/>            |
| Nome *            | <input type="text" value="Mario"/>  | CAP        | <input type="text"/>            |
| Cognome *         | <input type="text" value="Rossi"/>  | Città      | <input type="text"/>            |
| Data di nascita * | <input type="text" value="01/01/1980"/> <input type="text" value="15"/>                     | Età (anni) | <input type="text" value="37"/> |
| Altezza *         | <input type="text" value="190"/>  | Centimetri |                                 |
| Password          | <input type="text" value="Protezione con password non impostata"/> <input type="checkbox"/> |            |                                 |

...e nella riga sottostante selezionare «Pressione arteriosa».




The screenshot shows the 'Impostazioni' (Settings) page for 'Pressione arteriosa' (Blood Pressure) in the Veroval® medi.connect application. The user is identified as Valentina Tintori (M1 M2) and the HARTMANN logo is visible in the top right corner. The navigation bar includes 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', 'Self-test', and 'Impostazioni'. The sub-navigation bar shows 'Il mio profilo', 'Sistema', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', and 'Promemoria'. The main content area is titled 'Pressione arteriosa' and contains two sections: 'Intervalli di tempo' (Time Intervals) and 'Selezione del dispositivo' (Device Selection). The 'Intervalli di tempo' section features a timeline from (00:00) to (23:59) with two active measurement periods: 'mattina (05:00 - 08:58)' and 'sera (18:00 - 19:58)'. The 'Selezione del dispositivo' section lists three devices with checkboxes and dropdown menus for memory selection: 'Tensoval Duo Control' (selected, dropdown: '1. Memoria utente del dispositivo'), 'Veroval misuratore di pressione da braccio' (selected, dropdown: '2. Memoria utente del dispositivo'), and 'Veroval misuratore di pressione da polso' (selected, dropdown: '1. Memoria utente del dispositivo'). At the bottom, there are three buttons: 'Salva', 'Azzera', and 'Ripristina'.

**A questo punto nelle impostazioni della «Pressione arteriosa» ...**



# Veroval®

Selezione del dispositivo




|                                     |   |  |                                   |                                  |
|-------------------------------------|---|--|-----------------------------------|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Tensoval Duo Control                       | 1. Memoria utente del dispositivo | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Veroval misuratore di pressione da braccio | 2. Memoria utente del dispositivo | <input type="radio"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Veroval misuratore di pressione da polso   | 1. Memoria utente del dispositivo | <input type="radio"/>            |

Salva    Azzera    Ripristina

**...mettere il flag sul dispositivo scelto Veroval® misuratore di pressione da braccio...**

# Veroval®

Selezione del dispositivo

|                                     |   |  |  |                                  |
|-------------------------------------|---|--|--|----------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Tensoval Duo Control                       | 1. Memoria utente del dispositivo                                      | <input checked="" type="radio"/> |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Veroval misuratore di pressione da braccio | 2. Memoria utente del dispositivo                                      | <input type="radio"/>            |
| <input checked="" type="checkbox"/> |  | Veroval misuratore di pressione da polso   | 1. Memoria utente del dispositivo<br>2. Memoria utente del dispositivo | <input type="radio"/>            |

Salva   Azzera   Ripristina


**...selezionare la memoria utente desiderata e salvare.  
Questo passaggio deve essere eseguito solo una volta!**

# Veroval®

The screenshot displays the Veroval® medi.connect web interface. At the top left, the logo 'Veroval® medi.connect' is shown with a colorful bar below it. On the top right, the user's name 'Mario Rossi' is displayed next to a profile icon, and a row of utility icons (printer, envelope, download, PDF, document, info, power) is visible. Below the header is a navigation bar with tabs: 'Panoramica', 'Pressione arteriosa', 'ECG', 'Peso', 'Temperatura', 'Self-test', and 'Impostazioni'. Underneath this, a secondary bar shows filters for 'ultima misurazione', 'ultima', and 'Ultimo Mese'. The main content area is divided into three panels: 'Pressione arteriosa' (with a heart icon and fields for 'Sistole', 'Diastole', and 'Polso'), 'Peso' (with a scale icon and fields for 'Kg' and 'BMI'), and 'Temperatura' (with a thermometer icon and fields for 'mattina' and 'a mezzog'). A black mouse cursor is pointing at the 'Pressione arteriosa' tab in the navigation bar.


**Per il trasferimento dei dati, fai clic su «Pressione arteriosa» nella riga superiore.**

# Veroval®

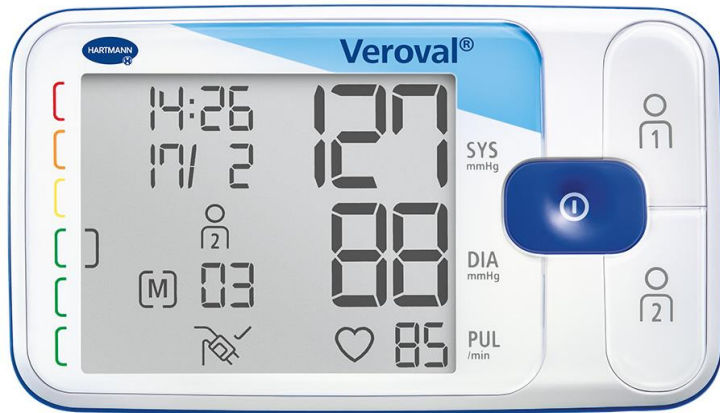


**Ora inserire l'estremità più piccola del cavo USB nella presa sul retro del misuratore di pressione...**

# Veroval®

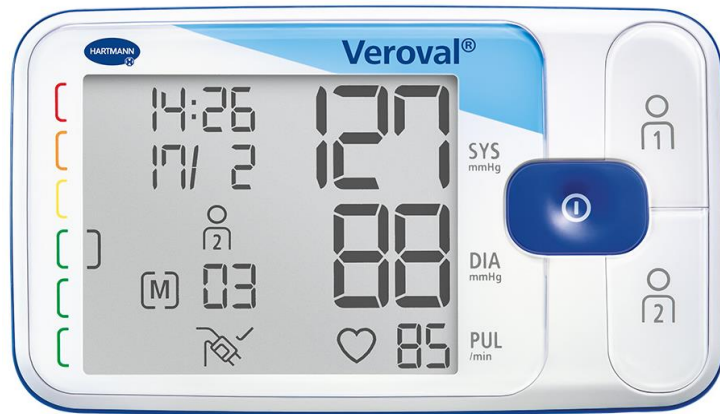


**...e collegare l'estremità più grande al PC.**

# Veroval®

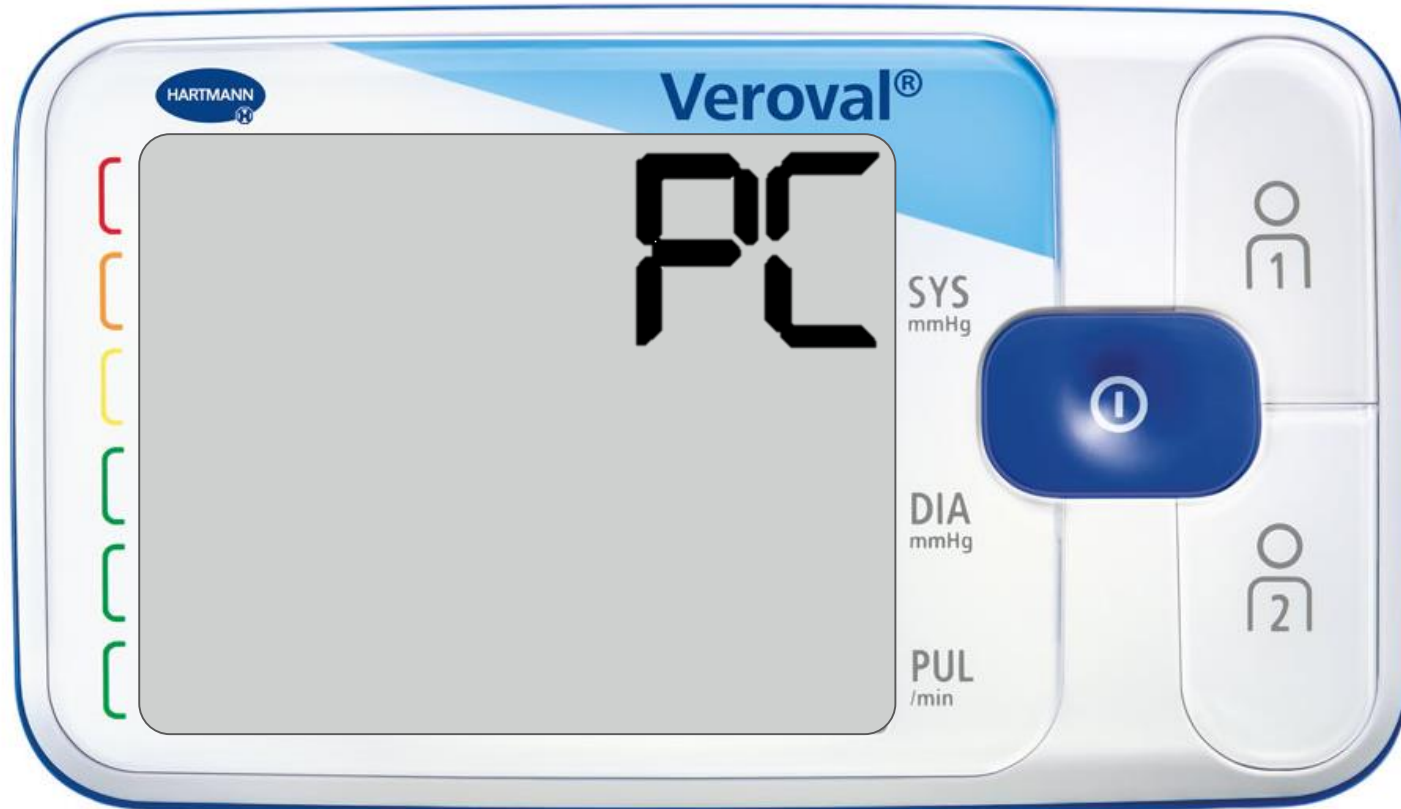


La scritta «PC» appare sul display del misuratore di pressione.

# Veroval®

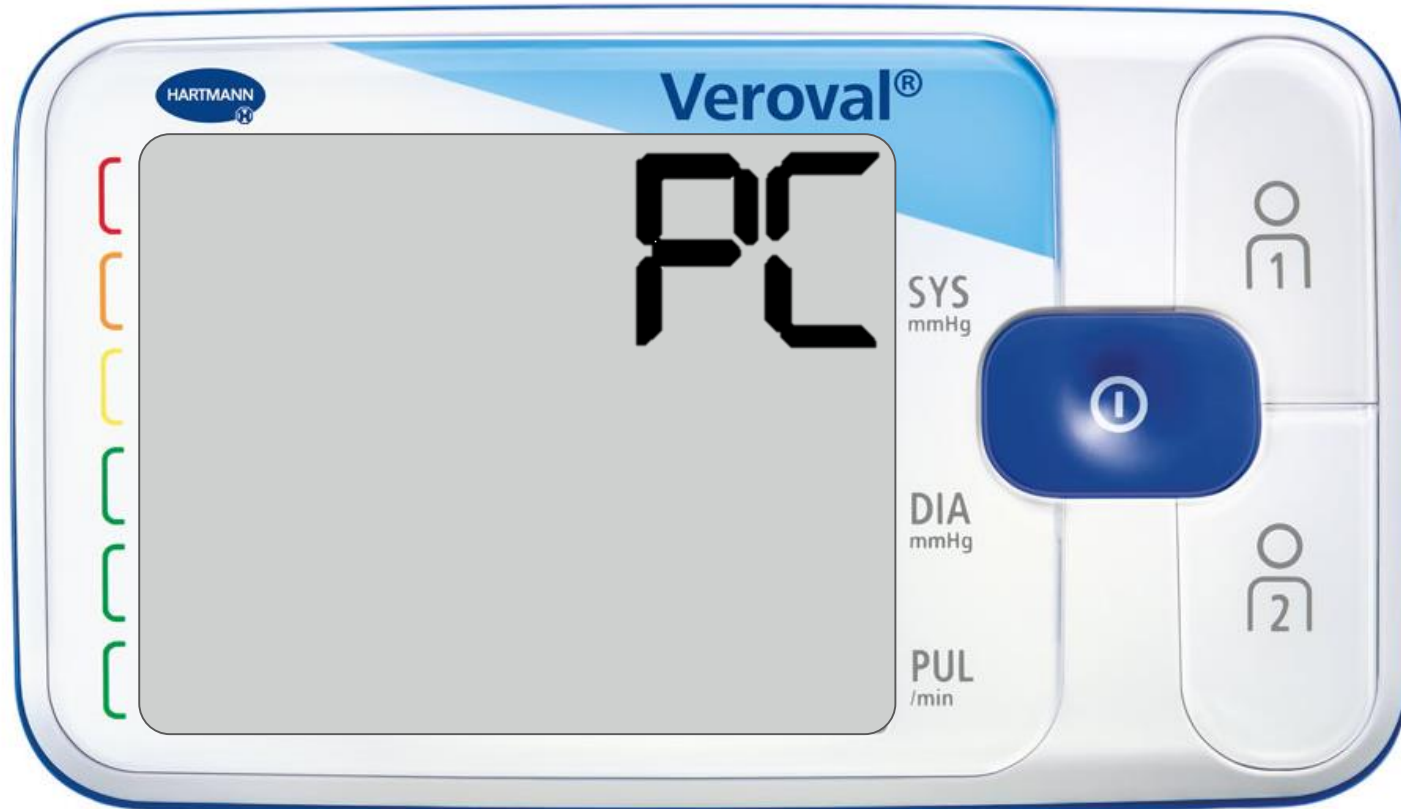

**Si dispone ora di 30 secondi per la trasmissione dei dati, altrimenti il dispositivo passa in modalità standby.**


# Veroval®

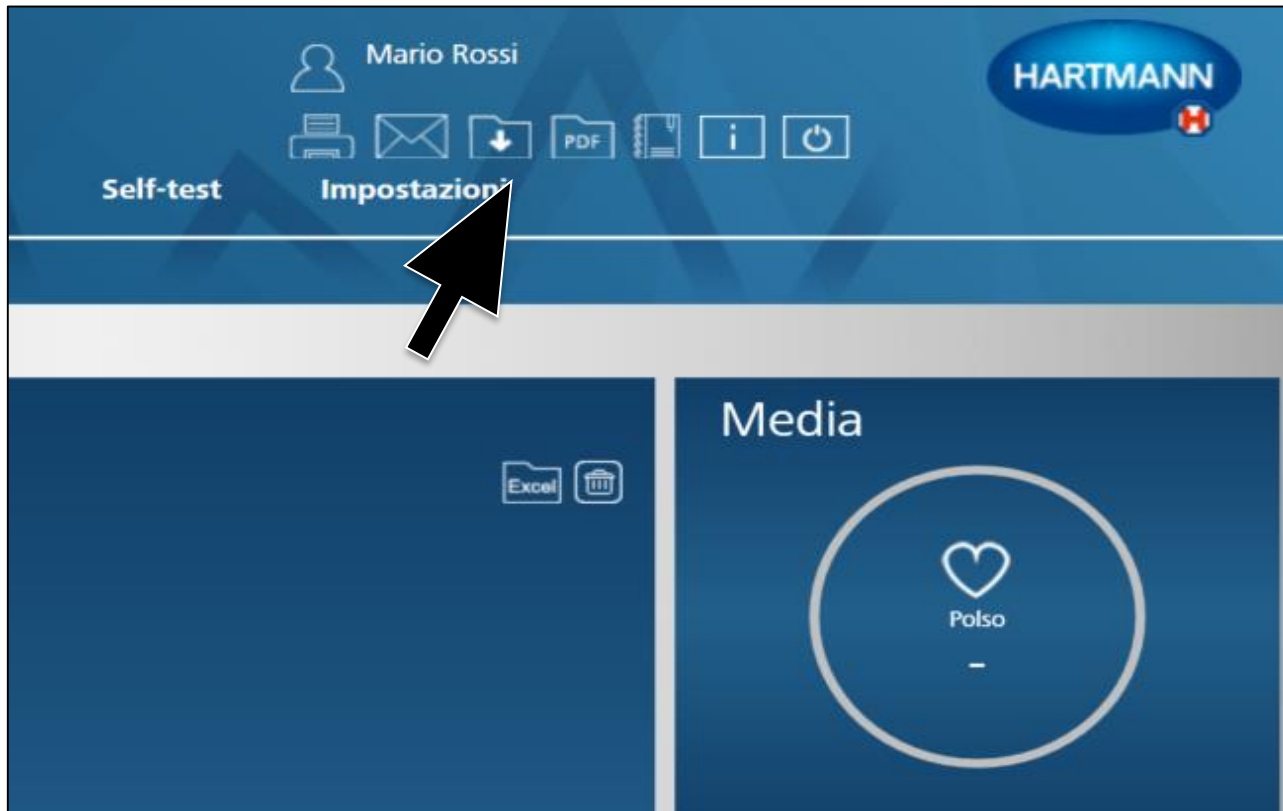

**Cliccare sull'icona «trasferimento dati» in alto a destra.**




# Veroval®

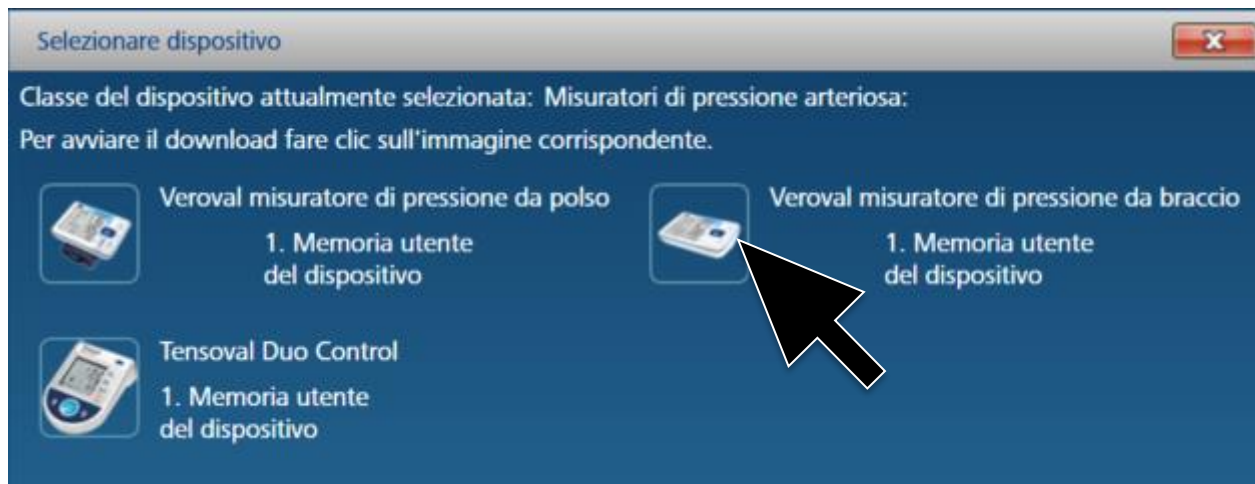


**Selezionare il dispositivo scelto Veroval® misuratore di pressione da braccio.**

# Veroval®

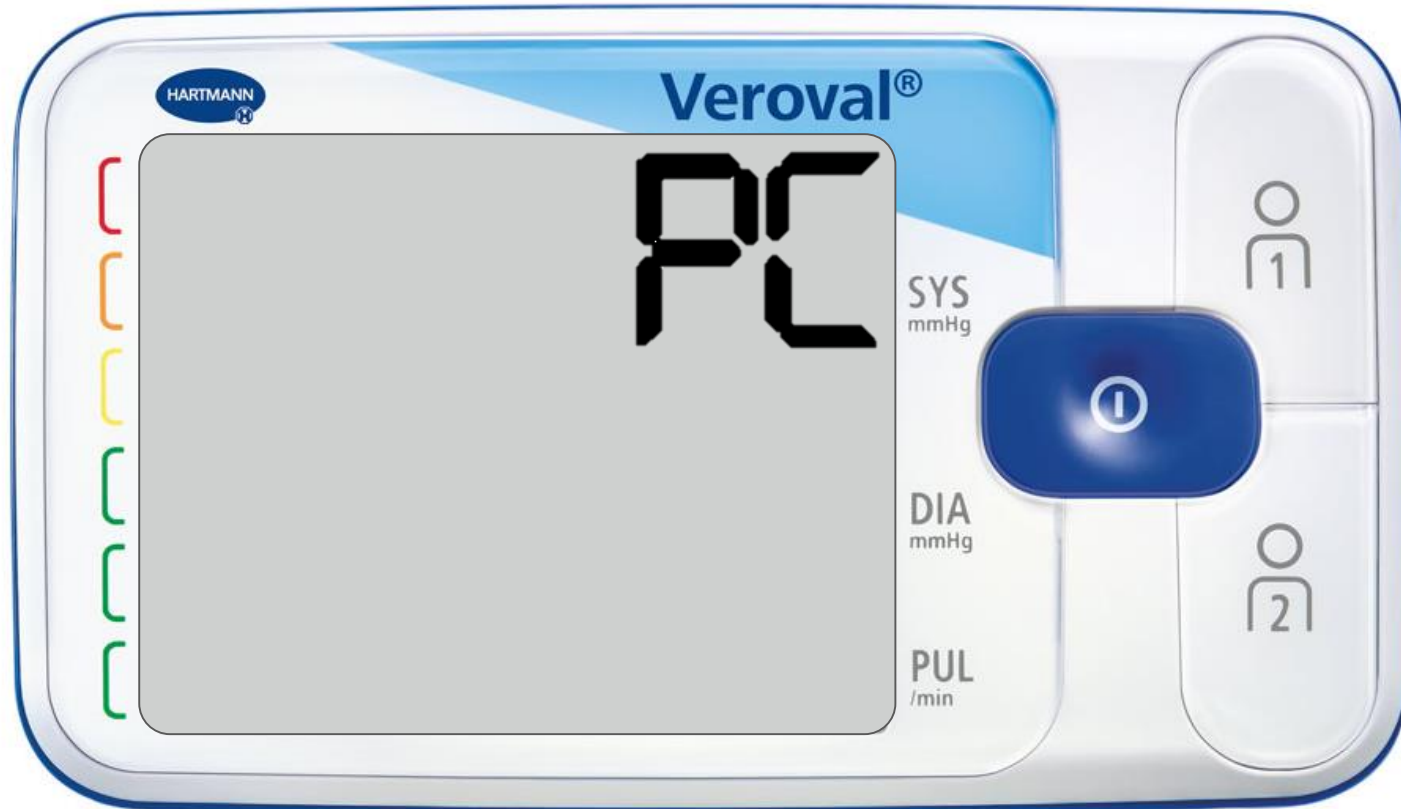


**Se i dati non vengono trasferiti, dopo 30 secondi si attiva la modalità stand-by.**

# Veroval®

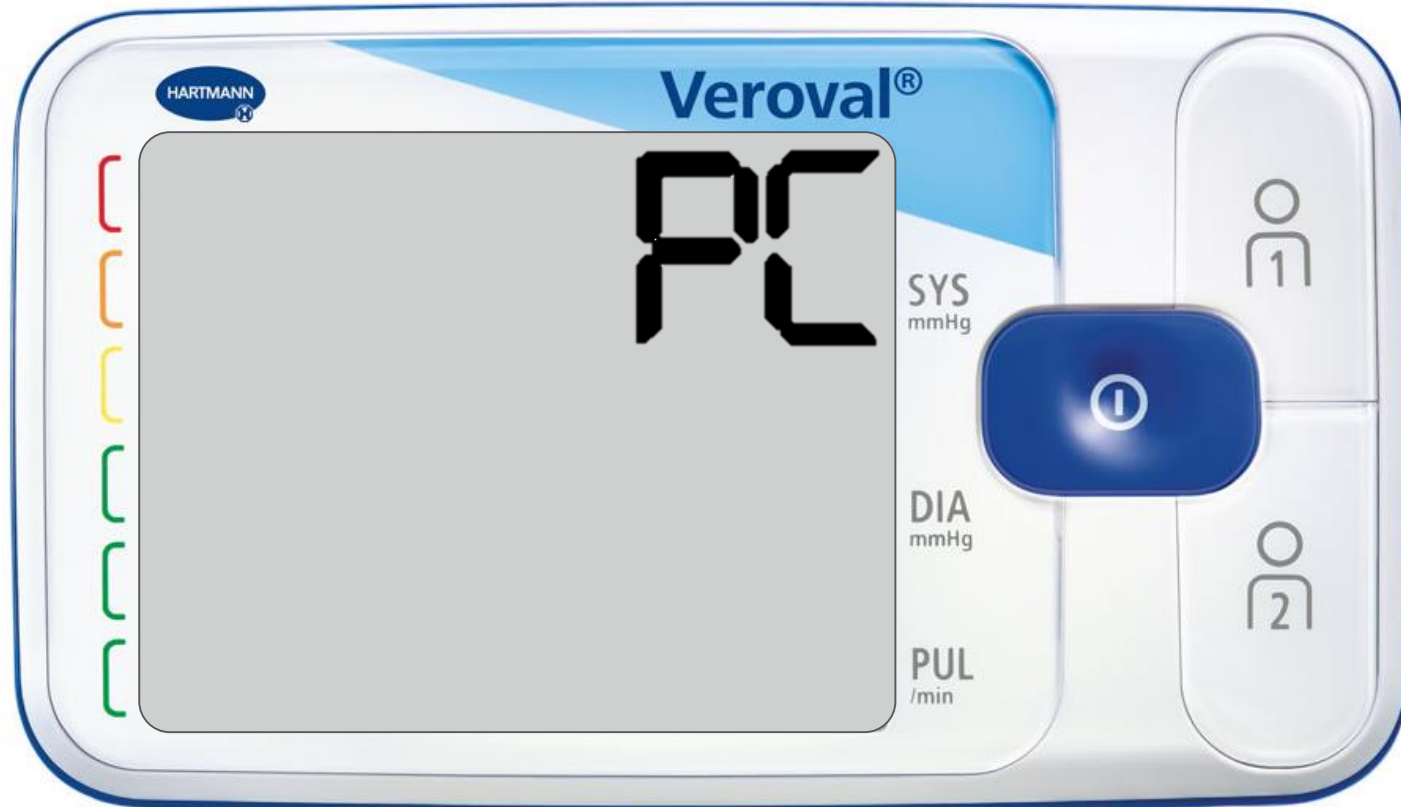


**In questo caso, collegare nuovamente il dispositivo.**

# Veroval®

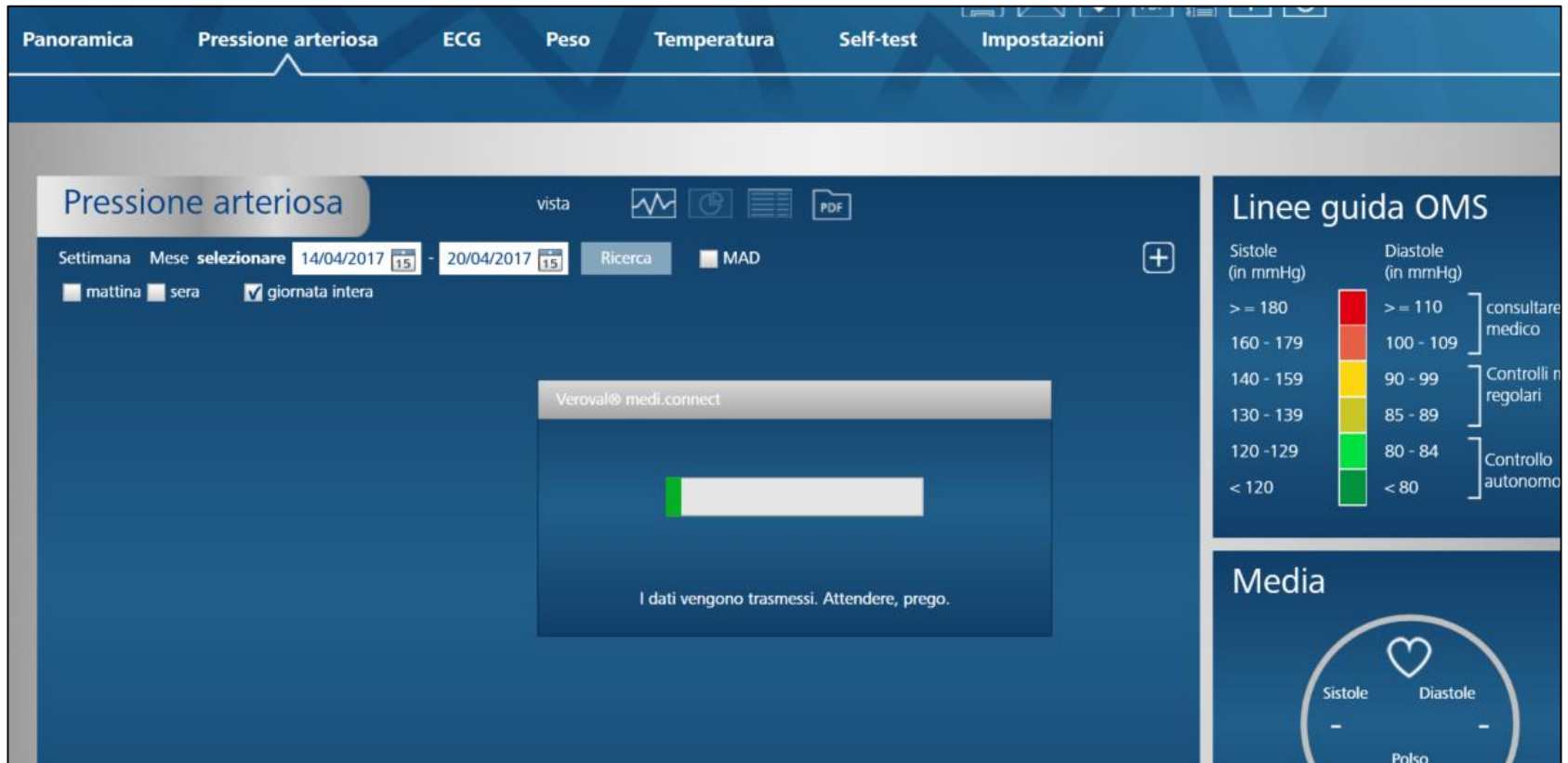

**Inizia così il trasferimento dati.**

# Veroval®

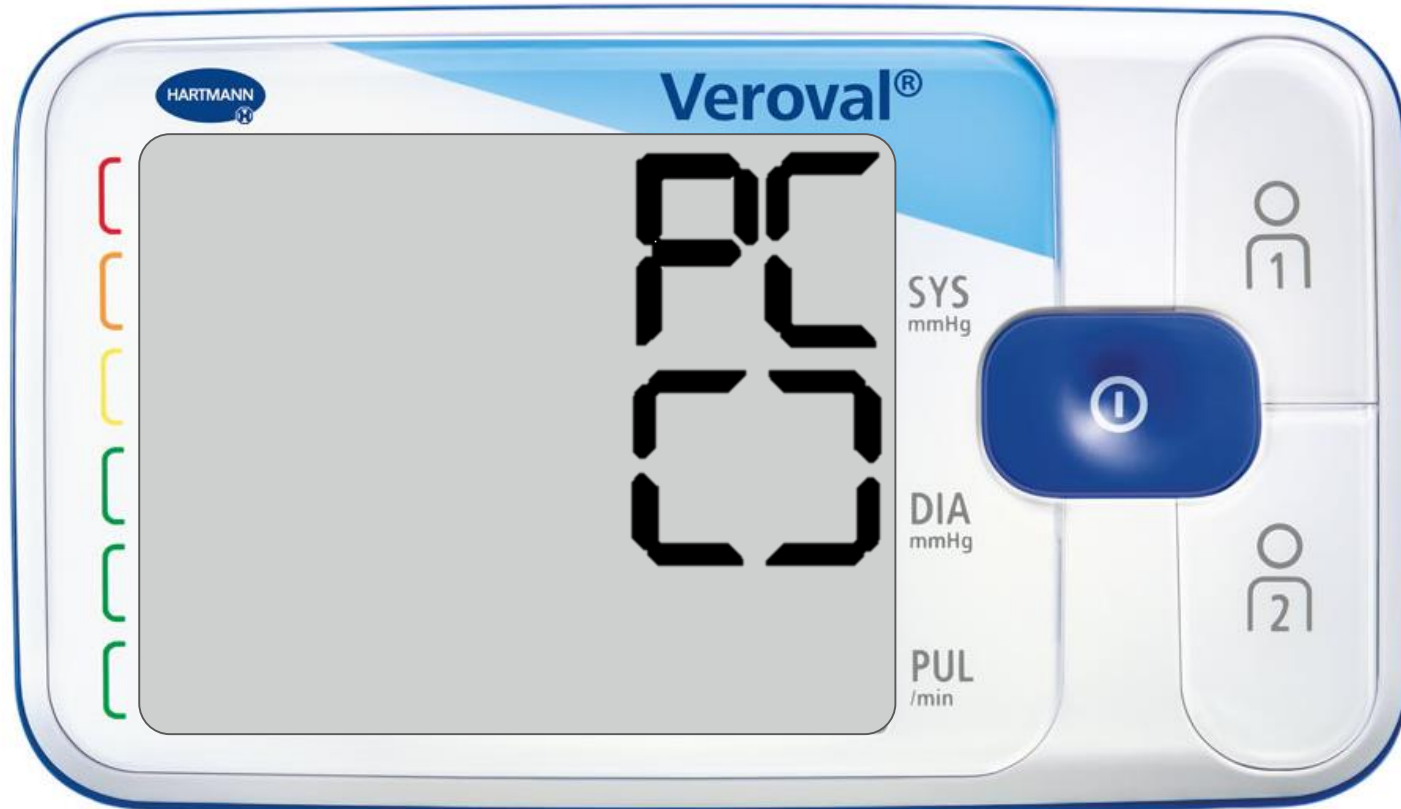

**Se il trasferimento avviene con successo sullo schermo appaiono due parentesi quadre.**

# Veroval®

Pressione arteriosa

vista

Settimana Mese **selezionare** 14/04/2017 15 - 20/04/2017 15 Ricerca MAD

mattina  sera  giornata intera

Trasmissione dei dati dell'intera memoria utente su questo dispositivo

Il dispositivo ha trasmesso i seguenti dati:

| Memoria utente del dispositivo | utente | Numero complessivo delle misurazioni inviate: | Doppioni | Nuove misurazioni | Dettagli |
|--------------------------------|--------|---|----------|-------------------|----------|
| <input type="checkbox"/>       | 2      | Valentina Tintori                             | 12       | 12                | 0        |

Premendo il pulsante Salva, vengono memorizzati tutti gli utenti selezionati.

Salva Annulla

Linee guida OMS

Sistole (in mmHg)

Diastole (in mmHg)

> = 180

> = 110

100 - 109

90 - 99

85 - 89

80 - 84

< 80

consultare un medico

Controlli medici regolari


Controllo autonomo

dia


Sistole Diastole

Dopo il trasferimento, è possibile scegliere quali valori si desidera salvare...

# Veroval®

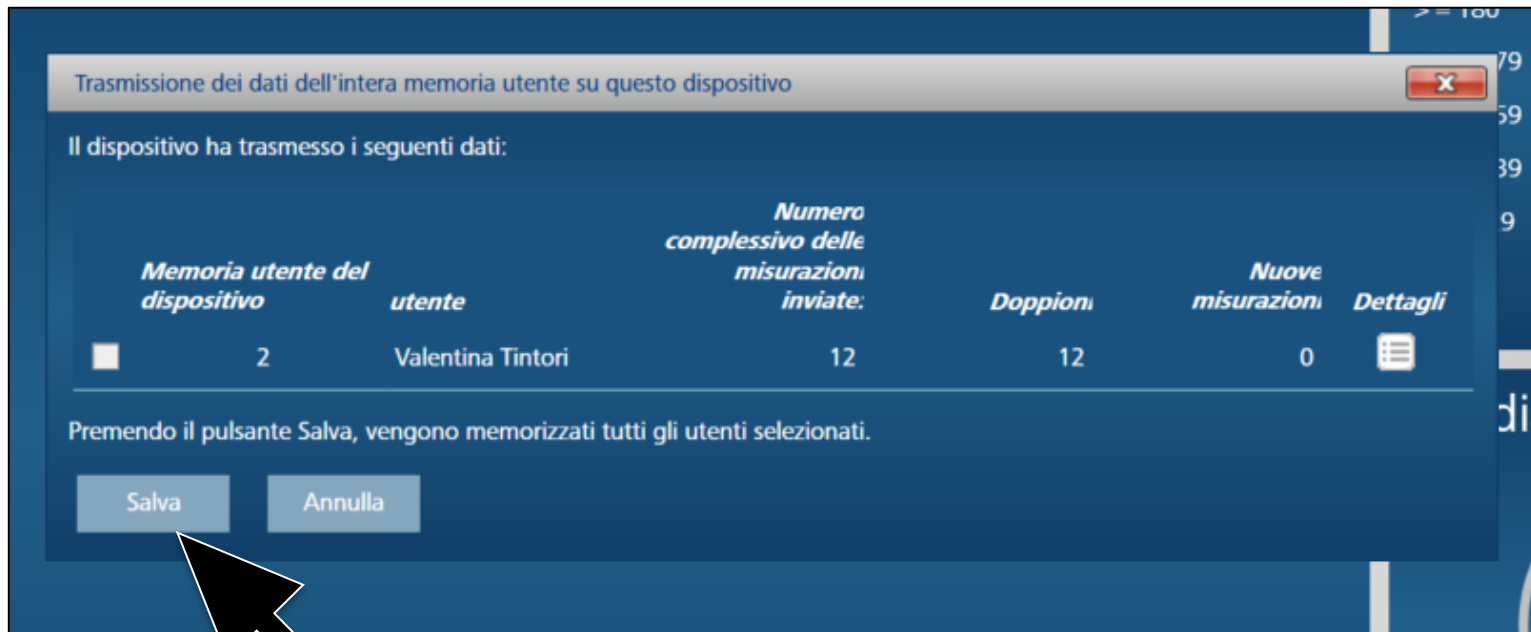

...e fare clic su «salva».

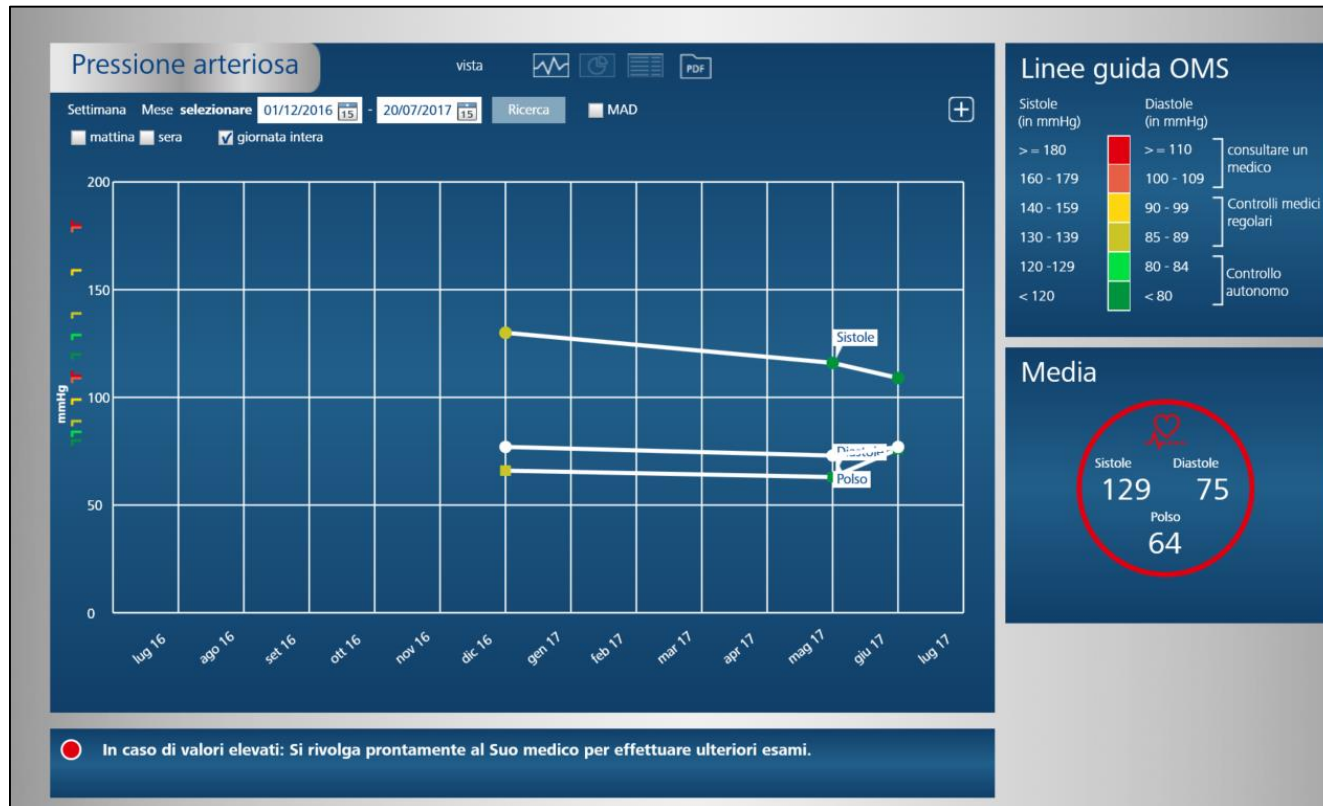











Ora è possibile visualizzare i dati memorizzati all'interno della scheda «Pressione arteriosa», sotto forma di grafico...


























# Veroval®

Pressione arteriosa

vista    

Settimana Mese selezionare 21/07/2016  - 20/07/2017  Ricerca    

| <input type="checkbox"/> | Data       | Orario | Sistole  | Diastole | Polso | Disturbo del ritmo cardiaco   | Note   |
|--------------------------|------------|--------|--|----------|-------|---|--|
| <input type="checkbox"/> | 08/01/2017 | 23:33  |  130  | 66       | 77    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 30/06/2017 | 21:56  |  116  | 63       | 73    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:14  |  134  | 89       | 85    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:16  |  136  | 87       | 85    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:19  |  131  | 95       | 90    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:22  |  84   | 63       | 72    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:23  |  83   | 62       | 74    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:25  |  111  | 79       | 77    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:26  |  102  | 72       | 74    |   |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 09:29  |  119  | 108      | 77    |  |   |
| <input type="checkbox"/> | 01/07/2017 | 10:35  |  104 | 64       | 74    |   |  |

...o di elenco...

Veroval® medi.connect

PDF

Stampa PDF Nuova selezione Chiudi

**Panoramica delle misurazioni della pressione arteriosa: 21/07/2016 - 20/07/2017**

Sesso **donna** Via  
Nome **Valentina** CAP  
Cognome **Tintori** Città  
Data di nascita **27/09/1983** Età (anni) **33** Altezza **176**  
Servizio online:

**Farmaco**  
Non sono presenti dati.

**Pressione arteriosa**

Numero complessivo delle misurazioni per l'intervallo di tempo selezionato: 14

| Data       | Orario | OMS | Sis. mmHg | Dia. mmHg | Polso/min | Disturbo del ritmo cardiaco | MAD | manuale | avviare analisi | Orario diurno | Farmaco/ commento |
|------------|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------------------------|-----|---------|-----------------|---------------|-------------------|
| 08/01/2017 | 23:33  | ●   | 130       | 66        | 77        |                             | 87  |         | ✓               |               |                   |
| 30/06/2017 | 21:56  | ●   | 116       | 63        | 73        |                             | 81  |         | ✓               |               |                   |
| 01/07/2017 | 09:14  | ●   | 134       | 89        | 85        |                             | 104 |         | ✓               |               |                   |
| 01/07/2017 | 09:16  | ●   | 136       | 87        | 85        |                             | 103 |         | ✓               |               |                   |

...e visualizzare il PDF.

# Veroval®

