




# Veroval<sup>®</sup>medi.connect



## Veroyal® medi.connect: le klik stran od obvladovanja lastnega zdravja

Z Veroyalovimi® napravami je natančno beleženje vitalnih znakov, kot sta krvni tlak ali teža, zelo preprosto. Kako pa lahko te vrednosti enostavno shranite, analizirate, primerjate ali delite z zdravnikom?

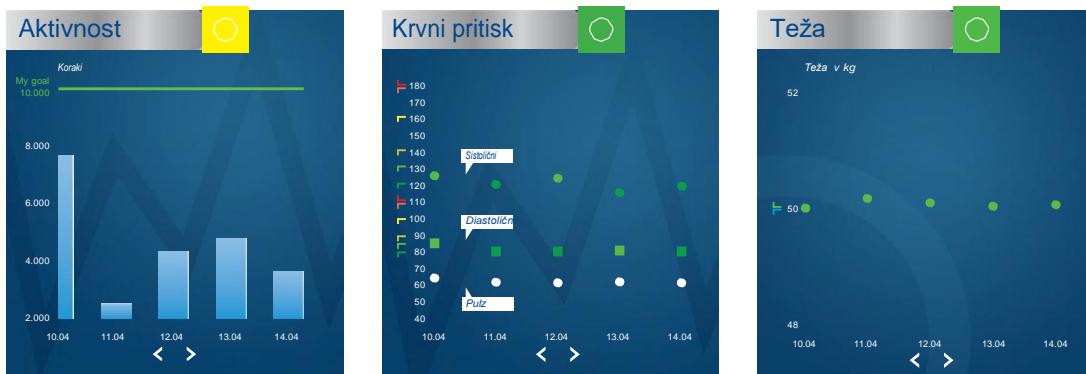

### Programska oprema medi.connect – za prenos podatkov in lokalno upravljanje

Po zaslugi širokega nabora funkcij vam programska oprema Veroyal® medi.connect, ki jo lahko brezplačno prenesete na svoj računalnik, zagotavlja odgovor na vsako vprašanje. Svoje podatke lahko hitro in preprosto prenesete na svoj računalnik preko USB kabla ali USB Bluetooth adapterja (velja za EKG in Duo Control), izberete različna analitična obdobja (dan, teden, mesec) in samodejno ustvarite idealno pripravljene slike svojih vrednosti. Hkrati vam programska oprema pomaga pravilno oceniti izmerjene vrednosti in jih primerjati s podatki z različnih naprav. Vse rezultate lahko le z nekaj kliki natisnete ali pošljete svojemu zdravniku prek elektronske pošte.

### Spletna aplikacija medi.connect – za upravljanje podatkov kjer koli in kadar koli

Poleg uporabe programske opreme imate tudi možnost spletnega upravljanja svojih vitalnih podatkov. Če želite to narediti, izberite prijavo medi.connect na spletu in se registrirajte. Z uporabo spletne aplikacije lahko vnesete svoje vrednosti ročno ali pa jih sinhronizirate s programsko opremo Veroyal® na svojem računalniku.

Prednost spletne aplikacije: z napravo, združljivo z internetom, lahko do svojih vitalnih podatkov dostopate kjer koli in kadar koli.

### Aplikacija za pametne telefone medi.connect – za upravljanje podatkov z Veroyalovega® sledilnika aktivnosti


Vrednosti z Veroyalovega® sledilnika aktivnosti lahko preprosto upravljate prek aplikacije za pametne telefone medi.connect (Apple App Store ali Google Play Store). Z aplikacijo lahko nastavite različne nastavitve sledilnika aktivnosti. Če želite, lahko podatke z vaše aplikacije za pametne telefone sinhronizirate s spletno aplikacijo in potem dostopate do njih prek spleta.

# Veroval® medi.connect: Pregled načinov povezovanja Verovalovih® naprav

## Programska oprema

- ✓ Prenos podatkov z vseh naprav prek USB/USB-Bluetooth adapterja
- ✓ Preprosta, profesionalna in omrežena dokumentacija
- ✓ Različne možnosti za prikazovanje in kombiniranje rezultatov
- ✓ Prenos podatkov prek tiskanja dokumenta PDF ali e-pošte

Pri uporabi merilnikov krvnega pritiska nadomesti dnevnik meritev krvnega pritiska

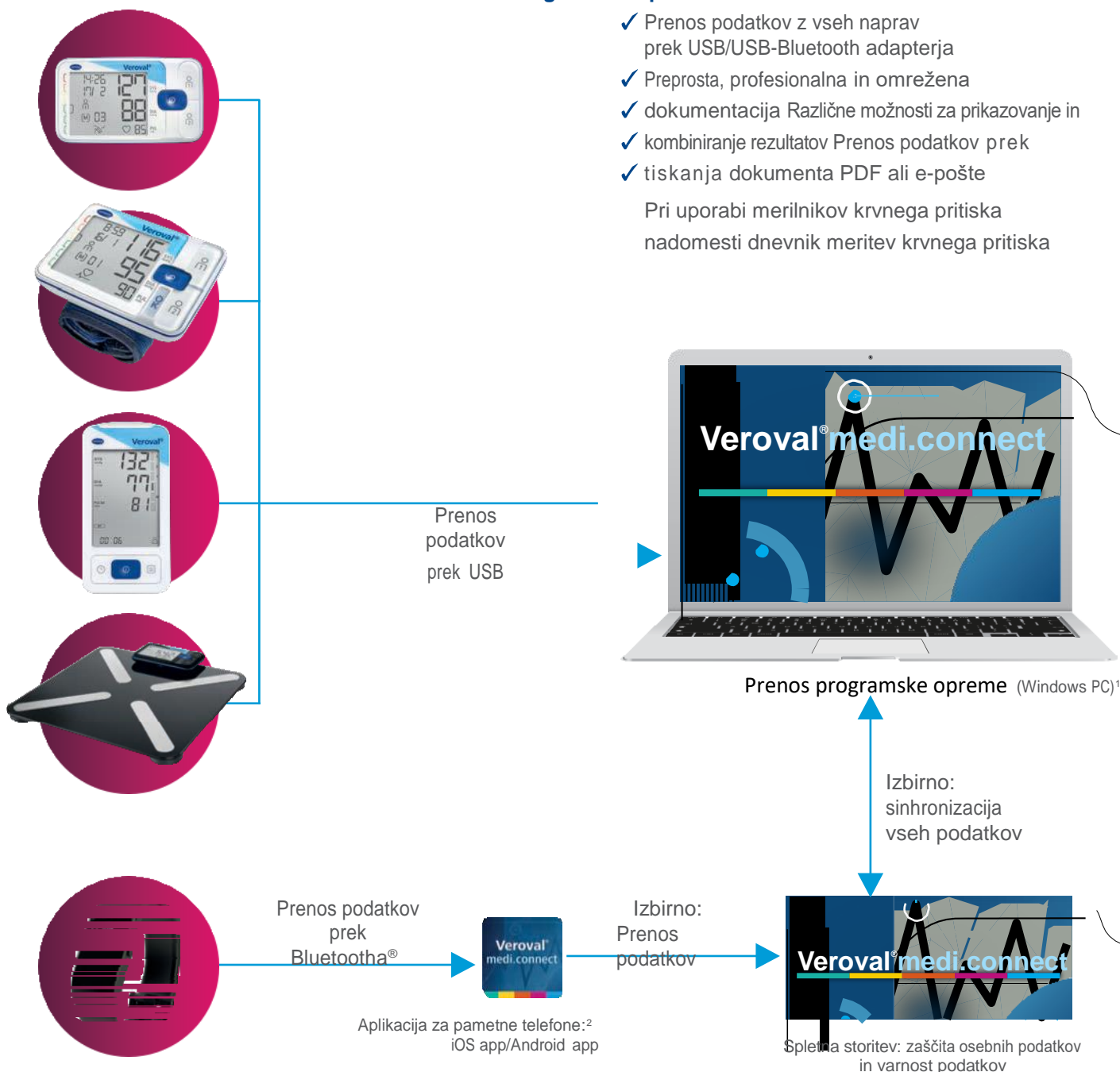

## Aplikacija za pametni telefon

- ✓ Prenos podatkov s sledilnika aktivnosti prek Bluetootha®
- ✓ Preprosta, profesionalna in omrežena dokumentacija na pametnem telefonu
- ✓ Različne možnosti za prikazovanje in kombiniranje rezultatov
- ✓ Prikaže vse podatke z drugih Verovalovih® naprav, če je aktivirana spletna storitev

## Spletna storitev

- ✓ Registracija po izbiri
- ✓ Sinhronizacija med programsko opremo in aplikacijo za pametne telefone
- ✓ Podatki dostopni prek spletnega brskalnika ali v načinu gostovanja
- ✓ Uporabnik lahko prek spletnega brskalnika prebere in pošlje svoje podatke kamor koli (npr. zdravniku)
- ✓ Samodejno varnostno kopiranje spletnih podatkov

<sup>1</sup> Združljivo z Windows 7, 8 in 10, dokler traja uradna Microsoftova podpora

<sup>2</sup> Združljive naprave: pametni telefoni in tablični računalniki z Android™ 4.4 in novejšimi različicami, Apple® iPhone® 4s, Apple® iPad® 3rd generation, Apple® iPad mini™, Apple® iPad Air™ in novejše različice



# Veroval® medi.connect

## **Prenos podatkov z merilnika krvnega tlaka**



### 1. korak

Najprej na svojem računalniku zaženite Veroval® medi.connect.




### 2. korak

Odprite „Nastavitve“ na vrhu zavihka ...




... nato pa pojdite levo spodaj do „Krvni tlak“.

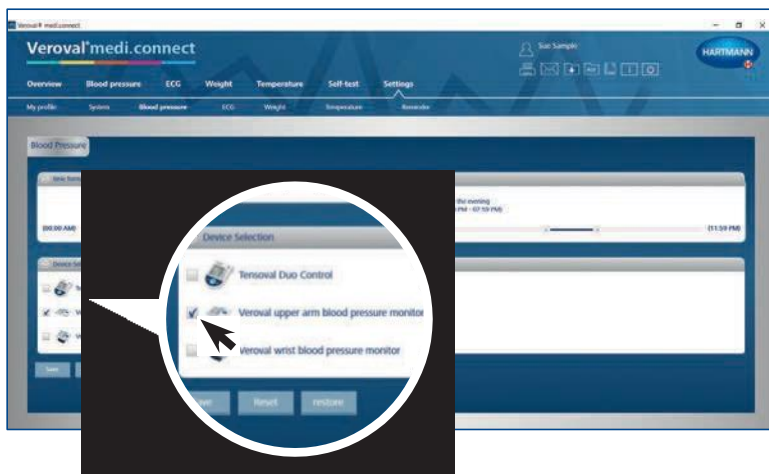


### 3. korak

Na nastavitvah za „Krvni tlak“ kliknite na zeleno napravo za merjenje krvnega tlaka ...

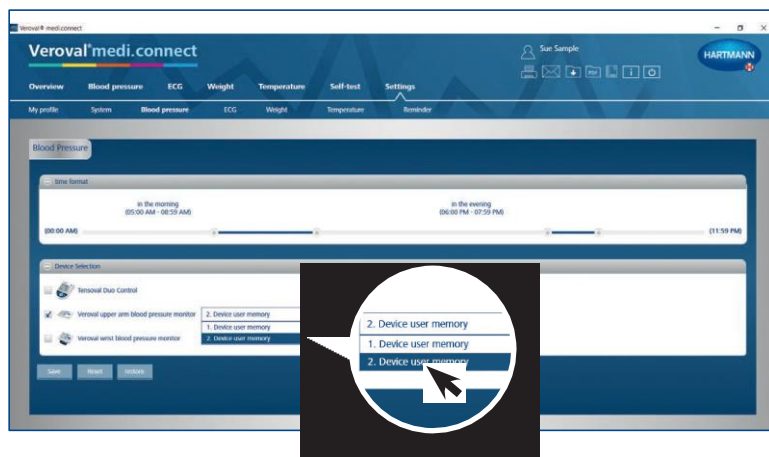


Izberite uporabnika naprave in shranite. Ta korak je treba izvesti le enkrat.

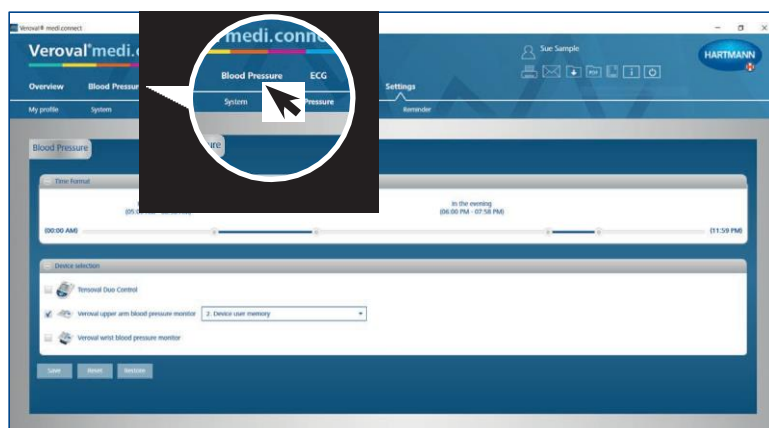


### 4. korak

Za prenos podatkov kliknite na „Krvni tlak“ v zgornjem zavihku.

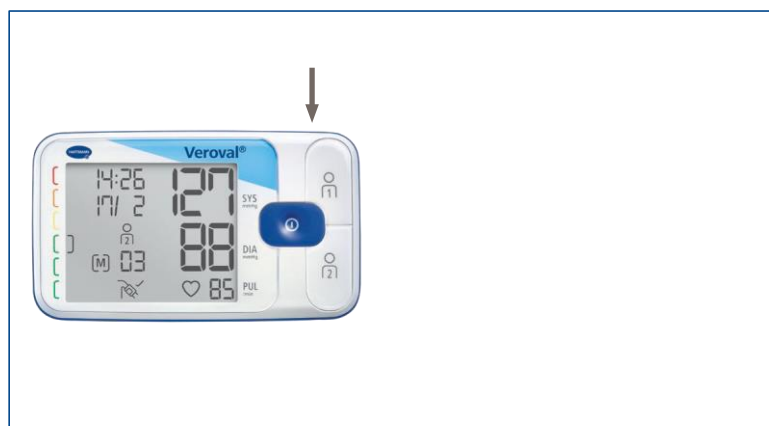

### 5. korak

Vtaknite manjši konec USB kabla v vtič na zadnji strani vašega merilnika krvnega tlaka ...

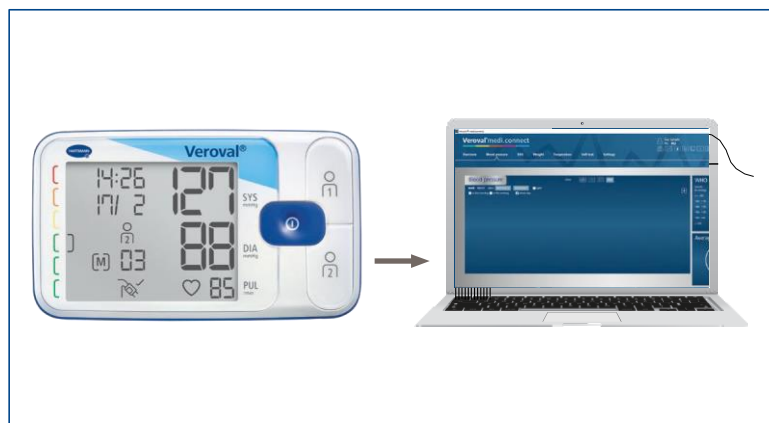


... in povežite večji konec s svojim računalnikom.






Na zaslonu vašega merilnika krvnega tlaka se pojavi „PC“. Zdaj imate 30 sekund za prenos podatkov, sicer bo naprava prešla v stanje pripravljenosti.

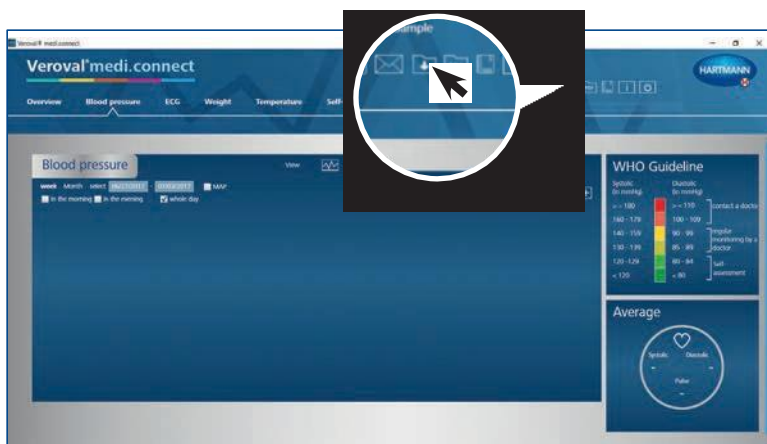

### 6. korak

Kliknite zgoraj desno na okence „Prenos podatkov“...

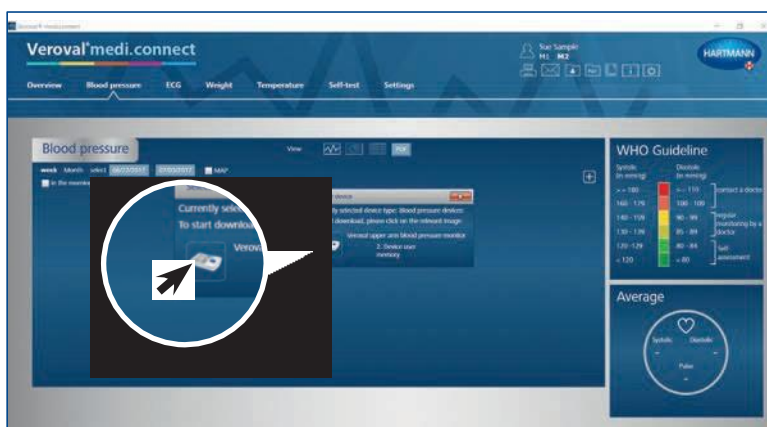


... in na želeno napravo v izbirnem seznamu.



Če podatki niso preneseni v 30 sekundah, naprava preide v stanje pripravljenosti.


V tem primeru napravo ponovno povežite.

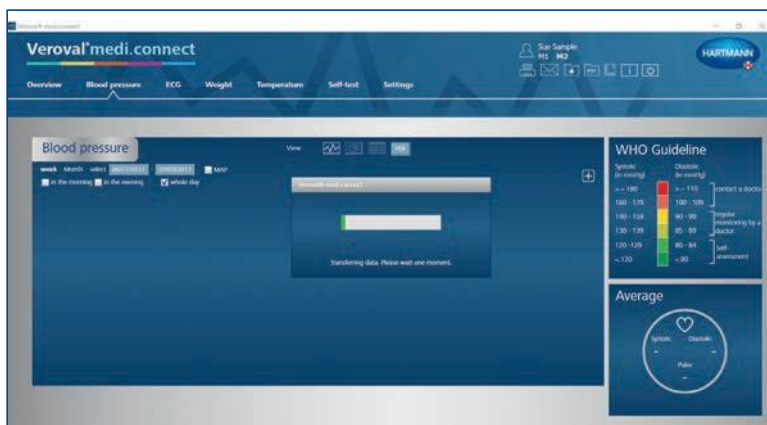

Podatki se zdaj prenašajo.




Uspešen prenos označuje oglati oklepaj.

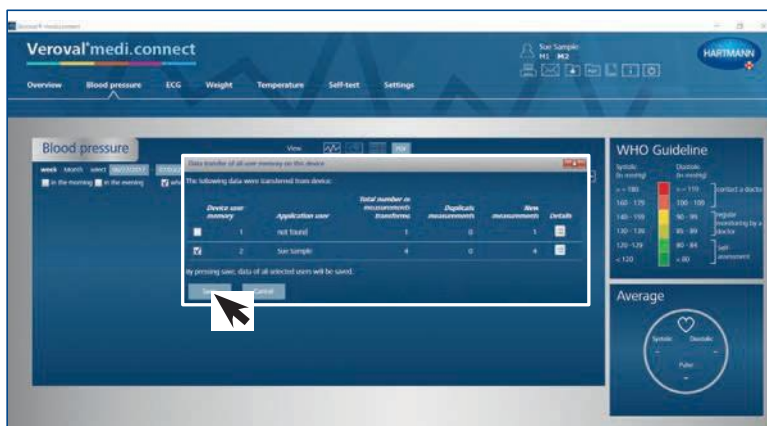

### 7. korak

Ko je prenos končan, izberite svoj uporabniški spomin in kliknite „Shrani“.

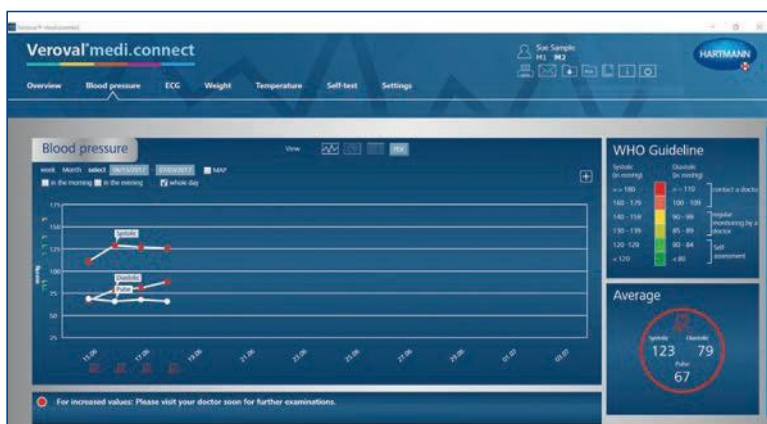

### 8. korak


Zdaj lahko kadar koli priključite shranjene podatke prek zgornjega zavihka „Krvni tlak“ in jih prikazete kot na primer diagram ...






# Veroval® medi.connect

## Prenos podatkov z merilnika krvnega tlaka

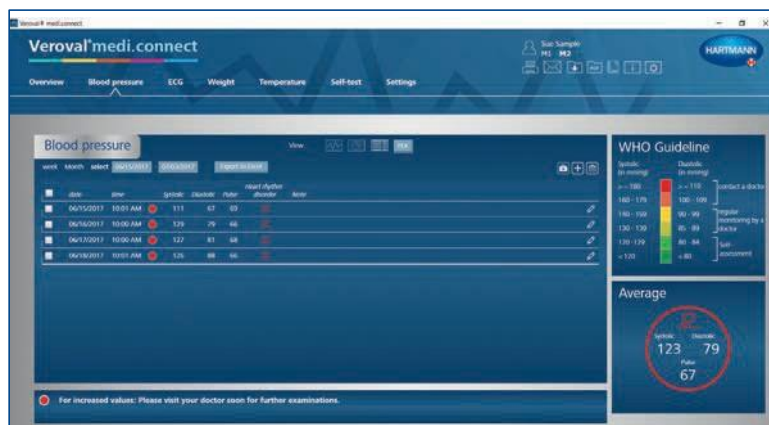

... seznam ...

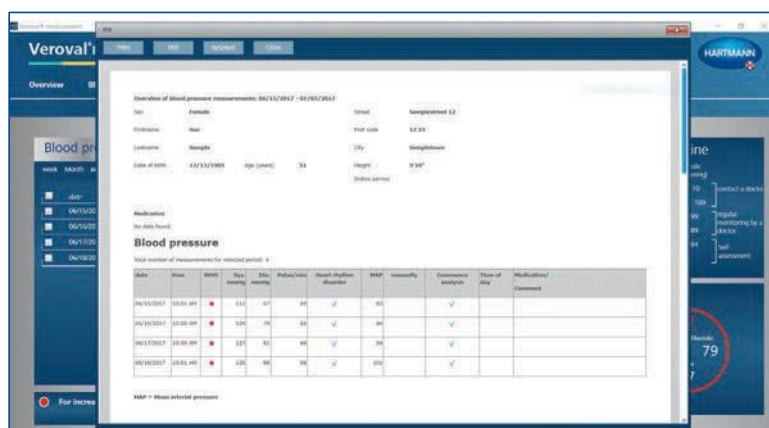

... ali dokument PDF.



Veroval<sup>®</sup> medi.connect  
**Prenos podatkov z  
merilnika EKG/krvnega tlaka**

### 1. korak

Naprej na svojem računalniku zaženite Veroval® medi.connect.




### 2. korak

Odprite „Nastavitve“ na vrhu zavihka ...




... nato pa pojdite levo spodaj do „EKG“.

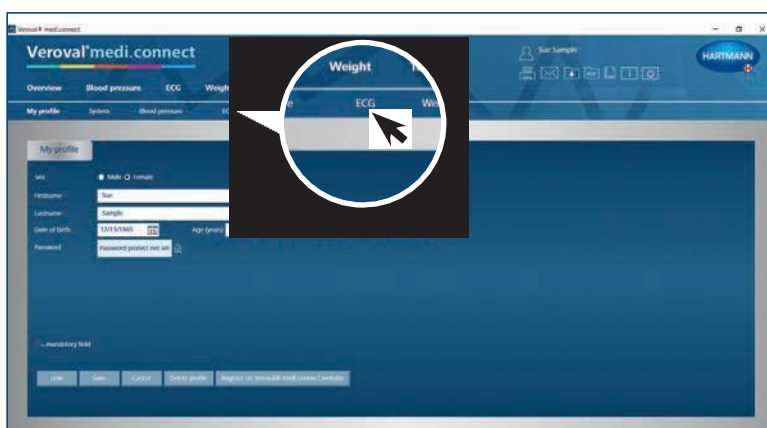

### 3. korak

Na nastavitvah za „EKG“ kliknite na EKG in merilnik krvnega tlaka, izberite uporabnika naprave in shranite. Ta korak je treba izvesti le enkrat.

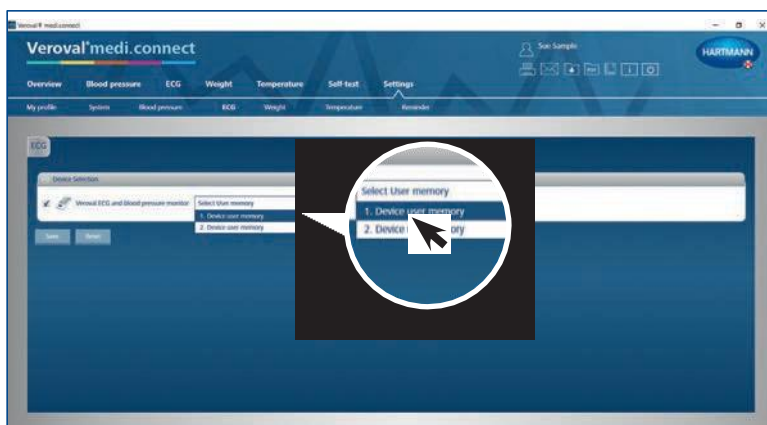




### 4. korak

Za prenos podatkov kliknite na „EKG“ v zgornjem zavihku.



### 5. korak

Zdaj vključite USB-Bluetooth adapter...

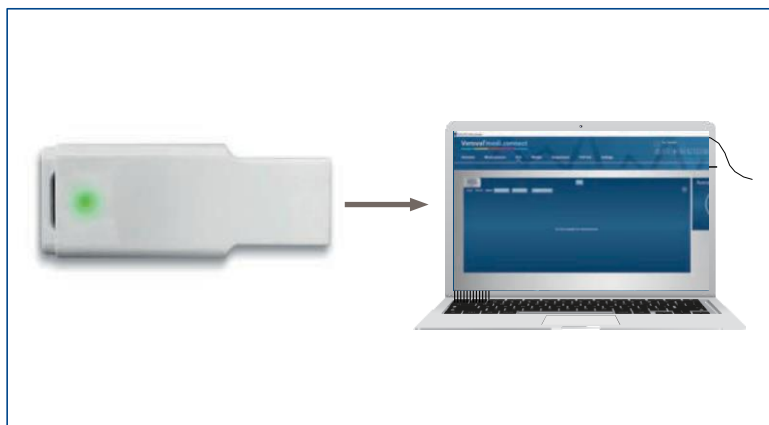

.... v USB vtič svojega računalnika.

Če ste ga pravilno povezali, bo na adapterju zasvetila zelena lučka.




### 6 korak

Spodaj desno vključite svoj merilnik EKG in krvnega tlaka.




Če podatki niso preneseni v 30 sekundah, naprava preide v stanje pripravljenosti.

V tem primeru napravo ponovno vključite.

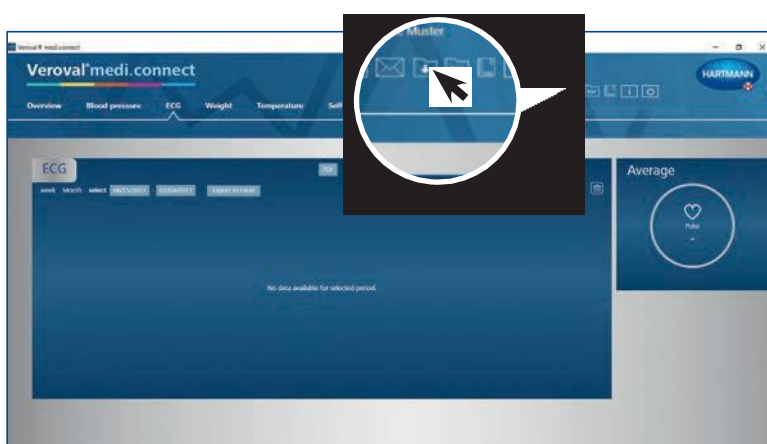

### 7. korak

Kliknite na okence „Prenos podatkov“ zgoraj desno na svojem računalniku ...

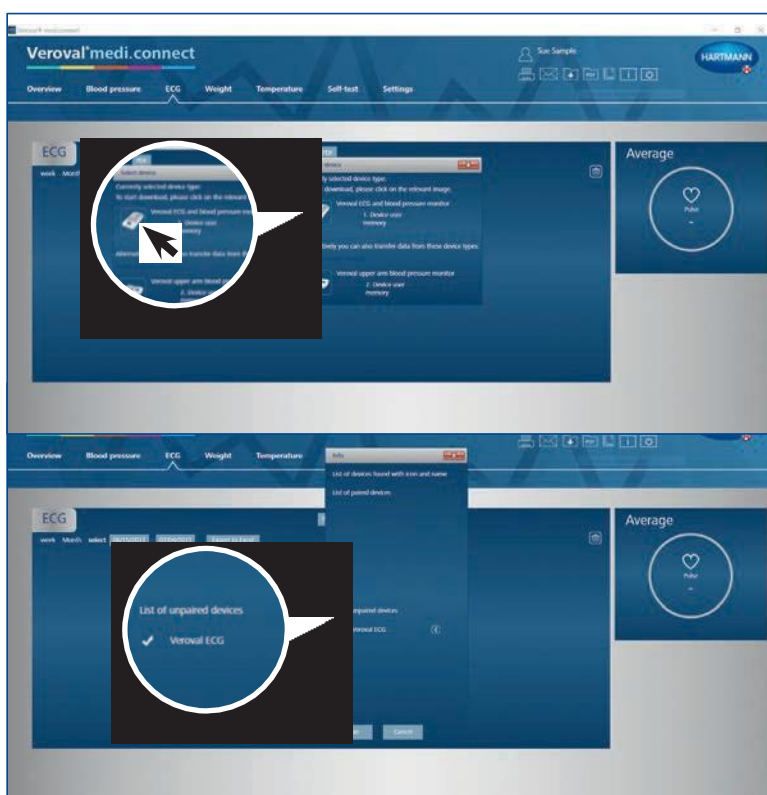

### 8. korak


Zdaj izberite svoj merilnik EKG in krvnega tlaka.

Ob uspešno izvedenem koraku program napravo poišče in prikaže.



### 9. korak

Zdaj kliknite na simbol Bluetootha ...

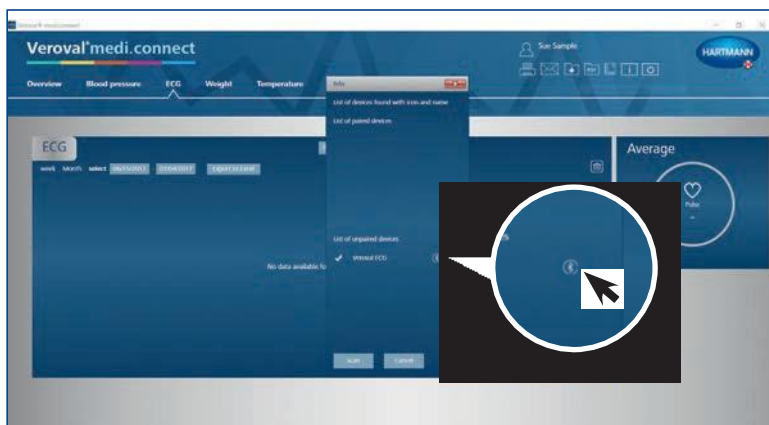

... in ponovno vključite merilnik EKG oz. krvnega tlaka, če je naprava že prešla v stanje pripravljenosti.





Vzpostavljena je bila povezava Bluetooth.

### 10. korak

Kliknite na ikono za prenos.

Podatki se zdaj prenašajo.

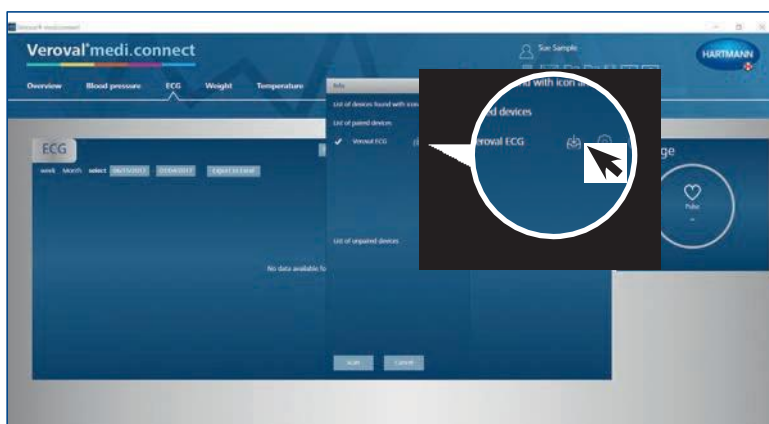


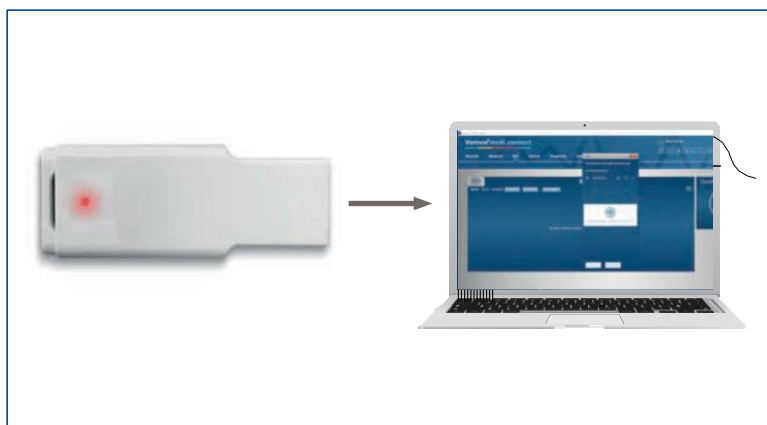

Med prenosom lučka adapterja zasveti rdeče ...




... indikator povezave na merilniku EKG oz. krvnega tlaka pa utripa.

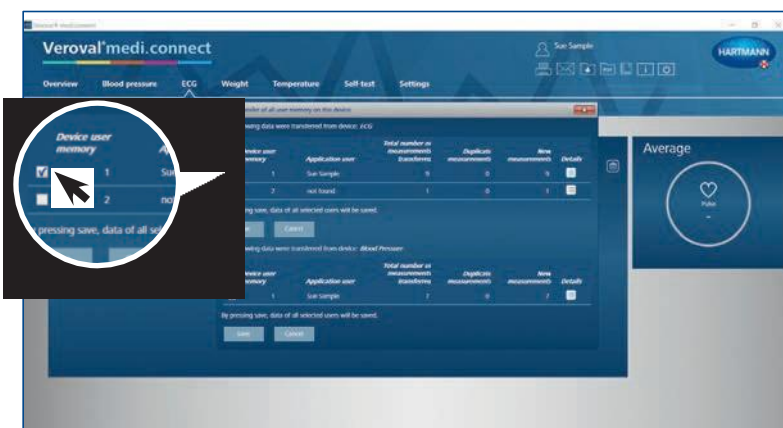


### 11. korak


Po prenosu izberite, katero vrednost želite shraniti: EKG ...

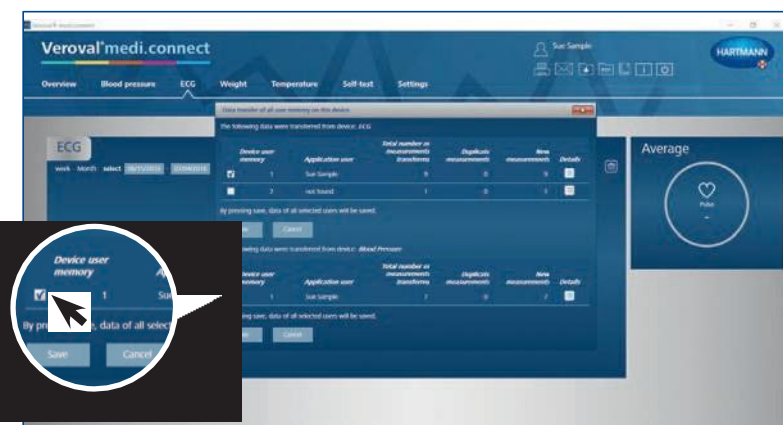

... ali krvni tlak ...

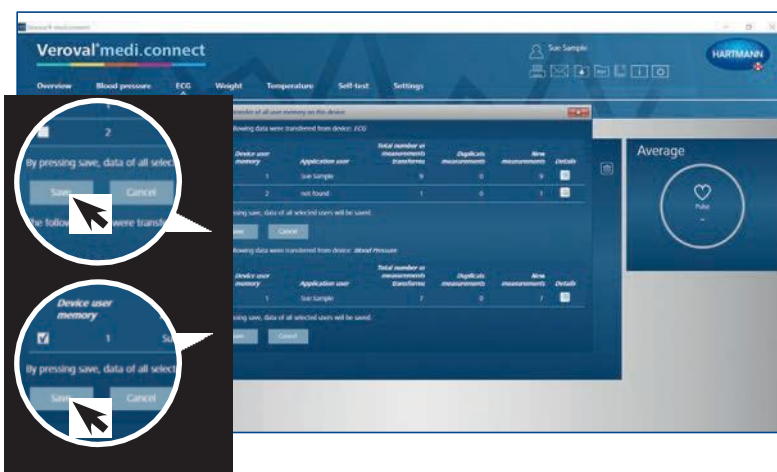


... ali obe. Nato kliknete na „Shrani“ in potrdite vsako operacijo s klikom na “OK“.

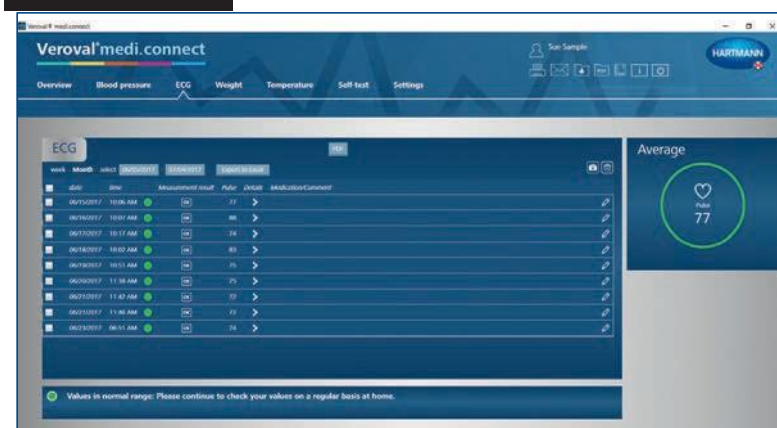

### 12. korak

Zdaj lahko kadar koli priključete shranjene podatke prek zgornjega zavihka „EKG“ in jih prikažete kot na primer seznam ...

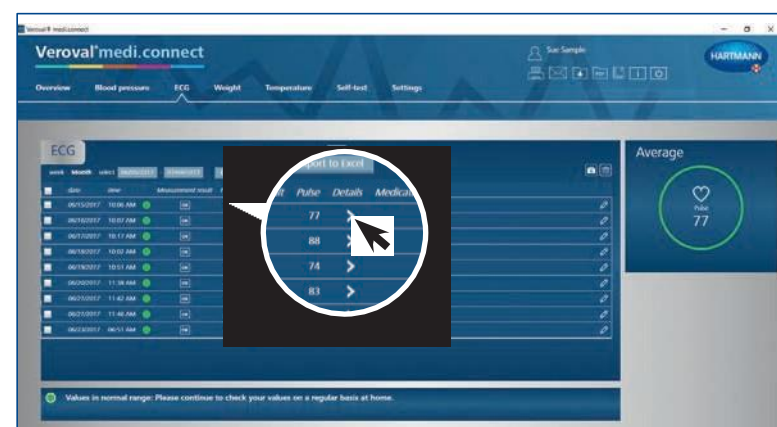

... ali kliknete za podrobni pregled...



... v obliki krivulje EKG.




Veroval<sup>®</sup> medi.connect

**Prenos podatkov s  
sledilnika aktivnosti**

### 1. korak


Zaženite Veroval® medi.connect na vašem pametnem telefonu in se prijavite.

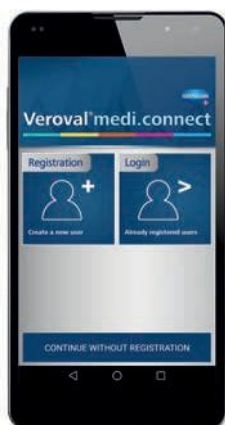

Prepričajte se, da je Bluetooth funkcija na vašem pametnem telefonu aktivirana.

### 2. korak

Zdaj pojdite na sredino do ikone „Nastavitve“ ...

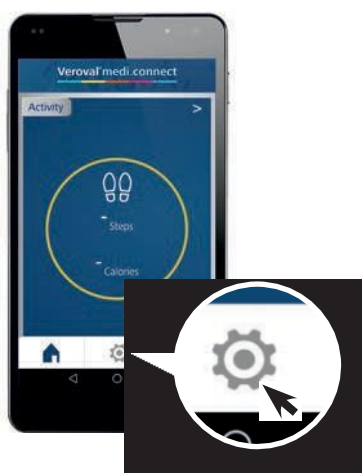

... in pod „Moje naprave“ izberite „Dodaj napravo“ ...





... za dodajanje svojega sledilnika aktivnosti.

Ta korak je treba izvesti le enkrat.



### 3. korak

V „Izbira naprave” pojdite na „Aktivnost“ ...



... in pojavila se bo povezava „Povežite senzor aktivnosti“.



### 4. korak

V načinu ure pritisnite desni gumb na svojem zapestnem traku, dokler se na zaslonu ne pojavi „Seznani?“.



Za potrditev še enkrat kratko pritisnite na gumb.



Na zaslonu se bo prikazal napis „Seznanjam“, ki bo med nameščanjem povezave utripal.



### 5. korak

Zdaj pojdite na „Poveži zdaj“ ...



... in pričelo se bo iskanje sledilnika aktivnosti.



Če povezava ni vzpostavljena v 30 sekundah, se prikaže X, sledilnik aktivnosti pa preide v stanje pripravljenosti.



V tem primeru ponovno vzpostavite povezavo.

Če prenos podatkov prek Bluetootha še vedno ne deluje, je morda vaš Bluetooth spomin poln. (Velja le za Android.)

Potem poskusite naslednje:


- 1) Izključite funkcijo Bluetooth.
- 2) Izključite in ponovno vključite svoj pametni telefon.
- 3) Počistite predpomnilnik Bluetootha: pod Nastavitve > Aplikacije > „Bluetooth“ > „Počisti predpomnilnik“ (vrstni red korakov je odvisen od naprave).
- 4) Ponovno vključite funkcijo Bluetooth in se poskusite ponovno povezati.



Ko je povezava vzpostavljena, se na zaslonu pojavi kljukica.

### 6. korak

Zdaj lahko vnesete svoje osebne cilje in podatke ...

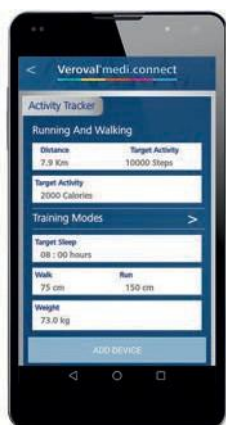

... in sinhronizirate vrednosti s svojim sledilnikom aktivnosti s klikom na „Dodaj napravo”.



V nastavitvah boste zdaj lahko našli svoj sledilnik aktivnosti ...



... vrednosti pa so dostopne v aplikaciji.





# Veroval® medi.connect

## **Funkcija tiskanja PDF**





# Veroval® medi.connect

## Funkcija tiskanja PDF




### 1. korak

Najprej zaženite Veroval® medi.connect na svojem računalniku.




### 2. korak

Za tiskanje vrednosti vašega krvnega tlaka kliknite na „Krvni tlak“ na vrhu zavihka.

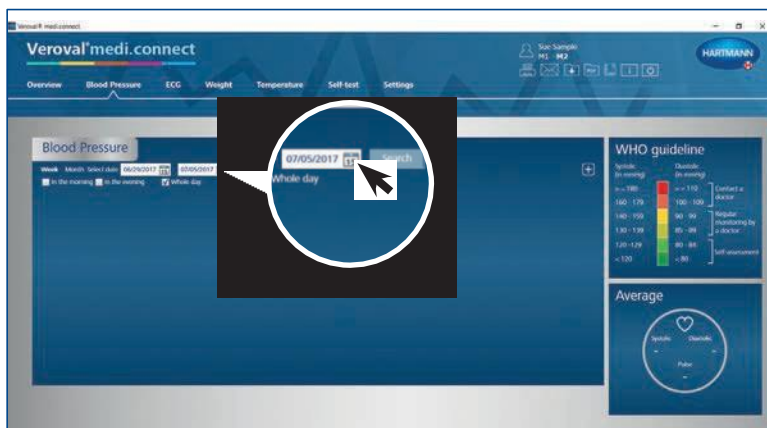


### 3. korak

Za določitev obdobja, za katero želite natisniti podatke, kliknite na prikaz datuma.

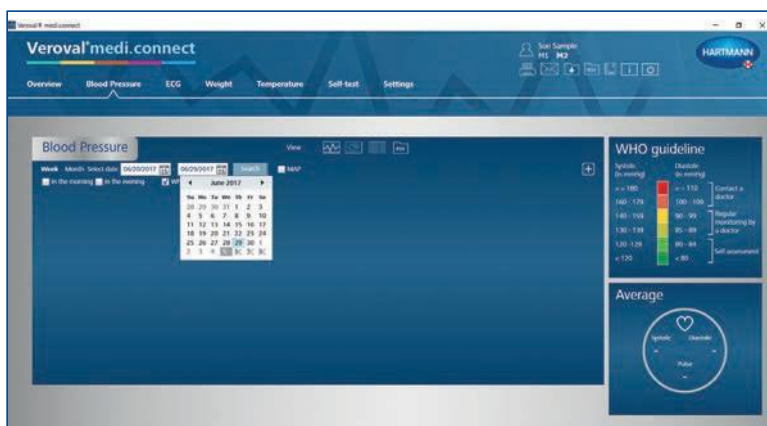

### 4. korak

Izberite obdobje in kliknite "Poišči". Datum lahko vnesete tudi ročno.

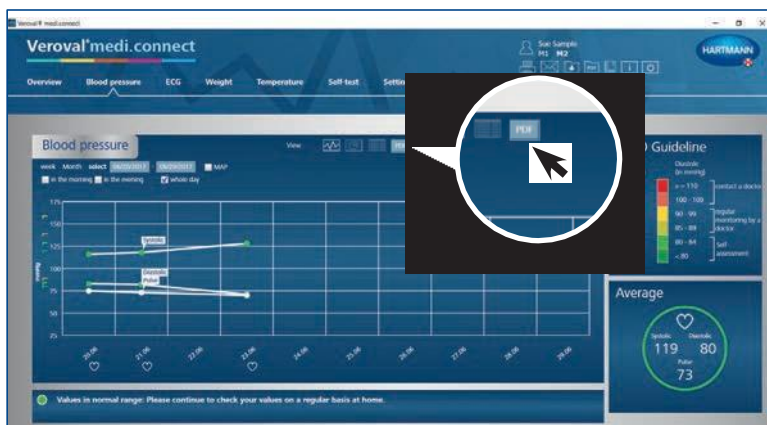

### 5. korak


Pojavil se bo graf s podatki izbranega obdobja.

Za uporabo funkcije tiskanja kliknite na „PDF“.

Date	Time	Systolic	Diastolic	PPV	Heart rhythm	HR	Respiratory	Comments	Time of day	Medication	Comment
16/12/2017	11:20 AM	117	82	35	NS	84					
16/12/2017	11:28 AM	114	80	34	NS	85					
16/12/2017	11:42 AM	115	81	34	NS	82					
16/12/2017	11:48 AM	105	82	23	NS	86			In the morning		
16/12/2017	16:48 AM	108	71	37	NS	84					

### 6. korak

Prikazan bo PDF z različnimi pogledi, kot je pregled ...

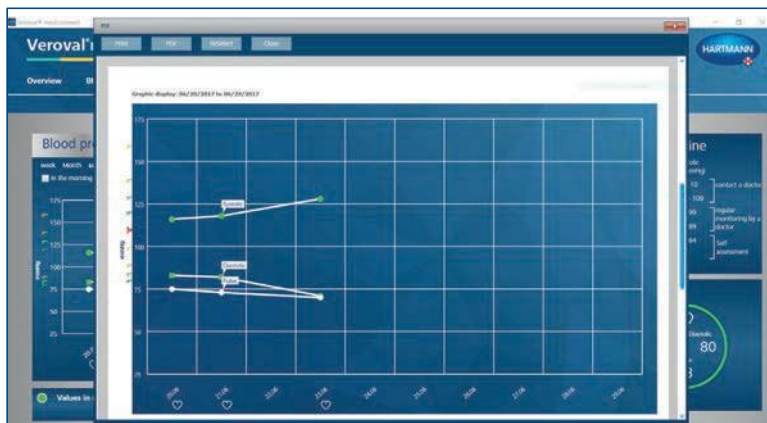

... ali grafični prikaz ...




... izbranih vrednosti.



### 7. korak

Za shranjevanje PDF-ja kliknite na „PDF“ v odprtem oknu ...

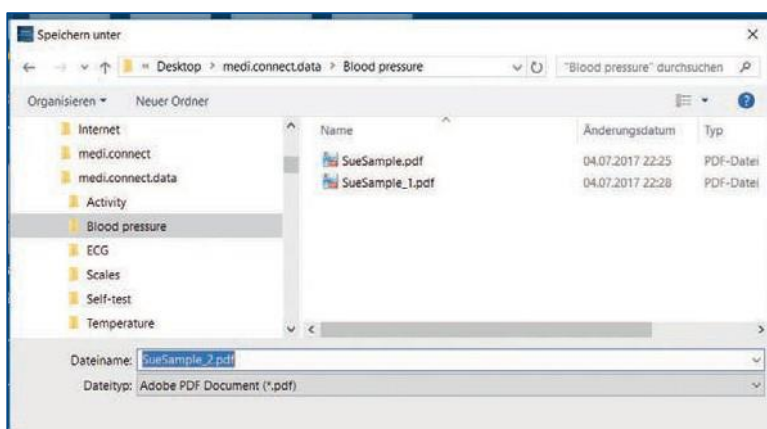

... izberite lokacijo za shranjevanje in kliknite „Shrani“.



### 8. korak

Če želite le natisniti PDF, potem v odprtem oknu ne kliknite na „PDF“, ampak na „Tiskaj“.




### 9. korak

PDF lahko natisnete ali shranite tudi z zavihkom za splošno navigacijo zgoraj desno.



Če želite to narediti, preprosto kliknite na ikono PDF ali ikono za tiskanje.

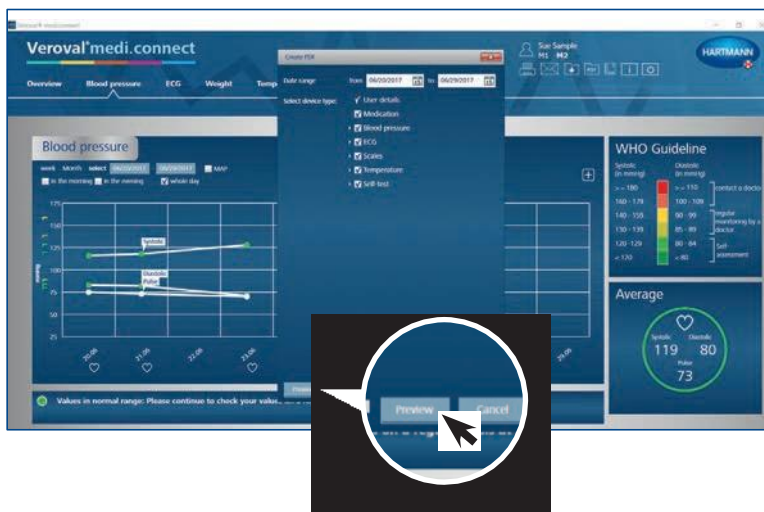


V novem oknu izberite, katere vrednosti želite natisniti ali shraniti, nato kliknite na „Predogled“ in izvedite že dobro znane korake.



Veroval® medi.connect


**Spletni dostop**



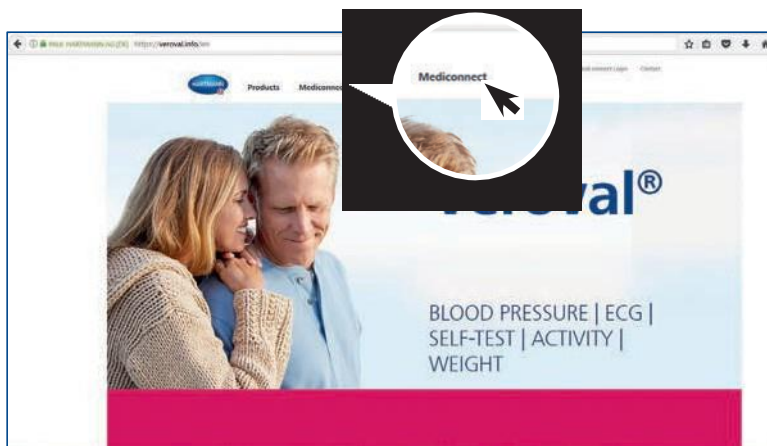


### 1. korak

Najprej obiščite spletno stran [www.veroval.si](http://www.veroval.si) in kliknite na [medi.connect](#) na vrhu navigacijske vrstice ...

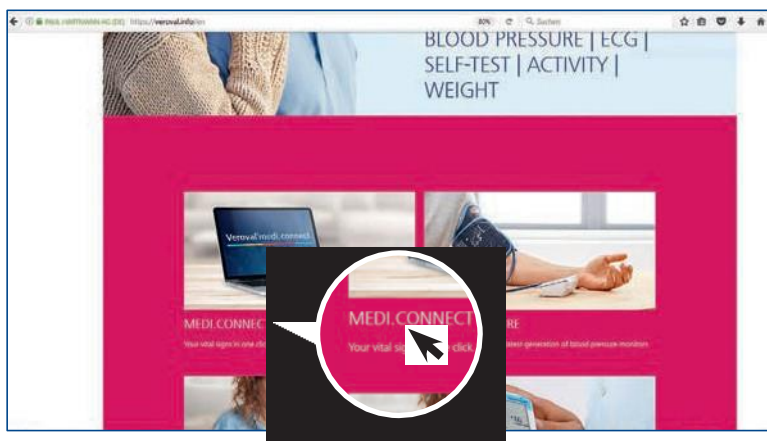


... ali v pregledu.

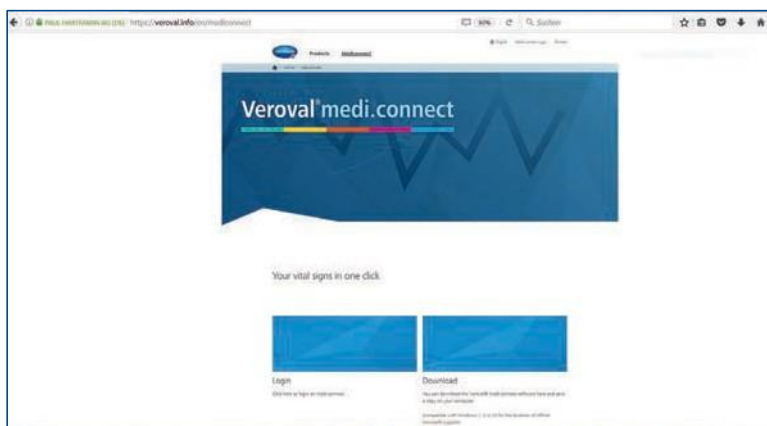


Prikazana bo spletna stran [medi.connect](#).

### 2. korak


Kliknite levo na „Prijava“ ...

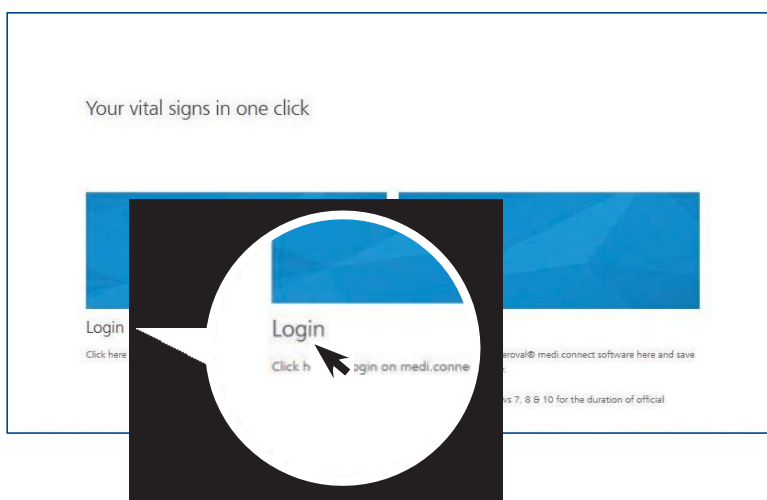



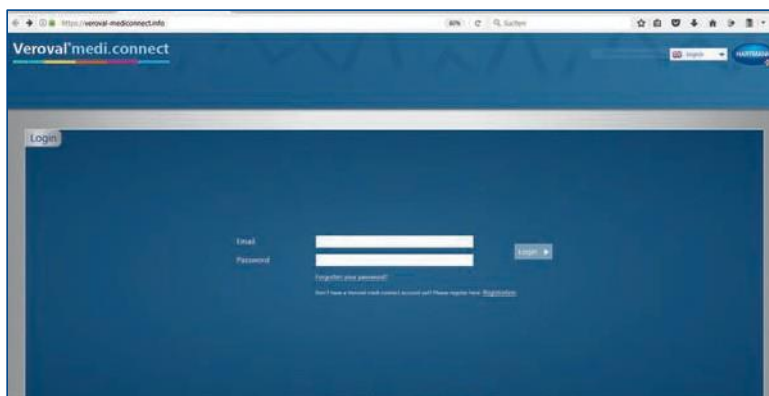


... prikazana bo prijavna stran.

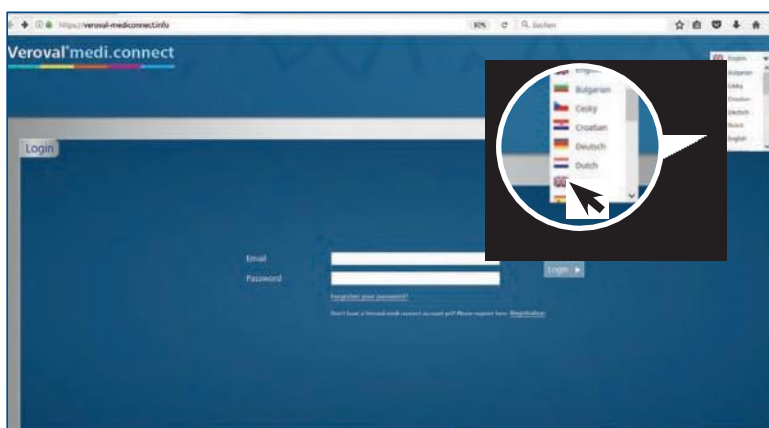


### 3. korak

Najprej v zgornjem desnem kotu izberite svoj jezik.

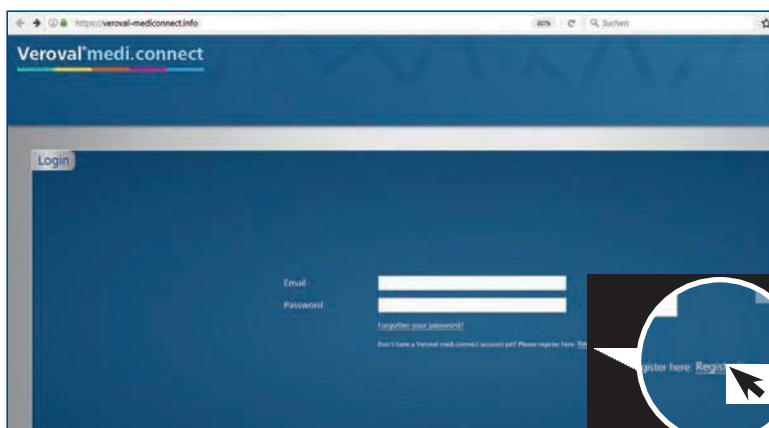


### 4. korak


Preden lahko uporabljate Veroval® medi.connect, se morate registrirati.

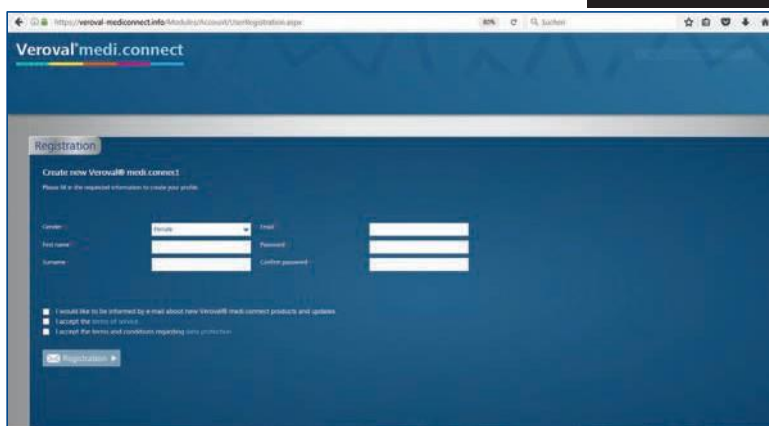

Prosimo, izpolnite polja ...

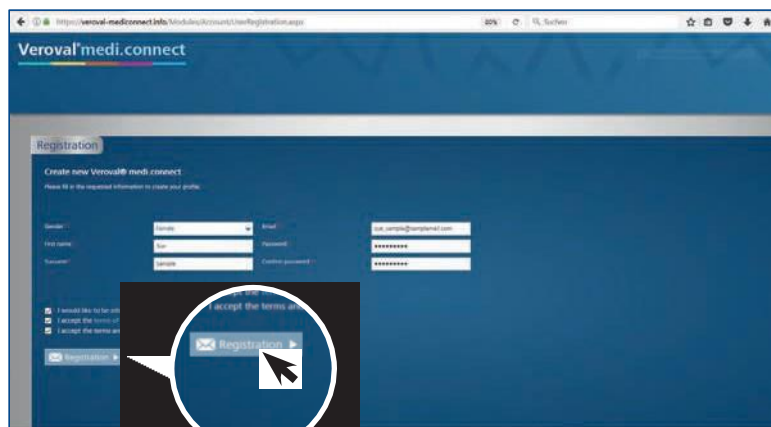


... nato pa kliknite na „Registracija“. Vaši podatki bodo shranjeni na strežniku v Nemčiji.

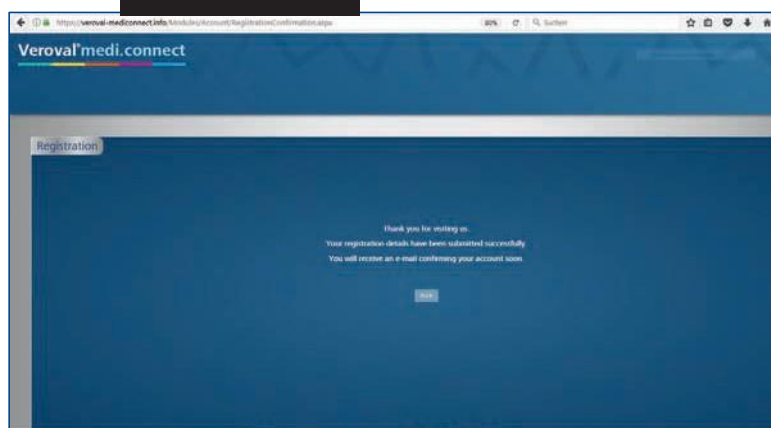


### 5. korak


Zdaj boste prejeli potrditveno e-pošto.

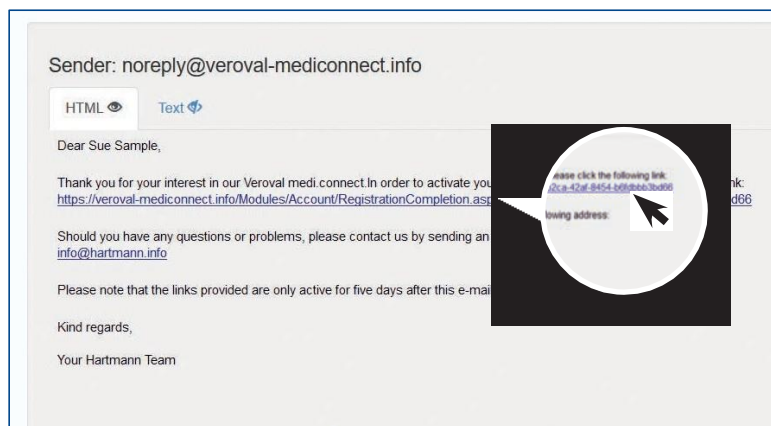

Za potrditev registracije kliknite na povezavo.

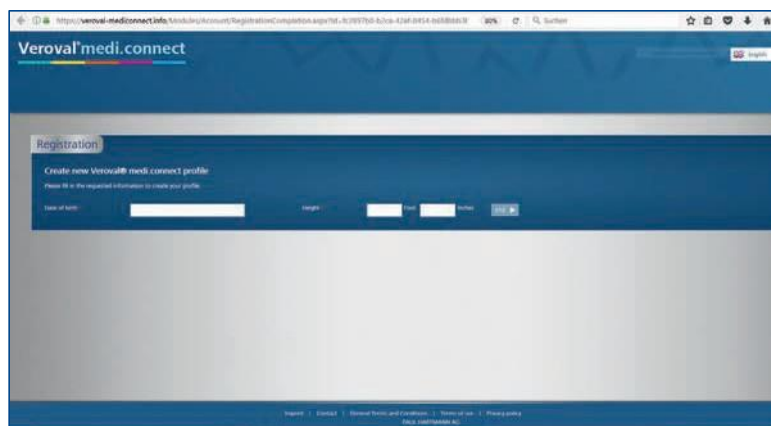

Vnesite svoj datum rojstva in višino, da ustvarite svoj profil.

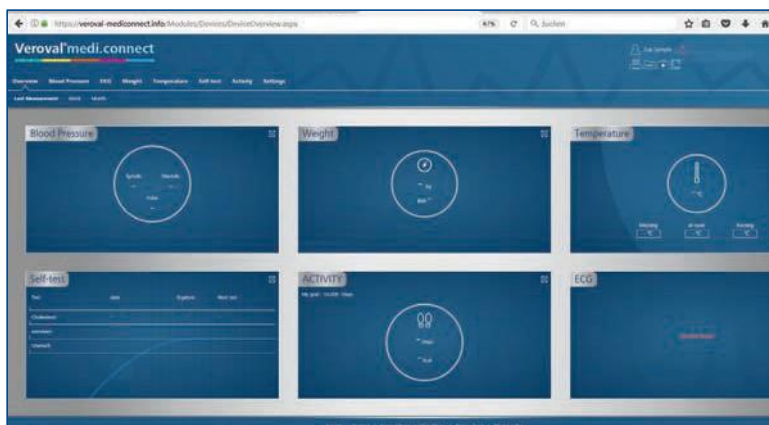


Zdaj ste se uspešno registrirali. S svojimi dostopnimi podatki lahko kadar koli uporabljate spletno aplikacijo.



### 6. korak


Zdaj lahko na spletno aplikacijo tudi prenesete vrednosti svojih vitalnih podatkov z Verovalove® programske opreme medi.connect.

Če želite to narediti, zaženite programsko opremo na svojem računalniku in pojdite na „Nastavitve“ v zgornjem zavihku.

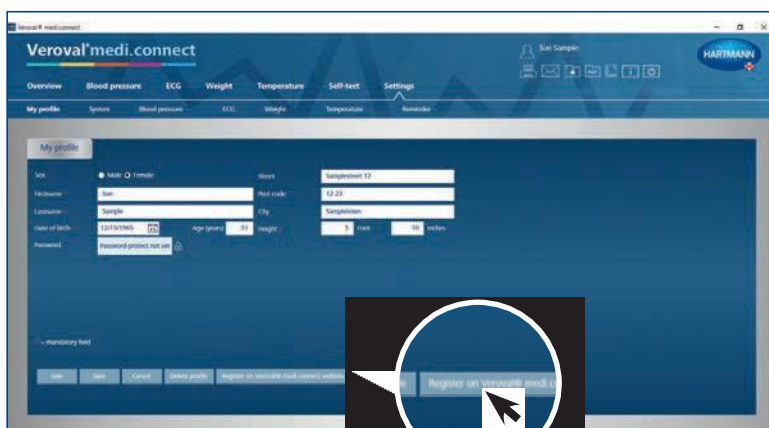


### 7. korak

Na strani z nastavitvami kliknite „Registrirajte se na spletni strani Verovalov® medi.connect“ v spodnjem desnem kotu.

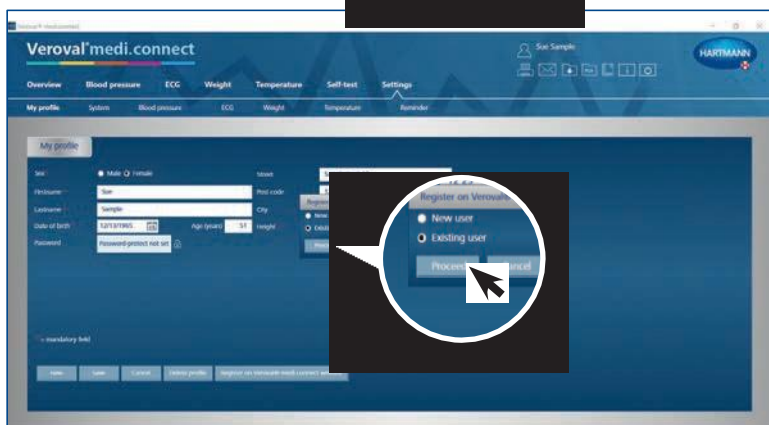


### 8. korak


V novem oknu izberite „Obstoječi uporabnik“ (če ste se že registrirali prek spleta) in kliknite na „Nadaljuj“.

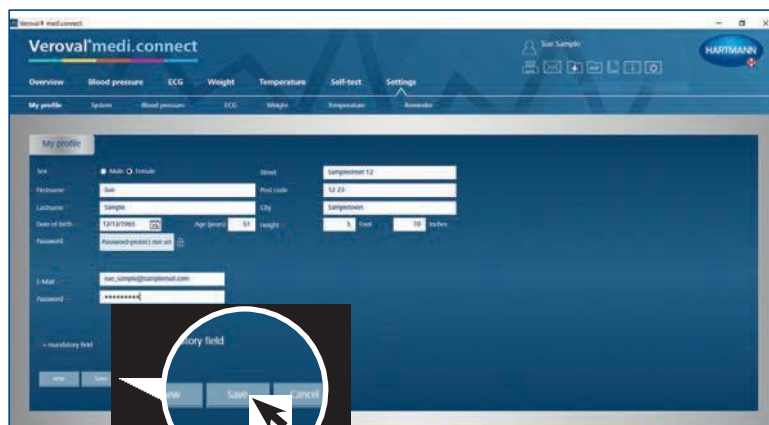

Vnesite e-pošto, s katero ste se registrirali, svoje geslo in kliknite na „Shrani“.

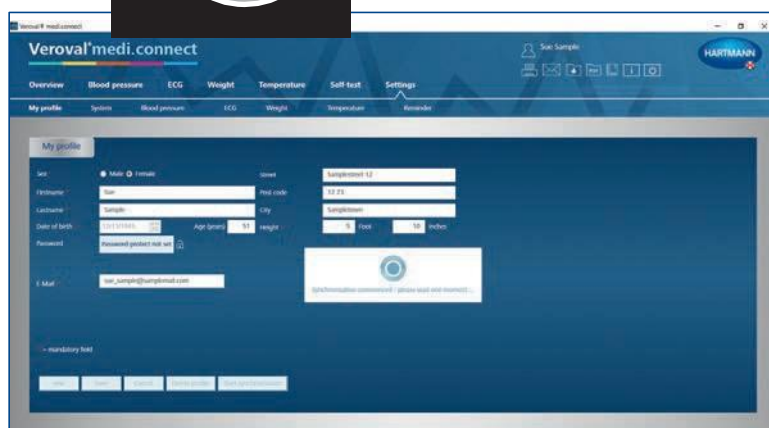

Zdaj bodo podatki s programske opreme sinhronizirani s spletno aplikacijo ...

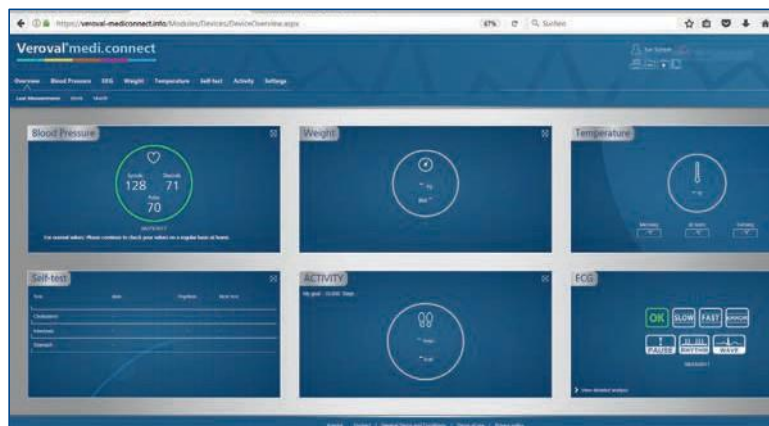

... in ob naslednjem obisku boste lahko dostopali do svojih aktualnih podatkov, ki so bili preneseni z vaše naprave.