

Chlamydia

Sneltest voor eigen gebruik. Zo voert u de test uit:

1 • Leg de onderdelen van de test voor u op tafel.

Inhoud:

- (1) wattenstaafje voor uitstrijkje
- (2) flacon met buffer
- (3) testcassette met droogmiddel in aluminium verpakking



Vorbereiding:

Vóór de monsterafname mag u ten minste 1 uur niet plassen, want dat kan een onjuiste uitslag opleveren. Voer de test in een rustige omgeving uit. Neem het wattenstaafje (1) uit de verpakking.


2

- Neem een comfortabele houding aan, zoals bij het inbrengen van een tampon.
- Breng het wattenstaafje (1) voorzichtig in tot aan de baarmoederhals (aan het einde van de vagina).
- Draai het wattenstaafje (1) gedurende ca. **30 seconden** gelijkmatig rond en trek het er langzaam weer uit.



3

- In de flacon met buffer (2) bevindt zich opzettelijk weinig buffer. Doop het wattenstaafje (1) met het monster tot op de bodem in de flacon.
- Draai het wattenstaafje (1) in de buffer rond en druk het meermaals tegen de zijwand van de flacon uit, opdat het monster goed in de buffer wordt verdeeld.

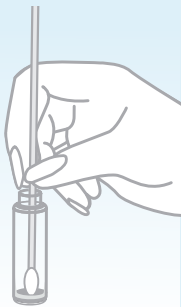


4

5 min




- Wacht **5 minuten**. Gedurende deze wachttijd blijft het wattenstaafje met het uitstrijkje (1) in de flacon (2). Als u langer of korter wacht, kan dat een onjuiste uitslag opleveren.
- Druk het wattenstaafje (1), voordat u het verwijdert, goed tegen de zijwand van de flacon (2) uit.

5

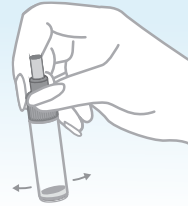


- Verwijder het wattenstaafje (1), sluit de flacon (2) en draai het nog eenmaal.

6

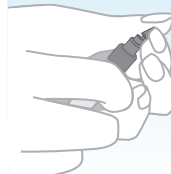

- Houd de flacon (2) met de dop omhoog en breek het uiteinde eraf door te knikken.

7

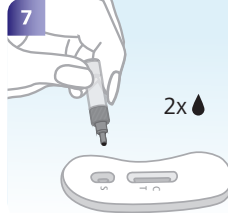


- Breng nu, zoals afgebeeld, 2 druppels monster aan op het monsterveld "S" van de testcassette (3).
- Zorg ervoor dat er geen vloeistof op het reactieveld terecht komt.

8

- Exact **15 minuten** na het aanbrengen van de 2 druppels kunt u het resultaat aflezen.
- Na meer dan 20 minuten is het testresultaat niet meer betrouwbaar.

Om het resultaat te beoordelen, moet u eerst controleren of er een lijn zichtbaar is in het testvenster onder (C). Het maakt niet uit hoe duidelijk of onduidelijk de controlelijn zichtbaar is.


Positief resultaat

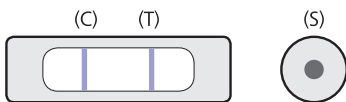

Het monster wordt als **positief** beschouwd, wanneer binnen de reactietijd van 15 minuten in het resultaatveld (bij "C" en "T") **twee paarse lijnen** verschijnen, ook als de lijn bij "T" zeer onduidelijk is. Een positief resultaat kan vaak ook al worden bepaald voordat de reactietijd van 15 minuten volledig verstreken is.

Een **positief resultaat** moet u met uw arts bespreken. Neem deze gebruiksaanwijzing mee wanneer u de arts bezoekt. Deze kan zich dan een preciezer beeld vormen van de test die u hebt uitgevoerd.


Negatief resultaat

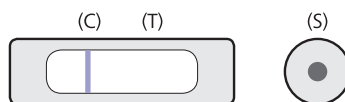

Het resultaat wordt als **negatief** beschouwd, wanneer er alleen een **paarse lijn bij "C"** verschijnt. Een negatief resultaat kan pas met zekerheid worden vastgesteld nadat de reactietijd van 15 minuten volledig verstreken is.

Bij een **negatief resultaat** is een Chlamydia trachomatis-infectie hoogstwaarschijnlijk uitgesloten. Toch is het raadzaam om u regelmatig door een arts te laten onderzoeken.

Ongeldig resultaat

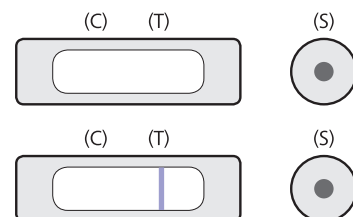

Het resultaat is **ongeldig** als er **geen paarse lijn bij "C"** of **alleen een lijn bij "T"** op het testveld verschijnt, of wanneer het gehele testveld gelijkmatig paars gekleurd is. Mogelijke oorzaken van een ongeldig resultaat zijn een beschadigde (aluminium) verpakking van de testcassette of het wattenstaafje, onjuiste bewaring of een verkeerde toepassing. Stel alle testmaterialen buiten gebruik en wend u per e-mail tot de distributeur.