



# X-WIPES Safety Pack

Váš všestranný pomocník na bezpečnú a pohodlnú dezinfekciu povrchov

 Dezinfekcia



# Jednoducho v bezpečí

X-Wipes Safety Pack – váš všestranný pomocník na bezpečnú a pohodlnú dezinfekciu povrchov



## Maximálna bezpečnosť aj v rizikových oblastiach

Patogény, vrátane baktérií rezistentných na antibiotiká, neustále spôsobujú infekcie a predstavujú hrozbu najmä na oddeleniach intenzívnej starostlivosti.

V záujme ochrany pacientov, ktorí majú často oslabenú imunitu, sa v týchto oblastiach so zvýšeným rizikom infekcie kladú mimoriadne prísne nároky na hygienu. To platí aj pre dezinfekciu povrchov.

Nesprávne opakované použitie systémov s dávkovačom na obrúsky môže prispieť k vytvoreniu biofilmu a viesť tak ku kontaminácii používaného roztoku. V záujme ochrany pacientov odborníci [1] odporúčajú:

- v oblastiach so zvýšeným rizikom infekcie nepoužívajte systémy s dávkovačmi, ktoré je potrebné opakovane plniť (s výnimkou použitia alkoholových dezinfekčných roztokov),
- to platí aj v prípade, že sa opakovane používa iba uzáver dávkovacieho systému.

## Riešenie: Systém X-Wipes Safety Pack.

Jednorazový dávkovací systém je všestranným pomocníkom a spĺňa všetky požiadavky, ktoré by systémy s dávkovačmi obrúskov pri používaní na miestach s vysokým rizikom infekcie mali spĺňať. Systém nie je potrebné opakovane naplňať. Riziko kontaminácie je minimálne. Pacienti na rizikových oddeleniach sú optimálne chránení a v bezpečí sú aj používatelia.

## Maximálne pohodlie vo všetkých oblastiach

Vďaka pohodlnému používaniu je systém X-Wipes Safety Pack presvedčivý aj v iných oblastiach spojených s hygienou. Jednorazový dávkovač sa dá použiť okamžite po naliatí dezinfekčného roztoku. Nie je potrebné vkladať roľku obrúskov, nie je potrebné osobitné vrečko a systém netreba znovu naplňať.

1 Mitteilung der Desinfektionsmittel-Kommission im VAH unter Mitwirkung der „4+4-Arbeitsgruppe“. Zur Verwendung von Tuchspendersystemen in Bereichen mit besonderem Infektionsrisiko. Hyg Med (vyhlásenie Komisie pre dezinfekciu Nemeckej asociácie pre aplikovanú hygienu (VAH) v spolupráci s „Pracovnou skupinou 4+4“ o použití systémov dávkovačov obrúskov v priestoroch so zvýšeným rizikom infekcie). 2014; 39 – 9


## Ich príprava na použitie je jednoduchá:



Nasadte si rukavice.



Odkrúťte uzáver.

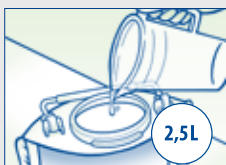

Nalejte 2,5 litra dezinfekčného roztoku.



Vytiahnite utierku cez dávkovací otvor.



Uzáver prikruťte naspäť na vrečko.



Na vrečko napíšte dobu trvanlivosti: 28 dní.



**NOVINKA:** Utierky pred vysušením a kontamináciou chráni dobre tesniaci uzáver

Vďaka zapečatenému baleniu si môžete byť istí, že balenie otvárate ako prví.

**Patentované utierky PET**

- optimálne navlhčenie dezinfikovaného povrchu vďaka 100 % uvoľňovaniu aktívnych zložiek

**NOVINKA:** Pevný držiak zabezpečuje bezpečný prenos vrečka

**NOVINKA:** Patentovaný „kosoštvorcový“ dávkovací otvor

- vďaka odolnosti otvoru sa obrúsky netrhajú príliš skoro
- zabráňuje utierkam sklznúť späť do vrečka
- predchádza riziku kontaminácie, keďže sa do vrečka nedá dostať rúk

**Flexibilné dávkacie vrečko**

- prispôsobí sa tvarom a šetrí miesto

**Dobrá stabilita**

- vďaka špeciálne tvarovanému dnu zostáva vrečko počas používania pevne stáť





	Balenie obsahuje	Objednávacie číslo	Balenie v kartóne
<b>BODE X-Wipes Safety Pack</b>			
Flísový kotúč v zásobníku na jedno použitie + Mikrobac forte 20 ml	90 utierok	7034291	4
Flísový kotúč v zásobníku na jedno použitie + Kohrsolin FF 40 ml	90 utierok	7034311	4

Dávkovanie dezinfekčného prípravku pomocou jednorázových sáčkov

Názov prípravku	Počet sáčkov	Účinnosť	Expozičná doba
Mikrobac® forte	1 × 20 ml	AB <sub>1</sub> (V)	1 hod.
	2 × 20 ml	AB <sub>1</sub> (V)	30 min.
	2 × 20 ml	AB <sub>1</sub> (V)	15 min.
	3 × 20 ml	AB <sub>1</sub> (V)	5 min.
	3 × 20 ml	AB <sub>1</sub> T(V)	2 hod.
Kohrsolin® FF	1 × 40 ml	AB <sub>1</sub> (V)	15 min.
	1 × 40 ml	AB <sub>1</sub> TV	1 hod.
	2 × 40 ml	ABTV	2 hod.
	2 × 40 ml	ABCTV	6 hod.

Vhodný na použitie so všetkými tekutými dezinfekčnými prostriedkami od spoločnosti HARTMANN



Alkoholová dezinfekcia



Aldehydová dezinfekcia



Dezinfekcia bez obsahu aldehydov

#### Kontaktné informácie:

HARTMANN – RICO spol. s r.o.  
Einsteinova 24  
851 01 Bratislava  
tel.: +421 268 299 160  
fax: +421 268 299 192  
e-mail: [odbyt.sk@hartmann.info](mailto:odbyt.sk@hartmann.info)  
[www.hartmann.sk](http://www.hartmann.sk)



**O krok ďalej  
pre zdravie**