



Zavádění periferního žilního katétru

Standardní ošetřovatelský postup

Periferní žilní kanylace je invazivní zákrok, s nímž jsou spojena rizika infekce. Proto je nutné věnovat této problematice pozornost a minimalizovat tato rizika dodržováním správných postupů zavádění a ošetřování periferního žilního katétru.

<p>1 Vydezinfikujte si ruce</p>	<p>2 Připravte materiál a pacienta</p>	<p>3 Otevřete sterilní balení kanyly</p>	<p>4 Umístěte a utáhněte škrtidlo</p>
<p>5 Vydezinfikujte kůži</p>	<p>6 Dodržte expoziční dobu (nejméně 15 s)</p>	<p>7 Nepalpujte místo vpichu</p>	<p>8 Vydezinfikujte si ruce</p>
<p>9 Nasaďte si rukavice</p>	<p>10 Zaveďte kanylu</p>	<p>11 Sundejte škrtidlo a vytáhněte jehlu</p>	<p>12 Připojte sterilní spojku/infuzi</p>
<p>13 Překryjte místo vstupu sterilním krytím a zafixujte jej</p>	<p>14 Sundejte si rukavice</p>	<p>15 Vydezinfikujte si ruce</p>	<p>16 Vydezinfikujte kontaktní plochy</p>

ŠETŘETE SVŮJ ČAS A VYUŽIJTE PŘIPRAVENÉ SETY A DALŠÍ DOPORUČENÉ PRODUKTY



Univerzální Infuzní Set®

- 1× lepicí pásky
- 5× netkané kompresy 7,5 cm
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× rouška 37 × 45 cm



Infuzní Set Advanced®

- 1× lepicí pásky
- 1× konektor
- 1× škrtidlo
- 5× netkané kompresy 7,5 cm
- 1× bezpečnostní kanyla
- 1× fixační náplast Cosmopor IV
- 1× prodlužovací hadice
- 1× vyšetřovací rukavice
- 1× rouška 37 × 45 cm
- 1× předplněná stříkačka NaCl 10 ml



Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou.
500 ml



Bacillo!®

30 Sensitive Tissues

Utěrky napuštěné alkoholovým roztokem k dezinfekci povrchů.
Flow pack 80 ks