

PütterPro 2

2-lags kompressionssystem med visuel indikator

2-lags kompressionssystem for en effektiv og bekvem kompression. Begge bind er latexfri, hudvenlige og tillader huden at ånde. Efter applicering kan begge bind nemt rives over uden brug af saks. Kompressionbinden er markeret med en visuel indikator hvilket er en hjælp til anlæggelse af forbindingen for at opnå en behandlingsmæssig effektiv kompression.



- 1 Visuel indikator for hjælp till rett kompression
- 2 Begge bind kan let tages af med hænderne
- 3 Kan sidde på i op til 7 dage

Fordel:

Effektiv kompression
Med visuel indikator
Tyndt og bekvemt
Kan sidde i op til 7 dage
Latexfri



Egenskaber

2-lags kompressionssystem bestående af et kortstræks-polsterbind med en latexfri, kohæsitiv belægning på den ene side og et langstræks-kompressionsbind med latexfri kohæsitiv belægning på begge sider, for at bindene skal kunne sidde sikkert uden at glide. Den visuelle indikatoren er en hjælp til anlæggelse af forbindningen for at opnå en behandlingsmæssig effektiv kompression. Bindene er lette at applicere og sidder sikkert i op til 7 dage.

Materiale

Polsterbindet består af 92% polyester og 8 % elasthan med latexfri belægning på den ene side.

Elasticitet er ca. 80%.

Kompressionsbindet består af 85% polypropylen og 15% elasthan med latexfri belægning på begge sider.

Elasticitet er ca. 150%

Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Ved kronisk venøs insufficiens med og uden ulcus cruris venosum, trombosflebitis, varicose samt kronisk ødemer af anden oprindelse. Kan anvendes på patienter med et ABPI på 0,8-1,3.

PütterPro 2 må ikke anvendes i tilfælde af:

- Fremskreden periferokklusiv arteriel sygdom
- Dekompenseret hjerteinsufficiens
- Phlegmasia coerulea dolens
- Ankel-brakial-indeks $> 1,3$ og $\leq 0,5$
- Septisk flebitis

Applikering

Instruktion for anlæggelse er inkluderet i hver produktpakke.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
PütterPro 2 1 sæt i æske	10 cm x 6,5 m	931 685	1 sæt	12 Afp
	10 cm x 8,2 m			
PütterPro 2 6 sæt i æske	10 cm x 6,5 m	931 686	6 sæt	3 Afp
	10 cm x 8,2 m			