

# PütterPro 2

2-lagers kompressionssystem med visuell indikator

2-lagers kompressionssystem för en effektiv och bekväm kompression. Båda bindorna är latexfria, andningsbara och hudvänliga. Bindorna kan enkelt rivas av efter applicering. Kompressionsbindan är märkt med visuell indikator vilket hjälper till att ge korrekt sträckning och överlappning.



- 1 Visuell indikator för korrekt applicering
- 2 Båda bindorna kan enkelt rivas av för hand
- 3 Kan bäras upp till 7 dagar

## Fördelar:

Effektiv kompression  
Visuell indikator  
Tunn och bekväm  
Sitter upp till 7 dagar  
Latexfri



## Egenskaper

2-lagers kompressionssystem bestående av en kortsträckt polsterbinda med en latexfri kohesiv beläggning på ena sidan och en långsträckt kompressionsbinda med latexfri kohesiv beläggning på båda sidor, detta för att de båda bindorna skall kunna sitta säkert utan att glida. Kompressionsbindan är märkt med en visuell indikator om hjälper till att visa hur mycket man skall sträcka bindan samt hur mycket överlappning det skall vara per varv, allt för en korrekt applicering. Bindorna är enkla att applicera och sitter säkert upp till 7 dagar.

## Material

Polsterbindan består av 92% polyester och 8% elastane med latexfri beläggning på ena sidan. Elasticitet på ca 80%.

Kompressionsbindan består av 85% polypropylene och 15% elastane med latexfri beläggning på båda sidor. Elasticitet på ca 150%.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation

Vid kronisk venös insufficiens med och utan ulcus cruris venosum, trombos, lymfödem såväl som kronisk ödem. Är lämplig att använda på patienter med ett ABPI på 0,8-1,3.

Kompressionssystemet skall ej användas vid:

- Långt gången perifer arteriell ocklusiv sjukdom (om en av parametrarna är någon av följande:
  - Arm/ankelindex <0,5
  - Ankel arteriellt tryck <60 mmHg
  - Tåtryck <30 mmHg
- Dekompenserad hjärtsjukdom/insufficiens
- Painful blue inflammation eller även tillstånd som uppträder vid trombosjukdomar i benen
- I de fall arm/ankelindex ligger mellan >1,3 och <0,5
- Septisk flebit (inflammerade kärl med infektiösa inslag)

## Applicering

Lindningsinstruktion finns bifogad i varje produktförpackning.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
PütterPro 2 1 set i ask	10 cm x 6,5 m 10 cm x 8,2 m	931 685	1 set	12 Afp
PütterPro 2 6 set i ask	10 cm x 6,5 m 10 cm x 8,2 m	931 686	6 set	3 Afp