


Atrauman®

Salvkompress

Vid såromläggningar finns en risk att sår-
bädden rivs upp gång på gång. Detta
orsakar smärta som kan leda till ovilja hos
patienten att byta förband. För att förhin-
dra detta används Atrauman salvkompress
som kan kombineras med flera olika typer
av förband för att förhindra vidhäftning.
Atrauman innehåller triglycerider som
skyddar såret mot uttorkning samt skyddar
sårets friska kanter. Salvkompressen tillåter,
genom sitt finmaskiga nät, vätska att trän-
ga igenom från såret upp i det sekundära
förbandet.

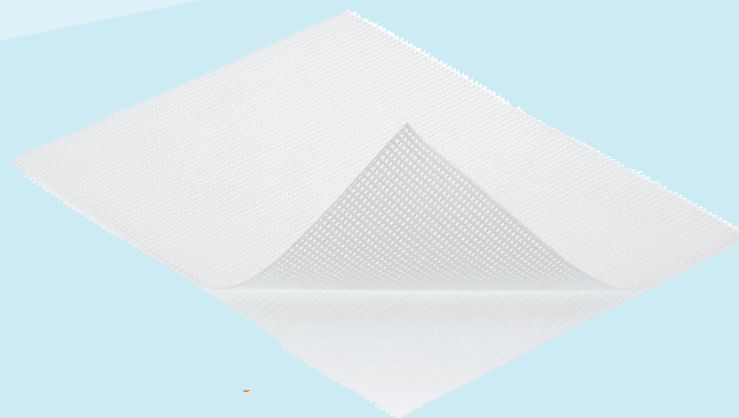

- 1 Många användningsområden
- 2 Förhindrar vidhäftning
- 3 Skyddar sårkanterna

Fördelar:

Icke vidhäftande
Hög patientkomfort
Ekonomisk
Skyddar såret
Många användningsområden
Vårdar sårkanterna



Egenskaper

Den tunna mjuka väven av hydrofoba polyesterfibrer har en slät ytstruktur som förhindrar att nybildad vävnad växer in i kompressen. På så sätt motverkas tendensen att kompressen fastnar i såret. Inga salvrester lämnas kvar i såret vilket underlättar rengöring och bedömning av sårets tillstånd. Atrauman håller sårytan och dess kanter smidiga och skyddar såret mot uttorkning. Salvmassan är gaspermeabel och genomsläpplig för exsudat. Detta gör att exsudat snabbt kan transporteras från såret. För att absorbera överflödigt exsudat bör ett absorptionsförband appliceras i kombination med Atrauman. Eftersom salvan saknar verksamma ämnen kan den även användas inom dermatologin, samt för läkemedelskänsliga och patienter med känslig hud. Terapeutiskt verksamma substanser kan tillsättas efter läkarens bedömning. Atrauman bör bytas vid varje sårömläggning om läkare ej ordinerar annat.

Material

Väv av hydrofob polyester, impregnerad med en salvmassa utan verksamma ämnen. Salvan innehåller: fettsyror (triglycerider) och kokosolja. **Salvan är inte sensibiliserande och innehåller inga tillsatser av vaselin, lanolin eller paraffin.**

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation och applicering

Till atraumatisk sårbehandling i sårhäkningsens alla faser vid t.ex. skrapsår, bensår, trycksår, mindre brännskador, strålskador, abscesser, hudtransplantationer och vid nagelextraktioner.

Kontraindikationer: Inga kända.

Eftersom Atrauman inte fäster mot huden kan det vara svårt att fixera den exempelvis på undersidan av benet. Enklaste sättet är att först lägga salvkompressen på det sekundära förbandet och därefter applicera båda mot såret. Om inget sekundärt förband behövs kan salvkompressen exempelvis fixeras med en gasbinda.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Atrauman®	5 x 5 cm	499 510	10 st	40 Afp
Steril, enstycksförpackad	7,5 x 10 cm	499 513	10 st	20 Afp
	20 x 30 cm	499 515	10 st	3 Afp
	10 x 20 cm	499 536	30 st	5 Afp
	5 x 5 cm	499 550	50 st	16 Afp
	7,5 x 10 cm	499 553	50 st	8 Afp