



Hydrosorb/ Hydrosorb comfort Pansament cu hidrogel

Instrucțiuni de utilizare

Hydrosorb/ Hydrosorb comfort este un pansament transparent cu hidrogel format dintr-un corp absorbant de gel poliuretanic și o peliculă poliuretanică permeabilă pentru gaze și vapori și impermeabilă pentru germeni și lichide.

Hydrosorb comfort este prevăzut cu o margine autoadezivă și nu necesită folosirea altor materiale de fixare.

Proprietăți și mod de acțiune

Hydrosorb/ Hydrosorb comfort absoarbe secrețiile și asigură umiditate plăgii. Menținerea unui mediu umed la nivelul plăgii stimulează procesele de vindecare. Hydrosorb/ Hydrosorb comfort este un pansament transparent care nu aderă de plagă și care poate fi îndepărtat fără a lăsa reziduuri. Datorită transparenței materialului inspecția plăgii poate fi efectuată fără a îndepărta pansamentul. La schimbarea pansamentului nu este necesară clătirea plăgii.

Indicații

Pentru toate tipurile de plăgi superficiale, în faza de granulație și epitelizare. Poate fi de asemenea utilizat pentru hidratarea și "înmuierea" țesutului necrotic.

Mod de aplicare

Selectați dimensiunea adecvată, asigurându-vă că pansamentul depășește cu aprox. 1-2 cm marginile plăgii. Îndepărtați folia albastră de protecție de pe spatele produsului, aplicați Hydrosorb/ Hydrosorb comfort pe plagă apăsând ușor și fixați. Pentru o fixare sigură în zona încheieturilor faceți incizii în marginea autoadezivă și suprapuneți părțile rezultate.

Pentru a facilita documentarea exactă a procesului de vindecare, pansamentul este prevăzut cu o etichetă autoadezivă pentru mențiuni. Scrieți data și numele pacientului și trasați conturul plăgii cu un marker. Dezlipiți cu grijă eticheta autoadezivă de pe pansament, îndepărtați folia de protecție și lipiți eticheta pe foaia de urmărire a pacientului. (Vezi pictograme pe verso)

Pe măsură ce cantitatea de exsudat se diminuează, durata de menținere pe plagă a Hydrosorb/ Hydrosorb comfort poate fi extinsă până la șapte zile. Absorbția exsudatului se manifestă printr-o opacizare a pansamentului. Hydrosorb/ Hydrosorb comfort trebuie schimbat în momentul în care zona opacă se extinde și atinge dimensiunile plăgii. Pentru schimbul pansamentului dezlipiți ușor unul dintre colțuri și îndepărtați cu grijă de pe plagă.

Efecte secundare

Nu au fost observate sau raportate efecte secundare.

Incompatibilități

În cazuri rare Hydrosorb/ Hydrosorb comfort poate cauza iritații ale pielii.

Contraindicații

A nu se utiliza în cazul plăgilor clinice infectate și a arsurilor de gradul trei.

Precauții speciale

Înainte de a trata o plagă cu evoluție cronică (vindecare întârziată) este necesară evaluarea medicală și stabilirea etiologiei plăgii. Tratatamentul cu Hydrosorb/ Hydrosorb comfort nu poate suplini tratamentul afecțiunii care a determinat cronicizarea plăgii.

Instrucțiuni generale

Păstrați la temperaturi sub 40° C. Conținut steril dacă ambalajul nu este deteriorat. A nu se resteriliza. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.

Forme de prezentare

Hydrosorb

5 x 7,5 cm

10 x 10 cm

20 x 20 cm

Hydrosorb comfort

7,5 x 10 cm

12,5 x 12,5 cm

cutie cu 5 pansamente

cutie cu 5 pansamente

cutie cu 3 pansamente

cutie cu 5 pansamente

cutie cu 5 pansamente

Producător

PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim
Germania

Importator

SC PAUL HARTMANN SRL
Str. Arany Janos nr 46, etaj 1
RO-540 045 Târgu Mureș

Hydrosorb



Hydrosorb comfort

