

Hydrofilm®

Transparent sårfilm

Hydrofilm är ett sterilt självhäftande transparent sårförband som skyddar mot bakterier, yttre kontaminering samt mekanisk irritation och torra sår. Hydrofilm har en hög användarkomfort och filmen anpassar sig efter kroppens konturer. Hudvänlig och enkel att hantera.



1 Vattentät och ogenomtränglig för bakterier

2 Andas

3 Transparent

Fördelar:

Säkert sårskydd
Enkel hantering
Hög användarkomfort
Kan användas vid dusch och bad
Transparent



Egenskaper

Tack vare den tunna, transparenta filmen kan såret hållas under uppsikt utan att förbandet behöver bytas. Denna egenskap gör att såret inte behöver störas i onödan under läkningsprocessen. Eftersom Hydrofilm stänger ute både vatten och bakterier minimeras risken för sekundärinfektioner. Det fungerar också utmärkt att bära förbandet vid bad och dusch. Hörnen på Hydrofilm är rundade för att förbandet ska sitta stadigt på plats under en längre tid. Förbandet kan sitta på upp till 5 dagar, det är dock sårets och hudens kondition som avgör användningstiden. Filmen har en mycket tydlig fixeringsinstruktion. Genom att följa numreringen från 1-4 så kan förbandet fixeras på ett enkelt sätt. Det går utmärkt att applicera filmförbandet med handskar på.

Material

Polyuretanfilm med hypoallergen häftmassa av akrylat. Kolofoniumfri. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIa, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Används som ett sterilt självhäftande transparent sårförband som skyddar mot bakterier, yttre kontaminering samt mekanisk irritation och torra sår. Används även som fixering av katetrar och kanyler. Kontraindikationer: Hydrofilm ska inte användas på infekterade, blödande eller vätskande sår.

Fixeringsinstruktioner

Huden måste vara torr vid fixering.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® Steril, enstycksförpackad	6 x 7 cm	685 755	10 st	20 Afp
	10 x 12,5 cm	685 757	10 st	20 Afp
	10 x 15 cm	685 759	10 st	10 Afp
	15 x 20 cm	685 761	10 st	10 Afp
	20 x 30 cm	685 765	10 st	10 Afp
	10 x 25 cm	685 763	25 st	10 Afp
	12 x 25 cm	685 764	25 st	10 Afp
	10 x 15 cm	685 760	50 st	10 Afp
	15 x 20 cm	685 762	50 st	10 Afp
	6 x 7 cm	685 756	100 st	10 Afp
	10 x 12,5 cm	685 758	100 st	10 Afp