

Korsolex[®] PRÊT À L'EMPLOI READY TO USE

Desinfecção manual de instrumentos



Desinfectante de alto nível para instrumentos e endoscópios, pronto a utilizar.

Korsolex® PRÊT À L'EMPLOI READY TO USE

Propriedades do produto

- pronto a utilizar
- inactivação efectiva de todos os microrganismos
- desinfectação rápida
- excelente compatibilidade com os materiais
- fácil de utilizar, sem necessidade de activador

Korsolex® prêt à l'emploi / Korsolex® ready to use é um produto altamente adequado para a desinfectação de todos os tipos de instrumentos termo-resistentes e termo-sensíveis. Não é necessário diluir a solução antes de utilizar. A associação equilibrada do glutaraldeído com os compostos adjuvantes potencia a actividade da substância activa. Esta formulação é estável durante vários anos e não tem de ser activada antes de utilizar. Assim, Korsolex® prêt à l'emploi / Korsolex® ready to use é extremamente simples para o utilizador.

Composição

Substância activa em 100 g: Glutaral 2,1 g.
Outros ingredientes: Inibidores da corrosão, solventes, surfactantes, fragrâncias.

Actividade microbiológica

Bactericida, leveduricida, fungicida, tuberculicida, esporicida, virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH e VHC), virucida.

Áreas de aplicação

Desinfectação e esterilização de:

- instrumentos termo-resistentes e termo-sensíveis
- endoscópios, bem como laparoscópios
- equipamento de anestesia, tubos, máscaras, etc.

Instruções de utilização

■ Procedimento para o banho de imersão

Assegure-se de que todas as superfícies e aberturas dos instrumentos estão completamente imersas em Korsolex® prêt à l'emploi / Korsolex® ready to use. Dê particular atenção à limpeza e desinfectação dos sistemas de canais: os canais de biópsia bem como os canais de ar e de lavagem, os recipientes de armazenamento das soluções de lavagem e a tubagem relevante.

■ Banho de ultra-sons

Korsolex® prêt à l'emploi / Korsolex® ready to use pode ser utilizado em todos as tinas para banhos de ultra-sons em aço inoxidável. Assegure-se de que é cumprido o tempo de exposição aos ultra-sons recomendado pelo fabricante dos instrumentos (normalmente 5 minutos). Para uma desinfectação adequada, siga os tempos de exposição apresentados na tabela de dosagem.

■ Fase de enxaguamento

Após a desinfectação, enxágue abundantemente com água desmineralizada ou água que deverá ser, no mínimo, potável e seque o instrumento.

■ Armazenamento

Guarde os endoscópios apenas quando estiverem secos e proteja-os de uma eventual recontaminação até que sejam reutilizados!

■ Prazo de utilização

Se forem desinfectados instrumentos pré-lavados, a solução pode ser utilizada durante um período até 28 dias. A solução Korsolex® prêt à l'emploi / Korsolex® ready to use, dentro da embalagem fechada, tem um prazo de validade de 3 anos após a data de produção. O prazo de validade está especificado em todos os garrações de 5 litros.

Dose recomendada

Microrganismos	tempo de exposição /concentração				
	3 min	5 min	10 min	45 min	2 h
Bactericida (EN 1040)		conc.			
Leveduricida/ Fungicida (EN 1275)		conc.			
Tuberculicida (NF T 72 190)			conc.		
Virucida contra vírus encapsulados (incluindo VHB, VIH e VHC)	conc.				
Virucida (NF T 72 180)			conc.		
Esporicida (NF T 72 230) 3 log				conc.	
5 log					conc.

Certificação - listagem

Rótulo CE de acordo com a directiva relativa aos dispositivos médicos (DDM).

Dados físico-químicos

Aspecto	líquido límpido amarelo claro
pH	aprox. 4,5
Densidade (20 °C)	aprox. 1,01 g/cm ³
Índice de refração n _D ²⁰	aprox. 1,34

Apresentação

Garração de 5 litros.

Rótulo da solução: **Xn** Nocivo. Contém: Glutaral. Nocivo por inalação e ingestão. Irritante para as vias respiratórias e para a pele. Risco de lesões oculares graves. Pode provocar sensibilização através da inalação e do contacto com a pele. Não respire os vapores/aerossóis. Evitar o contacto com a pele. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente com bastante água e consulte um médico. Utilize luvas e protecção ocular/facial adequadas.

As recomendações relativas aos nossos produtos são baseadas em testes científicos e prestadas de boa fé. É possível obter informações mais pormenorizadas, por exemplo relativas à compatibilidade com os materiais, apenas em casos particulares. As nossas recomendações não são obrigatórias e não constituem uma garantia. Não excluam quaisquer testes que uma empresa possa realizar por si própria relativamente à finalidade e ao procedimento pretendido. Não podemos aceitar qualquer responsabilidade a este respeito. Isto está de acordo com as nossas condições gerais de venda e fornecimento.

06-08