

Hydrofilm®

Transparent sårfilm

Hydrofilm er en steril selvklæbende transparent sårforbinding, der beskytter mod bakterier, ydre kontaminering samt mekanisk irritation og tørre sår. Hydrofilm har en høj brugerkomfort og filmen tilpasser sig kroppens konturer. Hudvenlig og enkel at håndtere.




1 Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier

2 Åndbar

3 Transparent

Fordele:

Sikker sårbeskyttelse
Enkel håndtering
Høj brugerkomfort
Kan anvendes vid bad og brusebad
Transparent

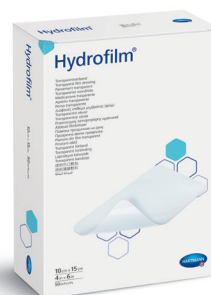

Egenskaber

Takket være den tynde transparente film kan såret holdes under observation, uden at man behøver at skifte forbindingen. Denne egenskab gør, at man ikke behøver at forstyrre såret unødigt under helingsprocessen. Eftersom Hydrofilm holder både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Det er således også muligt at tage bad og brusebad. Hjørnerne på Hydrofilm er rundede, for at forbindingen skal blive siddende på plads. Anvendelsestiden afhænger af sårtypen og dets tilstand, kan sidde på plads up til 5 dage. Filmen har en meget tydelig fikseringsinstruktion. Ved at følge nummereringen fra 1-4 kan forbindingen fikseres på enkel vis. Filmforbindingen lader sig udmærket applikere med handsker på.

Materiale

Polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Anvendes som en steril selvklæbende transparent sårforbinding, der beskytter mod bakterier, ydre kontaminering samt mekanisk irritation og tørre sår. Bruges også som fiksering. F.eks. til kateter- og kanylefikseringer.

Kontraindikationer: Hydrofilm må ikke anvendes på inficerede, blødende eller væskende sår.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når filmen fikseres.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® Steril, pakket enkeltvis	6 x 7 cm	685 755	10 stk	20 Afp
	10 x 12,5 cm	685 757	10 stk	20 Afp
	10 x 15 cm	685 759	10 stk	10 Afp
	15 x 20 cm	685 761	10 stk	10 Afp
	20 x 30 cm	685 765	10 stk	10 Afp
	10 x 25 cm	685 763	25 stk	10 Afp
	12 x 25 cm	685 764	25 stk	10 Afp
	10 x 15 cm	685 760	50 stk	10 Afp
	15 x 20 cm	685 762	50 stk	10 Afp
	6 x 7 cm	685 756	100 stk	10 Afp
	10 x 12,5 cm	685 758	100 stk	10 Afp