

Hydrofilm® Plus

Transparent sårfilm med absorptionspude

Hydrofilm Plus er en selvhæftende transparent filmforbinding med en absorberende sårpude, som ikke fæstner i såret. Den semipermeable film tillader såret at trække vejret, mens det beskytter mod vand og bakterier. Hydrofilm Plus har en høj brugerkomfort og filmen tilpasser sig kroppens konturer udvenlig og enkel at håndtere.



1 Vandtæt og uigennemtrængelig for bakterier

2 Åndbar

3 Absorberende sårpude

Fordele:

Sikker sårbeskyttelse
Enkel håndtering
Høj brugerkomfort
Kan anvendes ved bad og brusebad



Egenskaber

Takket være den tynde transparente film kan huden rundt om sårpuden inspiceres, uden at man behøver at skifte forbindingen. Gennem den hvide sårpude er det også muligt at se, hvordan eksudatet absorberes, og hvornår det er tid til at skifte forbindingen. Disse egenskaber gør, at man ikke behøver at forstyrre såret unødigt under helingsprocessen. Eftersom Hydrofilm Plus holder både vand og bakterier ude, minimeres risikoen for sekundærinfektioner. Det lader sig også sagtens gøre at tage bad og brusebad med forbindingen på. Hjørnerne på Hydrofilm Plus er rundede, for at filmen skal blive siddende på plads. Anvendelsestiden afhænger af sårtypen og dets tilstand, kan sidde på plads up til 5 dage

Materiale

Semipermeabel polyuretanfilm med hypoallergen klæber af akrylat. Absorptionspude af viskosefibrer dækket med et polyetylenet. Kolofoniumfri. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIa, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

Anvendes som steril selvblæbende transparent sårforbinding med absorberende sårpude. Til postoperativ sårpleje, let væskende sår og beskytter mod bakterier.

Kontraindikationer: Hydrofilm Plus må ikke anvendes på inficerede eller stærkt blødende sår samt på sår med en høj eksudatmængde.

Fikseringsinstruktioner

Huden skal være tør, når filmen fikseres.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr.	Afp	Tfp
Hydrofilm® Plus Steril, pakket enkeltvis	9 x 15 cm	4 x 11 cm	685 775	25 stk	10 Afp
	10 x 12 cm	5 x 8 cm	685 776	25 stk	10 Afp
	10 x 20 cm	5 x 16 cm	685 778	25 stk	10 Afp
	10 x 25 cm	5 x 20 cm	685 779	25 stk	10 Afp
	10 x 30 cm	5 x 25 cm	685 780	25 stk	10 Afp
	5 x 7,2 cm	2,5 x 4 cm	685 771	50 stk	10 Afp
	9 x 10 cm	4 x 6 cm	685 773	50 stk	10 Afp