


Ligasano®

Polyuretanskum til trykaflastning

Ligasano er en trykaflastende og aktivt oprensende forbindelse af polyuretanskum. Forbindingen er helt luftgennemtrængelig, hvilket gør, at der ikke akkumuleres fugtighed og varme mod huden, og huden således holder en normal temperatur. Ligasano anvendes i forebyggende øjemed og ved allerede eksisterende tryksår, som opstår, når hud og væv udsættes for konstant tryk, samt ved utilstrækkelig eller udebliven blodcirkulation i længere eller kortere tid. Stoppes cirkulationen tilstrækkelig længe, dør et antal celler, og blodgennemstrømningen får endnu sværere ved at vende tilbage. Indenfor nogle dage falder de døde celler sammen, og tryksåret er en realitet.

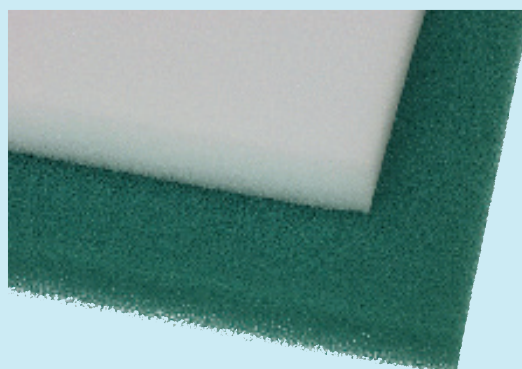

1 Høj absorptionsevne

2 Trykaflastende

3 Enkel håndtering

Fordele:

Høj absorptionskapacitet
Mange anvendelsesområder
Luftgennemtrængelig
Enkel håndtering
Let at klippe og forme
Økonomisk
Kan steriliseres



Egenskaber

LIGASANO som oprensende forbindelse absorberer 15-20 gange sin egen vægt. Absorptionen sker vertikalt og mindsker dermed risikoen for maceration af det raske væv omkring sårets kanter. LIGASANO anvendes først og fremmest til væskende og inficerede sår f.eks. bensår, diabetessår, tryksår og brandsår samt forebyggende mod svampeinfektioner. LIGASANO findes også som tampon og kan formes til at fylde ud i sårhuller og fistler. Ved tamponering i fistler skal der anvendes et helt stykke og ikke flere mindre stykker. Grunden dertil er, at man skal være sikker på, at man får det hele med, når man fjerner materialet. LIGASANO trykaflastning giver en jævn trykfordeling og er helt åndbar. Der akkumuleres ikke fugtighed og varme mod huden, hvilket bidrager til at opretholde en normal kropstemperatur. Yderstrukturen mindsker sugeeffekten i vævslaget og mindsker friktionen mod huden. Risikoen for iskæmi (utilstrækkelig blodtilførsel) mindskes og derved forekomsten af tryksår. Den grønne klimaplade anvendes altid i kombination med den hvide plade. Klimapladen må aldrig lægges direkte mod huden. Forbindings-skiftfrekvensen afhænger af sårets sekretion. Forbindingen bør dog aldrig sidde længere end 3 dage.

Materiale

LIGASANO er lavet af opskummet polyuretan. Den hvide plade har mindre porer end den grønne, som har en grovere struktur og højere luftgennemtrængelighed. Produktet skal ikke opbevares i direkte sollys, da det så bliver gulligt og skrøbeligt.

PAUL HARTMANN A/S
Ørestads Boulevard 73
2300 København
T. 48 22 04 00
F. 48 22 04 01
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info
www.hartmann.info

LIGASANO kan steriliseres i autoklave ved 134°C i 4 min. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, CE-mærket ifølge CE 1275 alt. CE 0125.

Indikation og Tips

Trykaflastning i forebyggende øjemed samt ved allerede dannede tryksår. Eksempler på anvendelsesområder: Mellem fingre og tæer, under brysterne, i lysken, på hænder med kontrakturer, sacrum m.m. Kan også anvendes ved forbindings-skift.

Kontraindikationer: Den grønne klimaplade bør ikke anvendes direkte mod huden.

LIGASANO kan klippes og formes til alle mulige konturer. Du finder mange tips i vores "Klippeguide".

Patientens vægt afgør, hvilken tykkelse aflastning, som er passende. Anbefalet tykkelse på trykaflastning:

Patientvægt	Tykkelse ved sacrum	Tykkelse ved hæl
Under 45 kg	2 cm	1 cm
Optil 75 kg	mindst 3 cm	2 cm
Over 75 kg	mindst 4 cm	3 cm

For at kontrollere om aflastningen er tilstrækkelig kan man lægge hånden mellem underlaget og LIGASANO og kontrollere, at ingen af kroppens konturer kan mærkes.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
LIGASANO® kompresser Renhedsgrad REN, i æske	15 x 15 x 1 cm	8821 444	10 stk	9 Afp
	15 x 15 x 2 cm	8821 445	5 stk	9 Afp
	24 x 16 x 1 cm	8821 440	10 stk	5 Afp
LIGASANO® tamponadebind	3 m x 5 x 0,3 cm	8821 449	8 stk	12 Afp
LIGASANO® trykaflastning Renhedsgrad REN, hvid	49 x 59 x 1 cm	8821 454	14 stk	6 Afp
	49 x 59 x 2 cm	8821 452	7 stk	6 Afp
	200 x 50 x 2 cm	8821 461	1 stk	6 Afp
	200 x 100 x 1 cm	8821 460	2 stk	5 Afp
	200 x 100 x 2 cm	8821 458	4 stk	4 Afp
LIGASANO® klimaplade Renhedsgrad REN, grøn	55 x 45 x 2 cm	8821 462	7 stk	4 Afp