


# PermaFoam®/

# PermaFoam® comfort

Polyuretanskumforbinding med specialformer

PermaFoam anvendes i rensningsfasen samt den tidlige granulationsfase i sårhelingen. Der opstår problemer, hvis disse faser trækker ud, og eksudatet, som i begyndelsen fremmede sårhelingen, begynder at give modsat effekt og forårsager skader rundt om såret og modarbejder helingsprocessen. En god eksudathåndtering skal tilsikre, at eksudatoverskuddet ledes væk fra såret. Det er tillige vigtigt, at forbindingskiftene ikke er for hyppige og forstyrrer sårhelingen, da dette kan føre til fornyet bakteriekontaminering.

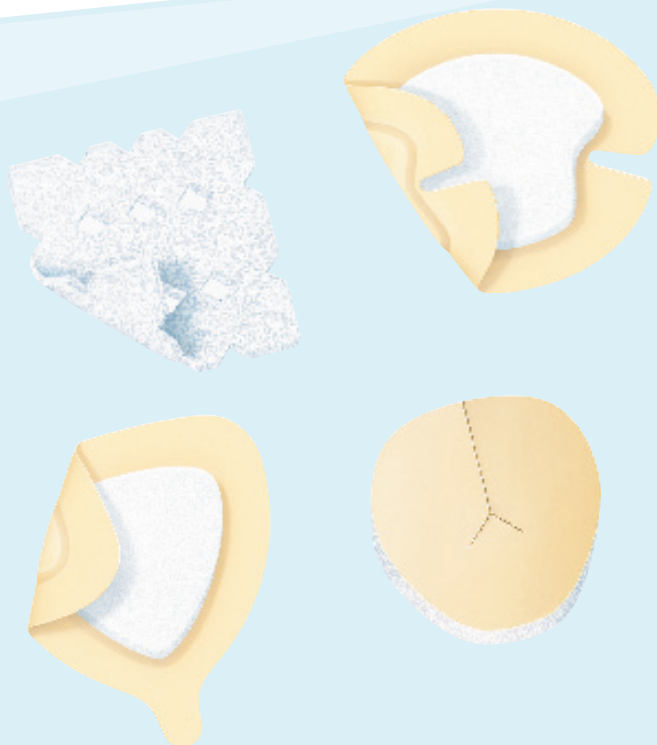

1 PermaFoam cavity

2 PermaFoam sacral

3 PermaFoam concave

4 PermaFoam tracheostomi

## Fordele:

Høj absorptionskapacitet  
Enkel håndtering  
Blød og komfortabel  
Økonomisk  
Beskytter såret  
Mange former



## Egenskaber

Forbindingen findes i to udgaver med eller uden klæbekant. Udgaven med klæbekant har tilnavnet komfort. Store åbne porer (400-1000 µm mod såroverfladen giver en høj absorptionskapacitet af større partikler, såsom bakterier, cellerester og langsomtflydende eksudat. Bakterier har en størrelse på 1-5 µm. Det semipermeable yderlag består af små lukkede polyuretanporer. Den gradvise poreformindskning minimerer risikoen for maceration ved, at absorberet eksudat bibeholdes højt oppe i forbindingen. Det bløde materiale mindsker risikoen for, at forbindingen skal fæstne i såret og sikrer smertefrie forbindingsskift. Den vertikale absorption forhindrer spredning af absorberet eksudat sidevers, og forbindingen kan derfor med fordel anvendes under kompression (testet op til 42 mmHg).

## Materiale

Forbindingen består af polyuretan. PermaFoam komfort har en akrylatbaseret klæber. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse IIb, steril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC

## Indikation

Til rensning og stimulering af den tidlige granulation. Til behandling af middel og svært væskende sår, f.eks. bensår og tryksår. Ved venøse bensår i kombination med kompression. Ved forbrændinger op til 2. grad.

### Kontraindikationer:

PermaFoam og PermaFoam komfort må ikke anvendes på områder med fritliggende knogler, muskler og sener, ved klinisk inficerede sår, svampeinfektioner eller 2 og 3 grads forbrændinger.

## Specifikke informationer

PermaFoam og PermaFoam komfort bør ikke anvendes samtidig med oxidationsmidler som f.eks. hypokloridopløsninger eller brintoverilte, da skummet kan skades derved.

Såfremt der er behov for at anvende oxidationsmidler, kan såret renses med Ringeropløsning eller saltopløsning efter behandling. Derefter kan PermaFoam applikeres.

PAUL HARTMANN A/S  
Arne Jacobsens Alle 7, 5.s.  
Center Boulevard  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

www.dk.hartmann.info  
www.hartmann.info

Sortiment	Størrelse	Sårpude	Varenr.	Afp	Tfp
PermaFoam® Steril, pakket enkeltvis	10 x 10 cm		409 425	3 stk	12 Afp
PermaFoam® cavity PermaFoam® tracheostomi	8 x 8 cm		409 426	10 stk	6 Afp
PermaFoam® comfort Steril, pakket enkeltvis	18 x 18 cm	11 x 9,5 cm	409 422	3 stk	6 Afp
PermaFoam® sacral	22 x 22 cm	14,5 x 12,5 cm	409 423	3 stk	6 Afp
PermaFoam® concave	16,5 x 18 cm	10,5 x 12 cm	409 424	3 stk	6 Afp