


# Pütter<sup>®</sup>binde

Lavelastisk kompressionsbind

Kompression er mange gange en forudsætning for, at et sår kan hele. Ønsker man at opnå en kraftig kompression med et højt arbejdstryk og et lavt hviletryk, kan man med fordel anvende Pütterbind. Det kraftige væv yder kompression, selvom hævelsen i benet aftager noget i omfang.

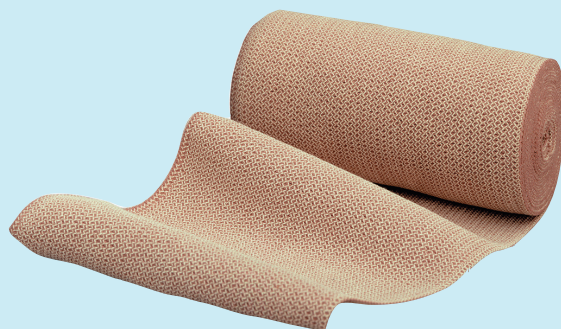

- 1 Yder kraftig kompression med højt arbejdstryk og lavt hviletryk
- 2 Fungerer ligegyldigt hvilken forbindelsesteknik, du ønsker at anvende
- 3 Kan vaskes ved 95°C

## Fordele:

Mærket med vaskeråd  
Mærket med produktnavn  
God holdbarhed  
Åndbar  
Latexfri



## Egenskaber

Den kraftige vævskvalitet gør det muligt at lægge utrolig holdbare forbindinger med en varig kompressionsvirkning. Eftersom kortstræksbind desuden tilpasser sig det ændrede benomfang, når ødemer svinder ind, kan Pütterbind blive siddende i op til 3 dage, undtagen ved meget kraftige hævelser, hvor benets omfang mindskes væsentligt og bindet således risikerer at glide ned.

## Materiale

100% bomuld. Bindet er helt latexfrit.  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.  
Udstrakt længde: 5 m.  
Uudstrakt længde: Ca. 2,6 m.  
Elasticitet: 90%

## Indikation og applikering

Ved alle akutte og kronisk venøse ødemer, venøse bensår og thromboplebitis. Efter injektionsbehandling af åreknuder.

Kontraindikationer:

Arteriel okklusionssygdom.

Bensår med arteriel oprindelse.

Bør ikke anvendes til sengeliggende og rullestolsbundne patienter. Kun til oppegående patienter, eftersom det kræver muskelarbejde at forbedre blodgennemstrømningen og opnå en effekt af forbindingen.

En forbindingsinstruktion følger med alle pakninger, med den kan også bestilles separat. Den bedste tid at forbinde på er om morgenen. Den bedste effekt opnås ved at polstre. Opfordre patienten til at bevæge fødderne når denne sidder stille.

## Vaskeråd

Pütterbind kan steriliseres i autoklave ved 134°C samt vaskes ved 95°C op til 15 gange. For at forlænge bindets levetid skal det tørre vandret efter vask og rulles stramt, når det ikke er i brug. Alle bind er mærkede med vaskeråd og produktnavn i begge ender.



PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Pütter® binde	5 m x 6 cm	931 806	10 stk	8 Afp
Løse i æske	5 m x 8 cm	931 814	10 stk	8 Afp
	5 m x 10 cm	931 815	10 stk	8 Afp
	5 m x 12 cm	931 816	10 stk	8 Afp
Pakket enkeltvis	5 m x 8 cm	931 808	1 stk	40 Afp
	5 m x 10 cm	931 810	1 stk	40 Afp
	5 m x 12 cm	931 812	1 stk	60 Afp