

# Pütter<sup>®</sup>-haft

Kohæsiv lavelastisk kompressionsbind

Pütter-haft er et beige, kohæsivt, lavelastisk kompressionsbind. Bindet muliggør en enkel applikering, som giver et højt arbejdstryk, hvilket leder til en påvirkning både af det overfladiske og det dybe venesystem.



- 1 Selvhæftende uden at fæstne på hud og hår
- 2 Åben vævsstruktur, som er åndbar
- 3 Behagelig at bære

## Fordele:

Behagelig at have på  
Ingen yderligere fiksering kræves  
Mange anvendelsesområder  
Åndbar  
Kraftig  
Kan genanvendes



## Egenskaber

Bindet er selvhæftende, men fæstner derimod ikke på hud, hår eller tøj. Produktets struktur gør, at det ikke glider ned. Bindets åbne vævsstruktur lader luft slippe igennem, og derved reduceres risikoen for maceration af huden. Pütter-haft er enkel at aplikere, eftersom den er blød og smidig. Er bindet for langt, så kan det sagtens lade sig gøre at klippe af det, uden at kanterne trævler op. Pütter-haft kan blive siddende ved røntgenundersøgelser, da det ikke hindrer strålingen. Normalt aftages bindet om natten og tages på igen om morgenen. For at opnå det bedste resultat bør især tynde ben polstres til normal størrelse, inden bindet påføres.

## Materiale

100% bomuld. Latexfri  
Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.  
Udstrakt længde: 5 m.  
Uudstrakt længde. Ca. 3,1 m.  
Elasticitet: 60%  
Pütter-haft kan steriliseres i autoklave ved 134°C.

## Indikation og tips

Til kraftig kompression ved kroniske venøse ødemer, uhelede bensår, tromboflebit eller som støtte ved amputationer, muskel- og ledbåndsskader. Til fiksering af forbindinger og gipsskinner. Sportbandage.  
Kontraindikationer: Arteriel okklusionssygdom.  
Overfølsomhed overfor latex.

Gem rullen, som bindet sidder på og rul det brugte bind tilbage derpå. Så er det nemmere at aplikere igen.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Pütter®-haft	5 m x 6 cm	931 840	1 stk	96 Afp
Pakket enkeltvis i æske	5 m x 8 cm	931 841	1 stk	72 Afp
	5 m x 10 cm	931 842	1 stk	64 Afp
	5 m x 12 cm	931 843	1 stk	48 Afp
	7 m x 20 cm	931 845	1 stk	10 Afp