


# Omnifix® elastic

Fikseringstape af non-woven

Fikseringstapen Omnifix elastic er et væv, som gør det nemmere at fikse forbindinger over store områder. Vævet beskyttelsespapir er kvadreret, således at det er nemt at måle, hvor stor en del, der behøves og siden at klippe af efter linieringen. Vævet kan både give og forhindre bevægelse, da vævet kun er elastisk på den ene led.

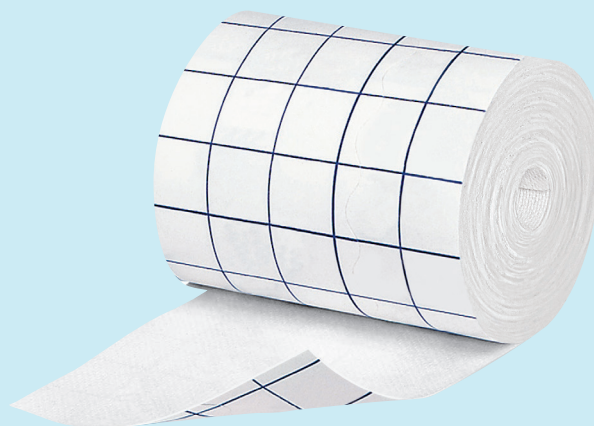

- 1 Til fiksering over store områder
- 2 Klippes til ønsket størrelse
- 3 Sikker fixering
- 4 Enkel at håndtere
- 5 Behøver ikke at fjernes inden røntgen
- 6 Kolofonium- og latexfrit

## Fordele:

Sikker fiksering  
Enkel håndtering  
Efterlader ingen klæberester  
Behøver ikke at fjernes inden røntgen  
Kolofonium- og latexfrit



## Egenskaber

Omnifix elastic er gennemtrængelig for luft og fugtighed, hvilket gør den særdeles hudvenlig og forhindrer maceration af huden. Vævet fæstner sikkert, men kan dog fjernes smertefrit uden at efterlade klæberester på huden. Omnifix elastic absorberer ikke røntgenstråler og behøver derfor ikke at fjernes inden røntgenundersøgelser.

Omnifix elastic er tværelastisk og smidig at fikse over f.eks. led, uden at der dannes folder.

Det er vigtigt at fikse vævet på den rette led, da en fiksering på den ene led giver mulighed for bevægelse, mens en fiksering på den anden led forhindrer bevægelse. Dette giver mulighed for ro og stabilitet hvis nødvendigt. Beskyttelsespapiret på bagsiden har en bølgeformet perforering, som gør, at det er nemt at fjerne.

## Materiale

100% polyestervæv med hypoallergen klæber baseret på syntetisk gummi, kolofonium- og latexfrit. Produktet er klassificeret som et medicinteknisk produkt, klasse I, usteril. CE-mærket ifølge EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation

Som forbindingsbeskyttelse og fiksering på store flader indenfor alle medicinske områder. Fiksering over led, koniske og runde kropsdele. Fiksering af måleinstrumenter, sonder, katetre eller lignende. Kontraindikationer: Ingen kendte.

## Fikseringsinstruktion

Huden skal være tør, når fikseringsvævet applikeres.

PAUL HARTMANN A/S  
Ørestads Boulevard 73  
2300 København  
T. 48 22 04 00  
F. 48 22 04 01  
E. info@dk.hartmann.info

[www.dk.hartmann.info](http://www.dk.hartmann.info)  
[www.hartmann.info](http://www.hartmann.info)

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
Omnifix® elastic Usteril, på rulle i æske	2 m x 10 cm	900 601	1 stk	64 Afp
	10 m x 2,5 cm	900 606	2 stk	63 Afp
	10 m x 5 cm	900 602	1 stk	63 Afp
	10 m x 10 cm	900 603	1 stk	36 Afp
	10 m x 15 cm	900 604	1 stk	24 Afp
	10 m x 20 cm	900 605	1 stk	18 Afp
	10 m x 30 cm	900 607	1 stk	12 Afp