


HydroClean® plus

Upprensande förband

HydroClean plus är ett aktivt sårupprende förband med en fuktig sårdyna som innehåller superabsorberande polymerer (SAP) med PHMB. HydroClean plus innehåller dessutom Ringer-lösning som spolar rent såret samtidigt som SAP:n i sårdynan absorberar och kapslar in sårsekret, t.ex. nekrotisk vävnad och MMP (metalloproteaser). På så vis förs material som kan hämma sårhäknings och orsaka sekundärinfektioner bort. Kärnan i de superabsorberande polymererna innehåller anti-septisk PHMB (polyhexametylenbiguanid) vilket ger en antibakteriell effekt och hämmar bakterietillväxt i absorptionsdynan. Tack vare denna egenskap kan HydroClean plus sitta på plats upp till 72 timmar.

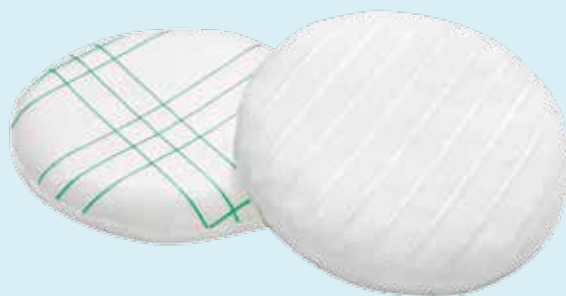

- 1 Skonsam upprende av kontaminerade sår
- 2 PHMB ger en antibakteriell effekt och hämmar ev. bakterietillväxt
- 3 Transporterar bort och kapslar in sårsekret
- 4 Kan användas under kompression upp till 35 mmHg
- 5 Fastnar ej i såret tack vare ytbelagda strängar av mjuk silikon
- 6 Kan sitta på plats i 72 timmar

Fördelar:

- Skonsam debridering
- Enkel hantering
- Hämmer sekundärinfektioner
- Kan användas i hemsjukvård
- Hälsoekonomisk
- Hämmer för stor mängd MMP
- Kan sitta på såret upp till 72 timmar



Egenskaper

HydroClean plus är en sterilförpackad kompress, aktiverad med Ringer-lösning och färdig att använda. Kompressen avger Ringer-lösning in i såret samtidigt som sårdynan absorberar sårsekret, på så sätt sker kontinuerlig spolning av såret. HydroClean plus kan sitta på plats i 72 timmar. Den grönrandiga ovansidan, som innehåller en vattenavvisande folie, bevarar sårets fuktighet samtidigt som den skyddar mot kontaminering utifrån. HydroClean plus cavity är avsedd för djupare sår och kan med fördel användas som tamponad med HydroClean plus som sekundärt förband. Även HydroClean plus cavity kan sitta på plats upp till 72 timmar.

Material

Ytskikt av specialstickad väv av polypropen-fibrer, superabsorbent med PHMB, polyacrylat, cellulosa och polypropen-fibrer aktiverad med Ringer-lösning. HydroClean plus har dessutom en kontaktyta som är belagd med silikonsträngar. Skyddsfolie av polypropen och gröna PP-trådar på ovansidan. Ringer-lösning består av natriumklorid, kalciumklorid och kaliumklorid. (NaCl, CaCl₂ x 2H₂O, KCl) Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC

Indikation och applicering

Upprensning av t.ex. bensår, diabetessår eller trycksår. Löser upp och avlägsnar nekrotisk vävnad och fibrinbeläggningar. Sår med dålig läkningsförmåga. Sår med hög exsudatmängd. Kan även användas på infekterade sår. Kontraindikationer: Inga kända.

Fixera enkelt med exempelvis Peha-haft Latexfri fixeringsbinda för att undvika vidhäftning mot redan skör hud. För att kännas bekvämare för patienten kan kompressen läggas oöppnad på en varm plats t.ex. i ljummet vatten, så att den når kroppstemperatur.

Särskilda upplysningar

HydroClean plus får inte klippas eller på annat sätt skadas mekaniskt. Hydroaktiv sårbehandling med Ringer-lösning leder inte till maceration av friska hudceller men kan få förhårdnader att svälla, vilket visar sig som vit beläggning. Sårkanterna kan med fördel vårdas med en fet salva. Såret blir normalt större i omfång innan all död vävnad är avlägsnad och läkningen startar. HydroClean plus får inte förvaras över 25°C.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
HydroClean® plus Steril, enstycksförpackad	Ø 4 cm	609 602	10 st	6 Afp
	Ø 5,5 cm	609 606	10 st	6 Afp
	7,5 x 7,5 cm	609 608	10 st	6 Afp
	10 x 10 cm	609 612	10 st	6 Afp
HydroClean® plus cavity	Ø 4 cm	609 622	10 st	6 Afp
	7,5 x 7,5 cm	609 628	10 st	6 Afp