


# PermaFoam®/

# PermaFoam® Comfort

Polyuretanskumförband

PermaFoam är framtaget för att användas i upprepningsfasen och den tidiga granulationsfasen i sårhäkning. Problem uppstår om dessa faser blir för långa och exsudatet, som från början påskyndade sårhäkningen, börjar ge motsatt effekt och orsakar skador på huden runt såret och motverkar läkningsprocessen. En bra exsudathantering måste säkerställa att överskottet av exsudat leds bort från såret. Det är också viktigt att förbandsbyten inte blir för täta och stör sårhäkningen, då detta kan leda till en förnyad bakteriekontaminering.

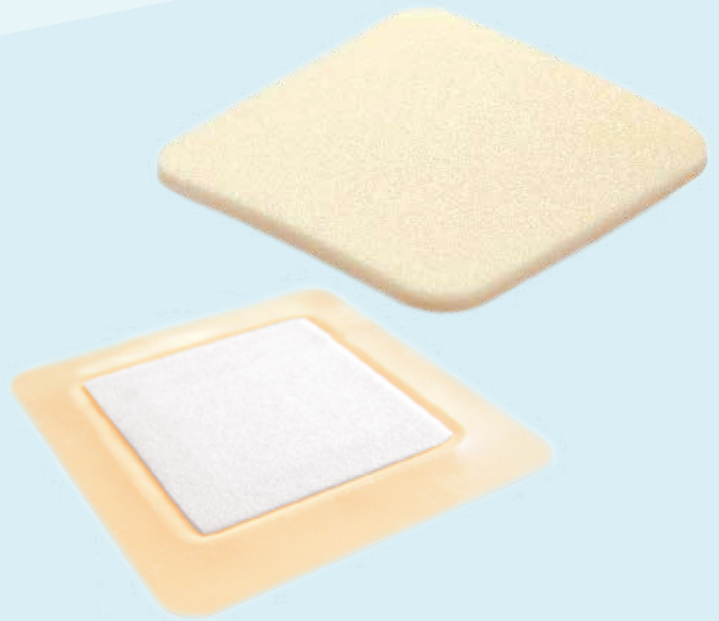

1 Hög absorptionsförmåga

2 Mjuk, polstrande

3 Finns även med häftkant

## Fördelar:

Hög absorptionskapacitet  
Enkel hantering  
Mjuk, patientkomfort  
Ekonomisk  
Skyddar såret  
Många storlekar



## Egenskaper

Förbandet finns i två versioner, med eller utan häftkant. Versionen med häftkant har tilläggsnamnet komfort. Stora öppna porer (400-1000 µm) mot sårytan ger hög absorptionskapacitet av större partiklar, såsom bakterier, cellrester och trögflytande exsudat. Bakterier har en storlek på 1-5 µm. Det semipermeabla ytskiktet består av små, slutna polyuretanporer. Den gradvisa porförminskningen minimerar risken för maceration genom att absorberat exsudat hålls kvar högt upp i förbandet. Det mjuka materialet minskar risken för att förbandet skall fastna i sårbedden och gör förbandsbyten smärtfria. Den vertikala absorptionen förhindrar spridning av absorberat exsudat i sidled, och förbandet används därför med fördel under kompression (testad upp till 42 mmHg). Förbandet kan sitta kvar på såret i flera dagar beroende på exsudatmängden i såret. Byte ska ske när det är kliniskt rekommenderat och när sekret syns vid kanten av förbandet. För att ta bort förbandet på bästa sätt kan det vara till hjälp att fukta det med saltlösning.

## Material

Förbandet består av polyuretan. PermaFoam komfort har en akrylatbaserad häftmassa. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

## Indikation och applicering

För upprepning och stimulering av den tidiga granulationen. Vid behandling av måttligt till rikligt vätskande sår, t.ex. bensår och trycksår. Vid venösa bensår i kombination med kompression. Brännskador. Kontraindikationer: PermaFoam och PermaFoam komfort får inte användas på områden med frilagda ben, muskler och senor, vid kliniskt infekterade sår, svampinfektioner eller brännskador av graden 2b och 3.

Förbandet ska appliceras så att ca 1-2 cm når utanför sårkanten. Ju större såret är desto mer bör förbandet överlappa sårkanterna. Vid behov kan förbandets storlek anpassas med en steril sax. Den vita sidan ska vara vänd mot såret och den beigefärgade, släta ovansidan ska vara vänd uppåt. PermaFoam fixeras med fixeringsbinda eller tubgas beroende på sårets placering. PermaFoam komfort fixeras med den integrerade häftkanten.

## Särskilda upplysningar

PermaFoam och PermaFoam komfort får inte användas samtidigt med oxidationsmedel som t.ex. hypokloridlösningar eller vätesuperoxid, eftersom skummet då kan skadas. Om det finns behov för användning av oxidationsmedel kan såret spolras med ringerlösning eller saltlösning efter behandling. Därefter kan PermaFoam appliceras.

HARTMANN-ScandiCare AB  
Box 24  
334 21 Anderstorp  
T. 0371-58 74 00  
F. 0371-58 74 45  
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se  
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Sårdyna	Art.nr.	Afp	Tfp
PermaFoam® Steril, enstycksförpackad	Ø 6 cm		409 427	10 st	6 Afp
	10 x 10 cm		409 401	10 st	6 Afp
	10 x 20 cm		409 403	5 st	6 Afp
	15 x 15 cm		409 405	5 st	6 Afp
	20 x 20 cm		409 406	3 st	6 Afp
PermaFoam® komfort Steril, enstycksförpackad	8 x 8 cm	3,5 x 3,5 cm	409 428	10 st	6 Afp
	11 x 11 cm	6 x 6 cm	409 408	10 st	6 Afp
	10 x 20 cm	5 x 14 cm	409 410	5 st	6 Afp
	15 x 15 cm	10 x 10 cm	409 412	5 st	6 Afp
	20 x 20 cm	14 x 14 cm	409 413	3 st	6 Afp