


PermaFoam®/

PermaFoam® comfort

Polyuretanskumförband med specialformer

PermaFoam är framtaget för att användas i upprepningsfasen och den tidiga granulationsfasen i sårhäkning. Problem uppstår om dessa faser blir för långa och exsudatet, som från början påskyndade sårhäkningen, börjar ge motsatt effekt och orsakar skador på huden runt såret och motverkar läkningsprocessen.

En bra exsudathantering måste säkerställa att överskottet av exsudat leds bort från såret. Det är också viktigt att förbandsbyten inte blir för täta och stör sårhäkningen, då detta kan leda till en förnyad bakteriekontaminering.

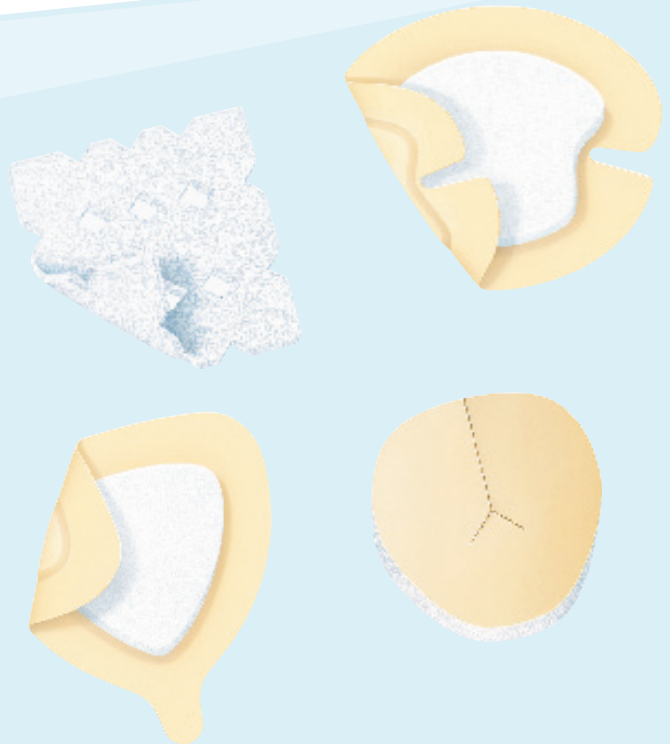

1 PermaFoam cavity

2 PermaFoam sacral

3 PermaFoam concave

4 PermaFoam trakeostomi

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Enkel hantering
Mjuk, patientkomfort
Ekonomisk
Skyddar såret
Många former



Egenskaper

Förbandet finns i två versioner, med eller utan häftkant. Versionen med häftkant har tilläggsnamnet Comfort. Stora öppna porer (400-1000 µm) mot sårytan ger hög absorptionskapacitet av större partiklar, såsom bakterier, cellrester och trögflytande exsudat. Bakterier har en storlek på 1-5 µm. Det semipermeabla ytskiktet består av små, slutna polyuretanporer. Den gradvisa porförminskningen minimerar risken för maceration genom att absorberat exsudat hålls kvar högt upp i förbandet. Det mjuka materialet minskar risken för att förbandet skall fastna i sårbedden och gör förbandsbyten smärtfria. Den vertikala absorptionen förhindrar spridning av absorberat exsudat i sidled och förbandet används därför med fördel under kompression (testad upp till 42 mmHg).

Material

Förbandet består av Polyuretan. PermaFoam comfort har en akrylatbaserad häftmassa. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation

För upprepning och stimulering av den tidiga granulationen. Vid behandling av måttligt till rikligt vätskande sår, t.ex. bensår och trycksår. Vid venösa bensår i kombination med kompression. Brännskador. Kontraindikationer: Permafoam och Permafoam comfort får inte användas på områden med frilagda ben, muskler och senor, vid kliniskt infekterade sår, svampinfektioner eller brännskador av graden 2b och 3.

Särskilda upplysningar

PermaFoam och PermaFoam comfort får inte användas samtidigt med oxidationsmedel som t.ex. hypokloridlösningar eller vätesuperoxid, eftersom skummet då kan skadas. Om det finns behov för användning av oxidationsmedel kan såret spolras med Ringer-lösning eller saltlösning efter behandling. Därefter kan PermaFoam appliceras.

HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Mått	Sårdyna	Art.nr.	Afp	Tfp
PermaFoam® Steril, enstycksförpackad					
PermaFoam® cavity	10 x 10 cm		409 425	3 st	12 Afp
PermaFoam® trakeostomi	8 x 8 cm		409 426	10 st	6 Afp
PermaFoam® comfort Steril, enstycksförpackad					
PermaFoam® sacral	18 x 18 cm	11 x 9,5 cm	409 422	3 st	6 Afp
	22 x 22 cm	14,5 x 12,5 cm	409 423	3 st	6 Afp
PermaFoam® concave	16,5 x 18 cm	10,5 x 12 cm	409 424	3 st	6 Afp