


RespoSorb® Super

Absorptionsforbinding med superabsorbanter

RespoSorb Super er den optimale absorptionsforbinding til kraftigt væskende sår. Takket være den hurtige absorption og kernen med superabsorbanter, som indkapsler væsken og holder den tilbage i forbindingen, kan patienten føle sig tryk uden risiko for lækage og lugt.

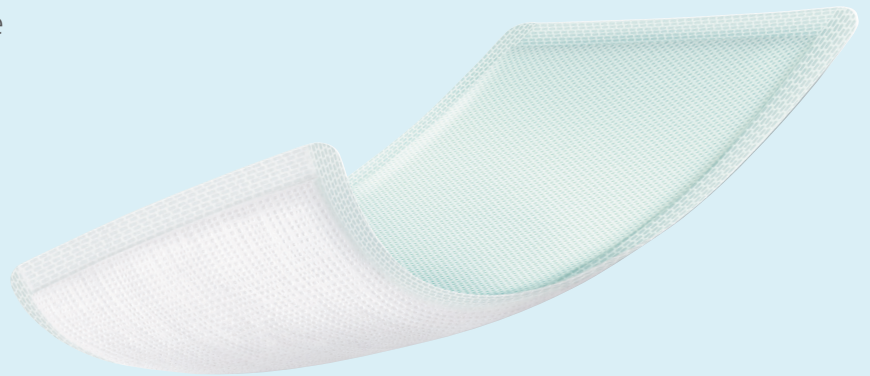

- 1 Hurtig og effektiv absorption
- 2 Mindsker eventuel lugt fra såret
- 3 Fungerer lige så godt under kompressionsbehandling
- 4 Det grønne lag på bagsiden beskytter tøj og sengetøj mod lækage

Fordele:

Hurtig og effektiv absorption
Høj brugerkomfort
Åndbar
Minder lugt
Beskytter mod lækage



Egenskaber

RespoSorb Super er en højabsorberende forbindelse med superabsorbanter. Forbindingen har fire forskellige lag, som alle spiller en vigtig rolle. Kontaktlaget sørger for, at væsken absorberes hurtigt og effektivt, uden at forbindingen sætter sig fast i såret. Transportlaget sørger for at transportere væsken til superabsorbanterne, hvor den indkapsles sikkert. Den grønne bagside, som er luftgennemtrængelig og væskeafvisende, sørger for, at forbindingen kan ånde, samtidig med at den beskytter tøj og sengetøj mod lækage.

Materiale

RespoSorb Super er en absorptionsforbinding med fire forskellige lag.

Kontaktlag - Hydrofil non-woven PA/viskose

Transportlag - Hydrofil cellulose

Kerne med superabsorbanter og cellulosefluff -

Hydrofile cellulosefibre og superabsorbanter (SAP)

Bagside - Hydrofob non-woven polypropylen

Indikation

Anvendes til behandling af alle typer kraftigt væskende sår, for eksempel kirurgiske sår, lymfatiske sår, bensår og ulcererende tumorer. Må ikke anvendes på tørre sår eller blottede knogler, muskler eller sener.

Instruktion

Forbindingen lægges på med den hvide side mod såret. Der må ikke klippes i forbindingen.

Sortiment	Størrelse	Varenr.	Afp	Tfp
RespoSorb® Super	10 x 10 cm	685 020	10 stk	6 Afp
Steril, pakket enkeltvis	10 x 20 cm	685 021	10 stk	6 Afp
	15 x 20 cm	685 022	10 stk	6 Afp
	20 x 25 cm	685 023	10 stk	6 Afp
	20 x 40 cm	685 024	10 stk	5 Afp