


Assortimentsoverzicht continentiezorg

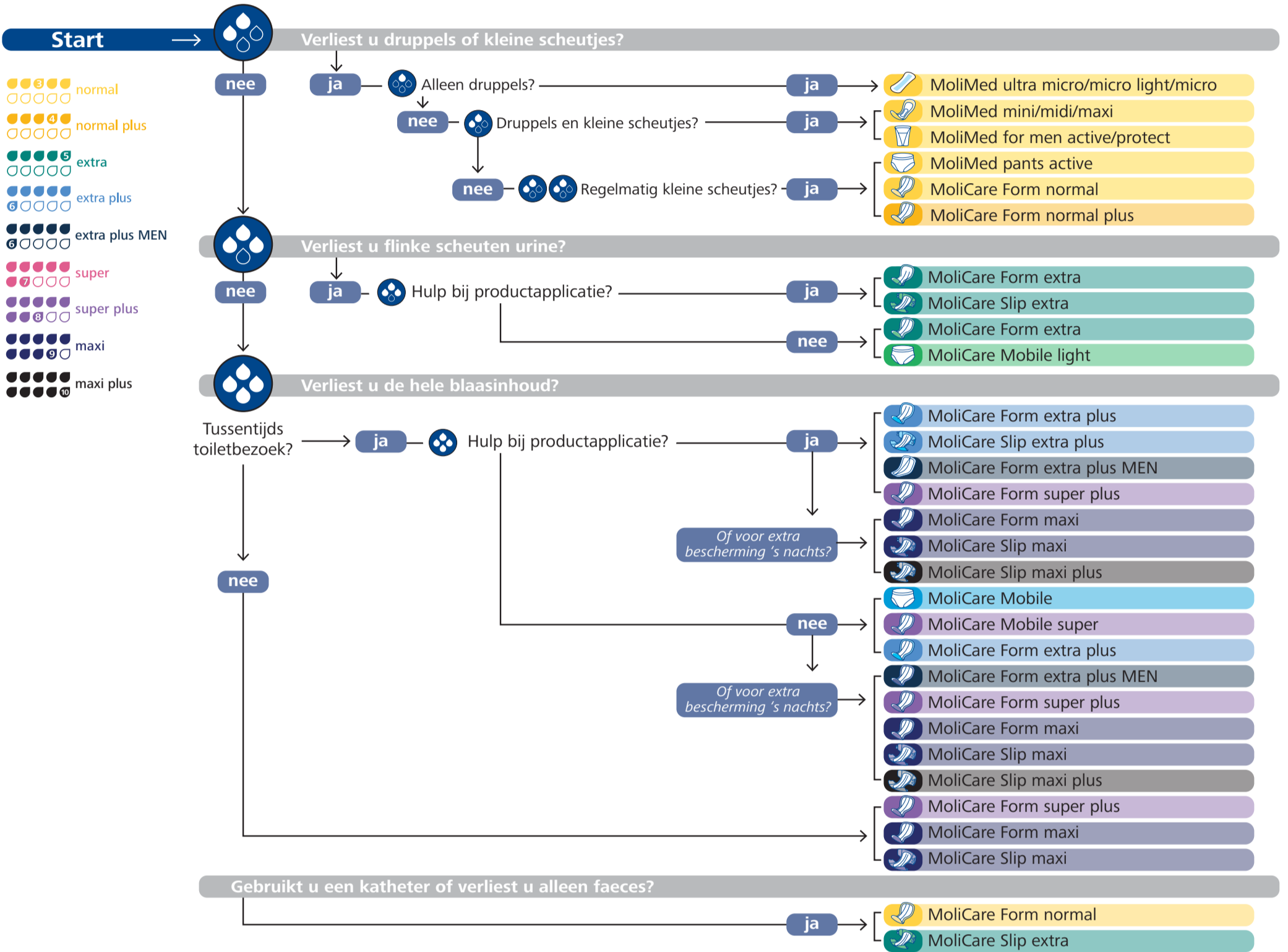

Hoe legt u onze producten het beste aan?

Bij een staande patiënt

MoliCare Form

Vouw de MoliCare Form open en trek hem voorzichtig aan beide zijden uit. Het kussen vormt zich nu vanzelf.

- Breng de MoliCare Form van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt. Vouw het netbroekje omlaag.
- Plaats de MoliCare Form zorgvuldig midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Houd met één hand de MoliCare Form aan de voorzijde vast en trek met de andere hand het netbroekje MoliCare Fixpants omhoog.
- Zorg dat de MoliCare Form goed aansluit op het lichaam. Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Form wegtrekken.

Bij een liggende patiënt

- Leg de patiënt op de zij. Pak één zijde van het netbroekje MoliCare Fixpants en breng die omlaag richting knie.
- Breng de MoliCare Form van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.
- Plaats de MoliCare Form zorgvuldig op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Pak de MoliCare Fixpants bij de omlaag getrokken zijde vast en breng die omhoog.
- Draai de patiënt weer op de rug. Zorg dat de MoliCare Form goed aansluit op het lichaam. Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Form wegtrekken.

Bij een staande patiënt

MoliCare Slip

Vouw de MoliCare open en trek hem voorzichtig aan beide zijden uit. Het kussen vormt zich nu vanzelf.

Correct aangelegd

- Breng de MoliCare Slip van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.
- Plaats de MoliCare Slip goed in het midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen aan de achterzijde het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Houd met één hand de MoliCare Slip aan de voorzijde vast en breng met de andere hand het nonwoven zijvlak richting de heup.
- Trek de onderste plakstrips licht uit en plaats beide schuin naar boven op het product. Trek vervolgens de bovenste plakstrips licht uit ze plaats ze schuin naar onder. (U kunt ook eerst de bovenste plakstrips vastplakken en vervolgens de onderste).
- Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Slip wegtrekken.


Bij een liggende patiënt

- Leg de patiënt op de zij. Breng de MoliCare Slip van voren naar achteren aan tussen de benen van de patiënt.
- Plaats de MoliCare Slip goed in het midden op de achterzijde (zodat de vochtindicator in het verlengde van de wervelkolom ligt). Let erop dat het absorptiekussen aan de achterzijde het onderste gedeelte van de billen goed afdekt.
- Draai de patiënt weer op de rug. Breng met uw handen het nonwoven zijvlak richting de heup.
- Trek de onderste plakstrips licht uit en plaats beide schuin naar boven op het product. Trek vervolgens de bovenste plakstrips licht uit ze plaats ze schuin naar onder. (U kunt ook eerst de bovenste plakstrips vastplakken en vervolgens de onderste).
- Om het draagcomfort te vergroten, kunt u de huid aan de binnenzijde van het bovenbeen voorzichtig onder de MoliCare Slip wegtrekken.

Assortimentsoverzicht

PLAKINLEGGERS

MoliMed Premium

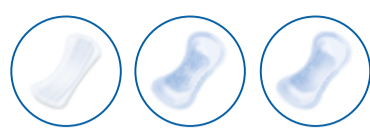

Anatomisch gevormde, absorberende plakinleggers, te gebruiken bij licht urineverlies.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Inlegger (cm)	Inhoud
ultra micro	168 131	65	18 x 8	8 x 28 st.
micro light	168 132	160	22 x 10	12 x 14 st.
micro	168 624	220	27 x 10	24 x 14 st.
mini	168 634	301	27 x 14	18 x 14 st.
midi	168 644	440	34 x 17	12 x 14 st.
maxi	168 654	850	45 x 21	12 x 14 st.

Een krachtige zelfklevende strip zorgt voor goede fixatie van de inlegger en onzichtbaar gebruik. Met unieke antibacteriële, pH-huidneutrale toplaag.

Te gebruiken in normaal ondergoed.

PRODUCTEN VOOR MANNEN

MoliMed Premium Active



Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Inhoud
active for men	168 600	325	12 x 14 st.

Speciale range die specifiek ontworpen is voor maximaal comfort en bescherming voor incontinentie bij mannen. De producten zijn speciaal afgestemd op de mannelijke anatomie voor een goed sluitende pasvorm.



MoliMed Premium Protect



Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Inhoud
protect for men	168 705	475	12 x 14 st.

MoliMed for men producten zijn voorzien van een krachtige zelfklevende strip die zorgt voor goede fixatie en handzaam gebruik.

De MoliCare Premium Form extra plus MEN biedt meer opvangcapaciteit en kan gebruikt worden in combinatie met MoliCare Premium Fixpans fixatiebroekjes. Alle producten zijn voorzien van een 3-delige absorptiekern met revolutionaire curly fibers en de unieke anti-bacteriële, pH-huidneutrale toplaag.



MoliCare Premium Form extra plus MEN



Inlegger	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Inhoud
for men	168 819	2.300	4 x 28 st.

INLEGGERS

MoliCare Premium Form



Gemakkelijke en discrete inleggers voor **licht tot matig** urine- en/of fecale incontinentie.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Inlegger (cm)	Inhoud
normal	168 119	1.200	52,5 x 28	4 x 30 st.
normal plus	168 019	1.350	62 x 29,5	4 x 30 st.
extra	168 219	1.600	62 x 29,5	4 x 30 st.
extra plus	168 319	2.300	69 x 31	4 x 30 st.
super plus	168 919	2.700	69 x 31	4 x 30 st.
maxi	168 619	3.000	69 x 31	4 x 14 st.

De inlegger heeft een anatomische pasvorm en anti-lekrandjes voor maximale zekerheid. Prettig in gebruik dankzij de zachte, vochtwerende buitenzijde. Met unieke antibacteriële, pH-huidneutrale toplaag.

Geschikt voor zowel mobiele als bedlegerige personen. Te gebruiken met elastische MoliCare Premium Fixpans fixatiebroekjes.



PLAKSLIPS

MoliCare Premium Slip - extra



Absorberende plakslip, te gebruiken bij **matige** urine- en/of fecale incontinentie.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
small	169 447	1.502	60/90	3 x 30 st.
medium	169 647	1.784	90/120	3 x 30 st.
large	169 847	2.211	120/150	3 x 30 st.

De plakslip heeft een soepele, zachte buitenzijde met ademende zijpanelen voor maximaal behoud van een goede huidconditie. De 3-delige absorptiekern met revolutionaire curly fibers zorgt voor razendsnelle vochtopname en kapselt ook nare geurtjes direct in. Voorzien van hersluitbare plakstrips, anti-lekrandjes en elastische afsluiting bij de benen. Met unieke antibacteriële, pH-huidneutrale toplaag.

MoliCare Premium Slip - extra plus



Absorberende plakslip, te gebruiken bij **zware** urine- en/of fecale incontinentie.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
extra small	169 248	1.365	40/60	4 x 30 st.
small	169 448	1.642	60/90	3 x 30 st.
medium	169 648	2.159	90/120	3 x 30 st.
large	169 848	2.349	120/150	3 x 30 st.
extra large	169 948	2.669	150/175	4 x 14 st.

Geschikt voor zowel mobiele, bedlegerige als ook onrustige personen.



MoliCare Premium Slip - super plus



Absorberende plakslip, te gebruiken bij **zeer zware** urine- en/of fecale incontinentie.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
small	169 450	2.125	60/90	3 x 30 st.
medium	169 650	2.859	90/120	3 x 30 st.
large	169 850	3.070	120/150	3 x 30 st.
extra large	169 950	3.568	150/175	4 x 14 st.

Het extra dikke absorptiekussen kan grote hoeveelheden vocht opnemen en is daarmee ook een betrouwbare oplossing gedurende de nacht.

MoliCare Premium Slip - maxi



Absorberende plakslip, te gebruiken bij **extrem zware** urine- en/of fecale incontinentie.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
small	169 185	2.245	60/90	4 x 14 st.
medium	169 285	3.360	90/120	4 x 14 st.
large	169 385	3.866	120/150	4 x 14 st.
extra large	169 485	3.900	150/175	4 x 14 st.

MoliCare Premium Slip - maxi plus



Absorberende plakslip, te gebruiken bij **maximale** urine- en/of fecale incontinentie.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
small	169 457	2.400	60/90	4 x 14 st.
medium	169 657	3.453	90/120	4 x 14 st.
large	169 857	4.000	120/150	4 x 14 st.
extra large	169 957	4.100	150/175	4 x 14 st.

BROEKJES

MoliMed Premium pants active



Ultra discrete absorberende broekjes, te gebruiken bij **licht** urineverlies.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
medium	168 661	847	70/100	4 x 12 st.
large	168 662	874	100/125	4 x 10 st.

Kan eenvoudig en snel aangebracht worden, vergelijkbaar met regulier ondergoed. De 3-delige absorptiekern met revolutionaire curly fibers is verwerkt in het broekje en zorgt voor razendsnelle vochtopname die nare geurtjes direct inkapselt. Unieke antibacteriële, pH-huidneutrale toplaag. Super elastische, zachte taille voor een goed sluitende pasvorm.

MoliCare Premium mobile - 5 druppels (light)



Handzame absorberende broekjes, te gebruiken bij **matig** urine- en/of ontlastingsverlies.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
small	915 861	930	60/90	4 x 14 st.
medium	915 852	970	80/120	3 x 14 st.
large	915 853	1.150	100/150	4 x 14 st.
extra large	915 854	1.150	130/170	4 x 14 st.

Geschikt voor mobiele of onrustige personen. Gemakkelijk aan- en uit te trekken en daardoor uitermate geschikt bij toilettraining.



MoliCare Premium mobile - 6 druppels



Handzame absorberende broekjes, te gebruiken bij **matig tot zwaar** urine- en/of ontlastingsverlies.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
extra small	915 840	1.300	45/70	4 x 14 st.
small	915 831	1.350	60/90	4 x 14 st.
medium	915 832	1.600	80/120	3 x 14 st.
large	915 833	1.800	100/150	4 x 14 st.
extra large	915 834	2.000	130/170	4 x 14 st.

MoliCare Premium mobile - 8 druppels (super)



Handzame absorberende broekjes, te gebruiken bij **zwaar** urine- en/of ontlastingsverlies.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
small	915 871	1.700	60/90	4 x 14 st.
medium	915 872	1.950	80/120	3 x 14 st.
large	915 873	2.250	100/150	4 x 14 st.
extra large	915 874	2.250	130/175	4 x 14 st.

MoliCare Premium mobile - 10 druppels



Handzame absorberende broekjes, te gebruiken bij **zwaar** urine- en/of ontlastingsverlies.

Type/maat	Art. nr.	Absorptie ISO (ml)	Heupomvang (cm)	Inhoud
medium	915878	2.600	80/120	3 x 14 st.
large	915879	2.600	100/150	4 x 14 st.
extra large	915880	2.600	130/170	4 x 14 st.

FIXATIEBROEKJES

MoliCare Premium Fixpans



MoliCare Premium Fixpans maken een hygiënische en eenvoudige fixatie van (MoliCare Form) inleggers mogelijk.

Type/maat	Art. nr.	Heupomvang (cm)	Aantal verpakking	Inhoud
small	947 795	45/80	5 stuks	60 x 5 st.
medium	947 790	45/80	25 stuks	8 x 25 st.
large	947 796	60/100	5 stuks	40 x 5 st.
large	947 791	60/100	25 stuks	8 x 25 st.
large	947 797	80/120	5 stuks	40 x 5 st.
large	947 792	80/120	25 stuks	8 x 25 st.
extra large	947 798	100/160	5 stuks	40 x 5 st.
extra large	947 793	100/160	25 stuks	8 x 25 st.
XX large	947 799	140/180	5 stuks	40 x 5 st.
XX large	947 794	140/180	25 stuks	8 x 25 st.
XXX large	947 815	160/200	5 stuks	40 x 5 st.
XXX large	947 789	160/200	25 stuks	8 x 25 st.

Hoogwaardige, zachte fixatiebroekjes gemaakt van elastisch polyamide garen voor veilige, hygiënische en probleemloze fixatie van inleggers. Door de netstructuur zijn de broekjes zacht, luchtdoorlatend en extreem flexibel. De fixatiebroekjes kunnen op 60° gewassen worden en kunnen in de droger. Kleurcode op maat ingeweven.

Geschikt voor zowel mobiele als bedlegerige personen.



ONDERLEGGERS

MoliNea plus normaal absorberend



Formaat (cm)	Art. nr.	Aantal	Absorptie ISO (ml)	Inhoud
Plus 40 x 60	161 100	150 st.	475	1 x 150 st.
Plus 60 x 60	161 300	100 st.	820	1 x 100 st.
Plus 60 x 60	161 400	30 st.	820	4 x 30 st.
Plus 60 x 90	161 600	100 st.	1.200	1 x 100 st.
Plus 60 x 90	161 700	30 st.	1.200	4 x 30 st.

Wegwerp-onderleggers met vochtverdelende tusselaag. De onderzijde is van PE-folie en laat geen vocht door. Is voorzien van een antisliplaag zodat de onderlegger vrijwel niet kan verschuiven. Stapelbaar gevouwen.

MoliNea super extra absorberend



Formaat (cm)	Art. nr.	Aantal	Absorptie ISO (ml)	Inhoud
Super 40 x 60	163 100	100 st.	700	1 x 100 st.
Super 60 x 60	163 300	100 st.	700	1 x 100 st.
Super 60 x 90	163 600	100 st.	1.750	1 x 50 st.



HUIDVERZORGING

MoliCare Skin reiniging



Product	Art. nr.	Inhoud	stuks*
MoliCare Skin waslotion	995014	500 ml	12
MoliCare Skin verzorgend bad	995015	500 ml	12
MoliCare Skin reinigingsschuim	995016	400 ml	12
MoliCare Skin shampoo	995017	500 ml	12
MoliCare Skin vochtige reinigingsdoekjes	995038	50 st.	12
MoliCare Skin vochtige washandjes	995056	8 st.	24

MoliCare Skin verzorging



Product	Art. nr.	Inhoud	stuks*
MoliCare Skin massagegel	995018	200 ml	12