


Atrauman® Silicone

Sårkontaktlager

Atrauman Silicone är ett mjukt sårkontaktlager med silikon. Atrauman Silicone används för behandling av en mängd olika sår och fungerar som ett komplement till sekundärförband för att skydda sårbädden. Atrauman Silicone förhindrar att förbandet fastnar i såret och möjliggör skonsamma förbandsbyten och därmed en effektiv läkningsprocess.

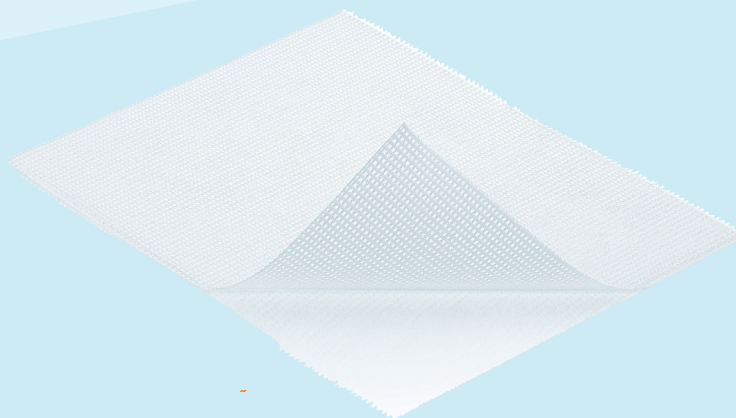

- 1 Minskar smärta vid förbandsbyte
- 2 Förhindrar att sekundärförbandet fastnar i såret
- 3 Skyddar sårbädden och sårets kanter
- 4 Med en tjocklek på endast 0,4mm formar sig förbandet väl efter såret
- 5 Kan klippas till önskad storlek
- 6 Kan användas för en mängd olika indikationer

Fördelar:

Lindrar smärta
Skyddar såret
Mjuk och formbar
Kan klippas
Många användningsområden



Egenskaper

Tack vare dess tunna material är Atrauman Silicone mycket formbar och enkel att klippa till önskad storlek. Den silikonbelagda ytan på båda sidor förenklar hanteringen även vid fixering av sekundärförbandet. Beroende av sårets status kan Atrauman Silicone sitta kvar under flera dagar. Man bör dock, efter 3 dagar regelbundet inspektera förbandet så att inte nybildad vävnad växt in i förbandet.

Material

Nätmönstrat material av polyetylenteraftelat (PET) med silikonlager på båda sidor. Öppen nätstruktur som släpper igenom sårvätskan till sekundärförbandet.

Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation och applicering

Till atraumatisk sårbehandling i sårhäkningsens alla faser vid t.ex. skrapsår, bensår, trycksår, brännskador, strålskador, abscesser, hudtransplantationer och vid nagelextraktioner.

Kontraindikationer: Inga kända.

Rengör såret innan applicering av Atrauman Silicone. Det är viktigt att omkringliggande hud är torr. Välj en storlek som passar såret, vid behov klipp till önskad storlek.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Atrauman® Silicone Steril, enstycksförpackad	7,5 x 10 cm	499 561	5 st	4 Afp
	10 x 20 cm	499 563	5 st	8 Afp
	20 x 30 cm	499 565	5 st	4 Afp