

Idealast®-haft color

Den permanentelastiska bomullsbindan som fäster i sig själv, finns i två färger

Kohesiv, permanent lågelastisk bomullsbinda. Elasticitet på cirka 90%, som inte försvinner under användning. Kohesiv på båda sidorna ger en enkel och perfekt fixering. Högt arbetstryck och lågt vilotryck. Kan även användas av stillasittande personer. Släpper igenom luft. Kan steriliseras (autoklav vid 134°C). Finns i färgerna blå och röd.



1 Förlorar inte sin elasticitet under användning

2 Öppen vävstruktur som släpper igenom luft

3 Enkel fixering

Fördelar:

Enkel fixering
Permanentelastisk
Många användningsområden
Kan återanvändas
Kraftig
Stadiga kanter



Egenskaper

Permanentelastiken innebär att bindan inte förlora sin elasticitet under användning. Bindan ger ett högt arbetstryck och ett lågt vilotryck vilket gör att den även kan bäras av stillasittande personer. Normalt tas bindan av under natten och lindas på igen på morgonen. För att nå bästa resultat bör framför allt smala ben polstras till normal form innan lindning.

Material

93% bomull, 5% polyamid, 2% elasthan.
Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass I, osteril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.
Utsträckt längd: 4 m
Outsträckt längd: ca 2,45 m
Elasticitet: 90%
Latexfri

Indikation

För måttlig kompression vid profylax och uppföljning av venösa problem eller som stöd/avlastning vid muskel- och ledbandsskador. För fixering av förband och gippskenor. Sportbandage.
Kontraindikationer: Arteriell ocklusionssjukdom.

Tvättråd

Idealast-haft color kan steriliseras i autoklav vid 134°C och tvättas i 60°C ett fåtal gånger.



HARTMANN-ScandiCare AB
Box 24
334 21 Anderstorp
T. 0371-58 74 00
F. 0371-58 74 45
E. info@hartmann.se

www.hartmann.se
www.hartmann.info

Sortiment	Färg	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
Idealast®-haft color Styckförpackade med cellofan i ask	Blå	4 m x 4 cm	931 090	1 st	70 Afp
	Blå	4 m x 6 cm	931 091	1 st	48 Afp
	Blå	4 m x 8 cm	931 092	1 st	27 Afp
	Blå	4 m x 10 cm	931 093	1 st	30 Afp
	Röd	4 m x 4 cm	931 095	1 st	70 Afp
	Röd	4 m x 6 cm	931 096	1 st	48 Afp
	Röd	4 m x 8 cm	931 097	1 st	27 Afp
	Röd	4 m x 10 cm	931 098	1 st	30 Afp
	Mix = förpackning med 5 st röda och 5 st blå bindor.	Mix	4 m x 4 cm	931 100	10 st
Mix		4 m x 6 cm	931 101	10 st	12 Afp
Mix		4 m x 8 cm	931 102	10 st	9 Afp
Mix		4 m x 10 cm	931 103	10 st	6 Afp