


PermaFoam Classic®

PermaFoam Classic® Border

Polyuretanskumförband

PermaFoam Classic är ett absorberande polyuretanskumförband för behandling av måttligt till rikligt vätskande sår. Förbandet har en tredimensionell skumstruktur för snabb och effektiv absorption. PermaFoam Classic bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö.

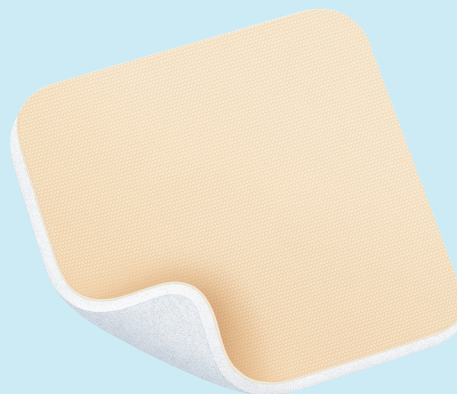

1 Hög absorptionsförmåga

2 Mjuk, polstrande

3 Finns även med häftkant

Fördelar:

Hög absorptionskapacitet
Bibehåller fuktig sårmiljö
Mjuk, patientkomfort
Kan sitta på upp till 7 dagar
Många storlekar



Egenskaper

Förbandet finns i två versioner, med eller utan häftkant. Versionen med häftkant har tilläggsnamnet Border. Förbandet har en tredimensionell struktur som ger en effektiv absorption samtidigt som det bibehåller en fuktig sårhelingsmiljö. Förbandet kan sitta kvar på såret upp till 7 dagar beroende på exsudatmängden och sårets kondition.

Material

Förbandet består av polyuretanskum. PermaFoam Classic Border har en akrylatbaserad häftmassa. Produkten är klassificerad som medicinteknisk produkt, klass IIb, steril. CE-märkt enligt EU-direktiv 93/42/EEC.

Indikation och applicering

För behandling av måttligt till rikligt vätskande sår, t.ex. kroniska bensår och trycksår. Förbandet kan användas under kompression.

Förbandet ska appliceras så att ca 1-2 cm når utanför sårkanten. Ju större såret är desto mer bör förbandet överlappa sårkanterna. Vid behov kan förbandets storlek anpassas med en steril sax. Den vita sidan ska vara vänd mot såret och den beigefärgade, släta ovansidan ska vara vänd uppåt. PermaFoam Classic fixeras med fixeringsbinda eller tubgas beroende på sårets placering. PermaFoam Classic Border fixeras med den integrerade häftkanten.

Sortiment	Mått	Art.nr.	Afp	Tfp
PermaFoam Classic® Steril, enstycksförpackad	6 cm rund	882004	10 st	24 AFP
	10 x 10 cm	882000	10 st	6 AFP
	20 x 10 cm	882002	10 st	6 AFP
	15 x 15 cm	882001	10 st	6 AFP
	20 x 20 cm	882003	10 st	6 AFP
PermaFoam Classic® Border Steril, enstycksförpackad	10 x 10 cm	882006	10 st	6 AFP
	15 x 15 cm	882007	10 st	6 AFP
	10 x 30 cm	882008	10 st	6 AFP
PermaFoam Classic® Sacral Steril, enstycksförpackad	18 x 18 cm	882011	10 st	6 AFP
	22,5 x 22,5 cm	882012	10 st	10 AFP
PermaFoam Classic® Concave Steril, enstycksförpackad	16,5 x 18 cm	882009	10 st	6 AFP
PermaFoam Classic® Trakeostomi Steril, enstycksförpackad	8 x 8 cm	882005	10 st	24 AFP