



HARTMANN

Hydrosorb Gel Hidrogel în seringă

Indicații generale

Hydrosorb Gel este un gel steril, clar, cu o consistență vâscoasă, compus din apă de compoziție electrolitică pe bază de soluție Ringer, glicerină, hidroxietilceluloză, celuloză și carbomer. Hydrosorb gel nu conține polietilenglicol.

Proprietăți și mod de acțiune

Hydrosorb gel asigură un mediu umed la nivelul plăgii (răni), stimulând astfel procesul de vindecare. În funcție de condiția plăgii, Hydrosorb gel înmoaie țesutul necrotic, facilitează îndepărtarea țesutului mort și înglobează exsudatul și reziduurile celulare în cazul plăgilor cu secreții reduse.

Hydrosorb Gel poate fi îndepărtat prin clătire cu soluție Ringer sau cu o altă soluție sterilă, fără a distruge țesutul nou format sau a afecta restul plăgii. În momentul începerii tratamentului cu Hydrosorb Gel, ocazional, poate apărea extinderea suprafeței plăgii din cauza eliminării resturilor de țesut deja distrus. În general, acesta este însă considerat un semn al debutului procesului de vindecare.

Indicații

Hydrosorb Gel este indicat pentru tratamentul rănilor superficiale și adânci, ca de ex. ulcere și plăgi de alte etiologii, cu secreții minime.

Gelul poate fi utilizat pentru înmuierea și hidratarea țesutului necrotic. Asigurând un mediu umed la nivelul suprafeței plăgii, Hydrosorb gel susține procesul endogen de debridare, facilitând îndepărtarea țesutului necrotic și a resturilor celulare.

Instrucțiuni de folosire

1. Aplicarea Hydrosorb gel

- Clătiți plaga cu soluție Ringer sau cu o altă soluție sterilă adecvată. Tamponați cu grijă pielea din jur pentru a obține o suprafață uscată
- Desigilați ambalajul de plastic și îndepărtați capacul de protecție din vârful seringii
- Apropiati capul seringii de baza plăgii fără a o atinge și aplicați Hydrosorb gel într-un strat de aprox. 5 mm
- Acoperiți plaga cu un pansament secundar adecvat
- Este interzisă utilizarea conținutului din seringă pentru pacienți diferiți

2. Îndepărtarea Hydrosorb gel

- Hydrosorb gel poate fi îndepărtat din plagă prin clătirea cu soluție Ringer sau cu o altă soluție sterilă adecvată
- Frecvența schimbării pansamentului depinde de starea plăgii
- Hydrosorb gel poate fi lăsat în plagă până la 3 zile
- Hydrosorb gel trebuie schimbat dacă secrețiile din plagă trec în pansamentul secundar

Contraindicații

- Hydrosorb Gel nu se utilizează în cazul pacienților cu intoleranță la gel sau la una dintre componentele sale.
- Nu se recomandă pentru arsuri de gradul III.

Precauții speciale

- Exclusiv pentru uz extern
- În cazul plăgilor infectate se impune supraveghere medicală și un tratament sistemic adecvat. În acest caz, schimbul pansamentului trebuie efectuat în funcție de recomandarea medicului. Tratamentul plăgilor infectate cu Hydrosorb gel poate fi continuat sub supraveghere medicală.

Instrucțiuni generale

Păstrați într-un loc uscat, la temperaturi între 5° și 40° C fără a expune produsul la soare. Nu congelați conținutul. Nu utilizați produsul dacă seringă este deteriorată sau capacul este perforat. Nu reesterilizați. Nu lăsați la îndemâna copiilor.

Forme de prezentare

Seringă de 15 ml

Producător

PAUL HARTMANN AG
89522 – Heidenheim
Germania

Importator

SC PAUL HARTMANN SRL
Str. Arany Janos nr 46, etaj 1
RO-540 045 Târgu Mureș
România