



BODE X-Wipes

Universell einsetzbares Vliestuchspendersystem für flüssige HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel.



Anwendungsgebiete

Das universell einsetzbare Vliestuchsystem für die professionelle Reinigung und Desinfektion. Geeignet für alle flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittel in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von 1 Stunde oder weniger (gem. VAH), z. B.:

- Für Arbeitsflächen
- Für patienten- und bewohnernahe Flächen
- Desinfektion von Rettungsfahrzeugen
- Überall dort, wo eine hygienische Aufbereitung von Mehrwegtüchern nicht möglich ist

Produkteigenschaften

- Schützt Anwendungslösungen vor Kontamination und Verdunsten
- Sparsam im Verbrauch von Tüchern und Anwendungslösung
- Farbiges Entnahmesystem zur besseren Produktunterscheidung
- Reißfestes Vlies
- Stabiler Spender mit Tragegriff
- Lösung 28 Tage verwendbar



Anwendung

Das BODE X-Wipes Spendersystem ist für den Einsatz mit flüssigen HARTMANN Flächen-Desinfektionsmitteln in Konzentrationen mit einer Einwirkzeit von einer Stunde oder kürzer (gem. VAH) geeignet. Der BODE X-Wipes Spender wird mit 2,5 – 3 Liter Anwendungslösung (bzw. 1,5 Liter bei der 40er Rolle oder mindestens 750 ml bei der 30er Rolle) des verwendeten HARTMANN Flächen-Desinfektionsmittels befüllt. Bei der Herstellung der Anwendungslösungen sind die anwendungs- und sicherheitstechnischen Hinweise des jeweiligen Produktes und Einsatzkonzentrationen zu beachten.

X-Wipes Vliestücher

Je nach Bedarf sind Vliesrollen mit einem Umfang von 90, 40 oder 30 Einzeltüchern erhältlich. Saugfähiges Polyestervlies (60 g/m²). Auch als BODE X-Wipes basic Vliesrolle verfügbar, die mit 40 g/m² eine leichtere Vliesqualität bietet (90 Einzeltücher).

Dosierung

Entsprechend der eingesetzten Vliesrolle wird der Tuchspender mit 2,5 Liter Desinfektionsmittellösung (90er Rolle), 1,5 Liter (40er Rolle) oder 750 ml (30er Rolle in BODE X-Wipes Dose) befüllt.

Kompatibilität

Das BODE X-Wipes Spendersystem kann mit folgenden HARTMANN-Desinfektionsmitteln benutzt werden:

- Mikrobac® forte
- Kohrsolin® FF
- Bacillo® AF
- Bacillo® 30 Sensitive Foam

Standzeit

Bei ordnungsgemäßem Verschluss verfügen die in BODE X-Wipes eingesetzten Flächen-Desinfektionsmittel von HARTMANN über eine Standzeit von 28 Tagen.

BODE X-Wipes

Zwei Möglichkeiten der Befüllung


Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der BODE X-Wipes Vliesrolle im Folienbeutel



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle mit Folienbeutel in sauberen, trockenen Spender einsetzen.

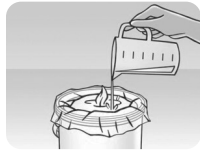

Desinfektionslösung in den Folienbeutel geben, Vliestuchrolle gleichmäßig benetzen.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Schrauben Sie den Deckel am Spender wieder zu. Etikett beschriften.



Folie zusammen mit Deckel entsorgen.

Befüllung des BODE X-Wipes Tuchspenders mit der Standard BODE X-Wipes Vliesrolle



Ziehen Sie Handschuhe an.



Vliestuchrolle einsetzen.



Lösung von innen nach außen zugeben.



Vliestuch durch Entnahme-Rund führen und Spender sorgfältig verschließen. Erstes Vliestuch verwerfen.



Etikett beschriften.



Spender vor der Wiederbefüllung manuell oder maschinell desinfizieren.

Produktname	Packungsinhalt	Artikelnummer	PZN	Versand-Einh. Packungen
BODE X-Wipes Spender für Vliesrolle im Folienbeutel, für 40er und 90er Vliesrolle				
	1 Spender Deckelverschluss blau	981 370	3431433	4
	1 Spender Deckelverschluss grün	981 372	3431427	4
	1 Spender Deckelverschluss rot	981 371	3431410	4
BODE X-Wipes Vliesrolle 90 Tücher im Folienbeutel inkl. Deckelsystem				
	90 Tücher Größe 200 x 380 mm	981 442	4171520	6
BODE X-Wipes Vliesrolle				
	90 Tücher Größe 200 x 380 mm	980 556	3431456	6
	40 Tücher Größe 200 x 380 mm	980 557	3431462	12
	30 Tücher Größe 200 x 380 mm	981 920	3427503	15
BODE X-Wipes basic				
	90 Tücher Größe 200 x 380 mm	980 524	3431479	6
BODE X-Wipes Dose für 30er Rolle				
	1 Stück	980 610	3427495	6
BODE X-Wipes Wandhalter				
	1 Stück	980 583	3431485	1
BODE X-Wipes Sicherungsbügel				
	1 Stück	980 584	3431491	1



Hilft. Pflegt. Schützt.

PAUL HARTMANN Ges.m.b.H.
2355 Wiener Neudorf
Österreich

Telefon +43 2236 64630-0
office@at.hartmann.info
www.at.hartmann.info



Die Empfehlungen zu unseren Präparaten beruhen auf wissenschaftlichen Prüfungen und werden nach bestem Wissen gegeben. Weitergehende Empfehlungen, z. B. im Hinblick auf Materialverträglichkeit, sind nur im Einzelfall gesondert möglich. Unsere Empfehlungen sind unverbindlich und keine Zusicherung. Sie schließen die eigene Prüfung für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke nicht aus. Insoweit können wir keine Haftung übernehmen. Diese richtet sich nach unseren allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.