

CHECKLISTE

für Hände-Desinfektionsmittel-Spender im Rettungsfahrzeug

Maximale Ausstattung auf minimalem Raum: Rettungsfahrzeuge beherbergen alle Medikamente und Geräte, die dazu nötig sind, die Vitalfunktionen eines Patienten aufrecht zu erhalten, bis die Klinik erreicht ist. Zwischen Pulsoximeter und Defibrillator darf auch der Desinfektionsmittel-Spender nicht vergessen werden.

Diese Faktoren sollten Sie für die bestmögliche Auswahl und Platzierung berücksichtigen:



Seitenwände meiden:

Rundum-Reinigung des Spenders muss möglich sein

Zugängliche Position wählen:

Armhebel sollte leicht mit dem Unterarm zu bedienen sein

Flexibel bleiben:

Einmalsysteme bevorzugen: Kontaminationsrisiken werden minimiert, Aufbereitung entfällt

Den richtigen Spender auswählen:

Scharfe Kanten vermeiden

Kleiderhaken beachten:

Jacken könnten den Spender verunreinigen

Arbeitsfläche freihalten:

Verletzungsgefahr bei Patientenbehandlung oder Reinigung des Fahrzeugs

Elektrische Geräte im direkten Umfeld beachten:

Gefahr durch Desinfektionsmitteltropfen

Sonneneinstrahlung berücksichtigen:

Hohe Temperaturen lassen Alkohole verdunsten – und können somit die Wirksamkeit beeinträchtigen

www.hartmann.de



Wir forschen für
den Infektionsschutz

HARTMANN

