



Zavádění permanentního močového katétru

Optimalizovaný standardní ošetřovatelský postup

V České republice se nakazí infekcí spojenou se zdravotní péčí přes 122 000 hospitalizovaných pacientů. Každý rok! Z toho zhruba 25 % připadá na infekce močového ústrojí (UTI). Dodržováním správných hygienických postupů a používáním kvalitních produktů můžeme společně snížit riziko infekcí na minimum.

- 1** Vydezinfikujte si ruce
- 2** Rozbalte MediSet® a rozložte ho na sterilní roušku
- 3** Připravte dezinfekci sliznice
- 4** Použijte sterilní roušku pod pacienta a polohujte ho
- 5** Vydezinfikujte si ruce
- 6** Nasadte si sterilní rukavice
- 7** Dezinfikujte sliznici a dbejte na dodržení expoziční doby
- 8** Naneste sterilní lubrikant
- 9** Asepticky zaveďte katétr
- 10** Připojte drenážní systém a posuňte katétr
- 11** Naplňte balónek sterilním roztokem
- 12** Umístěte močový sáček pod úroveň měchýře
- 13** Zabraňte zalomení
- 14** Sundejte si rukavice
- 15** Vydezinfikujte si ruce
- 16** Vydezinfikujte kontaktní plochy

ŠETŘETE SVŮJ ČAS A VYUŽIJTE PŘIPRAVENÝ MEDISET® A DALŠÍ DOPORUČENÉ PRODUKTY

1× pár vyšetřovacích rukavic, nitrilové, bez pudru, vel. M

2× kompres netkaný 5 × 5 cm

1× pinzeta anatomická modrá, plast

2× rouška 50 × 55 cm

1× sterilní voda, ampule 10 ml

4× tampon netkaný, vel. 2 ořech

Číslo výrobku: 475 388

1× injekční stříkačka 10 ml



Sterillium®

Alkoholový přípravek na chirurgickou a hygienickou dezinfekci rukou. 500 ml
Číslo výrobku: 980 096

Bacillo®

30 Sensitive Tissues
Utěrky napuštěné alkoholovým roztokem k dezinfekci povrchů. Flow pack 80 ks
Číslo výrobku: 981 693