

Umgang mit alkoholischen Flächen-Desinfektionsmitteln



Vorgetränkte Tücher
Für den sofortigen Einsatz verwendbar.



Gebrauchsfertige Lösung*
Flüssigkeit auf ein Einmaltuch geben.



Gebrauchsfertiger Schaum
Schaum auf die Fläche oder auf ein Einmaltuch sprühen.

Anwendung

RICHTIG:

- ✓ Vor der Desinfektion sichtbaren Schmutz von Flächen entfernen
- ✓ Flächen gleichmäßig mit Flüssigkeitsfilm benetzen
- ✓ Mit gleichmäßigen Druck wischen
- ✓ Abwarten bis Flächen vollständig abgetrocknet sind
- ✓ Zündquellen ausschalten und gut lüften, da hochalkoholische Produkte leicht entzündlich sind
- ✓ Tücher nach Gebrauch im Hausmüll entsorgen
- ✓ Verpackung direkt nach Gebrauch wieder verschließen

FALSCH:

- ✗ Desinfektionsmittel verdünnen
- ✗ Fußböden oder größere Flächen mit alkoholischen Produkten desinfizieren
- ✗ Zur Hände-Desinfektion verwenden
- ✗ Nebelfeuchtes Wischen reicht aus
- ✗ Die Flächen trocken wischen
- ✗ Desinfektionsmittel in den Geräteinnenraum gelangen lassen

Produkte

zur Schnelldesinfektion gegen Bakterien, Hefen sowie behüllte Viren z. B. HIV, Influenza- und Coronaviren



Hochalkoholische Produkte

Nur auf alkoholbeständigen Flächen anwenden (z. B. kein Acryl oder Plexiglas)



Vorgetränkte Tücher:

- Bacillol® Tissues
- Bacillol® AF Tissues

Gebrauchsfertige Lösung:

- Bacillol® AF

Niedrigalkoholische Produkte

Auch auf empfindlichen Kunststoffen, Acryl- und Plexiglas sowie Monitoren, Displays, Tastaturen etc. anwendbar



Vorgetränkte Tücher:

- Bacillol® 30 Tissues

Gebrauchsfertiger Schaum:

- Bacillol® 30 Foam

* max. 50 ml pro m² Fläche

Flächen-Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.



Wir forschen für
den Infektionsschutz
bode-science-center.de

