

HARTMANN



Hilft. Pflegt. Schützt.

Mit
Hilfsmittel-
nummer

NEU

Einfach. Zuverlässig.
Effektiv. Komfortabel.

Kompressionstherapie mit Compreflex® Standard Calf

sigvaris



Entwickelt für eine einfache und effektive Kompressionstherapie

Das neue medizinische adaptive Kompressionssystem (MAK) zweier Experten

HARTMANN ist nicht nur der **Experte** für die **Versorgung von akuten und chronischen Wunden**, sondern ist auch **Deutschlands Nr. 1** im Markt der Kompressionsbinden¹. Insbesondere das beliebte **Pütterbinden-Sortiment** bietet eine breite Palette **hochwirksamer** Produkte für die Kompressionstherapie.

Diese Erfahrung kombiniert HARTMANN jetzt mit Sigvaris, dem **Spezialisten für medizinische adaptive Kompressionssysteme, kurz MAK**. Ziel der Partnerschaft ist es, basierend auf der beiderseitigen Expertise ein **innovatives Produktportfolio** für die Kompressionstherapie mit MAK anzubieten.

MAK überzeugen durch ihre **anwenderfreundliche, einfache Handhabung**, sie fördern das **Selbstmanagement**, erhöhen die **Lebensqualität** und optimieren die **Therapie**.

¹ Insight Health Verordnungsdaten 2022, nach Anzahl der Verordnungen im Kompressionsmarkt D02D1 - D02D4

Was sind MAK und wann werden sie eingesetzt?

- MAK sind wiederverwendbare Kompressionsbandagen; der Kompressionsdruck kann mithilfe von Klettverschlüssen oder Hakensystemen individuell eingestellt und einfach nachjustiert werden
- Zur Entstauung venöser Ödeme und zur Behandlung chronisch venöser Insuffizienz, u. a. Ulcus cruris venosum
- MAK können in Kombination mit einem darunterliegenden Wundverband wie z. B. Zetuvit® Plus getragen werden



MAK für eine schnelle, effektive und nachhaltige Kompression

- Kompression bewirkt eine schnellere Heilung des venösen Ulcus sowie eine effektive Ödemreduktion und reduziert Schmerzen
- MAK sind einfach und zuverlässig anzulegen und ermöglichen Zeitersparnis beim medizinischen Personal
- MAK sind waschbar und bis zu 6 Monate wiederverwendbar



MAK unterstützen das Selbstmanagement

- Patienten und Angehörige können MAK selbständig anlegen
- Der Druck, den die Kompressionsbandage auf das Bein ausübt, kann bei Bedarf (z. B. Umfangänderung) nachjustiert werden
- MAK können Tag und Nacht getragen und zur Hygiene sowie zur Hautpflege einfach abgenommen werden



MAK erhöhen Lebensqualität und Adhärenz

- Niedriger Ruhedruck sorgt für einen erhöhten Komfort
- MAK können mit normaler Kleidung und Schuhen getragen werden
- MAK sind angenehm zu tragen, stärken die Adhärenz und sichern so den Therapieerfolg





Überzeugend bis ins Detail: Compreflex® Standard Calf

Compreflex® Standard Calf

- Kompressionsbereich **21 – 46 mmHg**
- Einstellen des Kompressionsdrucks mithilfe von **Klettverschlüssen**, präzise Druckjustierung mittels **Accutab®**
- Auch für eine leichte Kompression geeignet
- **Inkl. 2 Unterziehstrümpfen** ohne Kompression zur Hautschonung (Einheitsgröße)
- Optimaler Sitz durch den **vorgeformten Wadenbereich**
- Einfaches Anziehen ohne Verrutschen dank **Stretch-Einsatz**
- Atmungsaktivität durch das weiche und anschmiegsame **Breath-O-Prene® Material**¹
- Parallel verlaufende Bänder für eine gleichmäßige Druckverteilung; lockere Bänder können **gezielt nachjustiert** werden

Hilfsmittel-Nummer: 17.06.23.2005



Klettverschluss-Verlängerung für Compreflex® Standard Calf

- Für Patienten, die eine **Sondergröße** an bestimmten Bereichen der Wade benötigen
- Verlängert das Klettband um **bis zu 10 cm** bei einem größeren Wadenumfang

Kann bei Bedarf vom Leistungserbringer bestellt werden

Accutab® zur Einstellung des Kompressionsdrucks – einfach und präzise



Was ist ein Accutab®?

Mittels Accutab® werden **Einstellung, Kontrolle und Nachjustierung des Drucks** in einem Bereich von 21 – 46 mmHg beim Compreflex® Standard Calf ermöglicht.

Der Accutab® ist ein **patentiertes System**, das von den **Hohenstein Instituten** geprüft wurde. Die Tests wurden mit dem Messgerät PicoPress® durchgeführt, das für seine Genauigkeit und die Reproduzierbarkeit seiner Ergebnisse bekannt ist.

So werden Accutab® angewendet



1.


Die Klettverschlüsse von unten nach oben schließen, ohne Druck auszuüben



2.

Hinter den Enden jedes Klettverschlusses einen Accutab® anbringen (besteht aus einem Klettstreifen)

Hinweis: Beispielsweise für ein Wadensegment der Größe M ist ein Accutab® der Größe M zu verwenden.

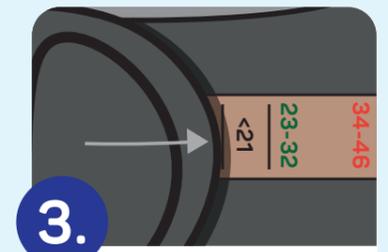

3.

Jeder Klettverschluss ist auf den verordneten Kompressionsdruckbereich zu ziehen, der durch die Linien auf dem Accutab® angezeigt wird:

< 21 mmHg
23 – 32 mmHg
oder 34 – 46 mmHg

¹ Breath-O-Prene® besteht aus Polyurethanschäum mit einer Außenschicht aus Nylon und Elasthan. Diese Material-Kombination sorgt dafür, dass Feuchtigkeit von der Haut weggeleitet wird und lässt Luft durch das Material zirkulieren.

Compreflex® Standard Calf perfekt kombinieren¹

Compreboot® Standard Foot

- Kompressionsbereich **bis 40 mmHg**
- **Klettverschlüsse** für eine leicht einstellbare Kompression sowie eine optimale Passform
- Offene Fersen- und Zehenpartie
- Weiches, anschmiegsames Neopren

Hilfsmittel-Nummer: 17.06.23.3005

So verordnen Sie Compreflex® Standard Calf & Co. richtig

Verordnungs- und erstattungsfähig als Hilfsmittel

- Ihr **Arznei- und Verbandmittelbudget** wird durch MAK **nicht belastet**
- Verordnen Sie Hilfsmittel wie MAK **nicht** auf dem gleichen Rezeptvordruck wie Verbandmittel
- Verordnen Sie das **Wadenteil** und das **Fußteil** jeweils auf einem **separaten Rezept**; **Unterziehstrümpfe mit Kompression** auf einem **Grünen Rezept für Selbstzahler**



Unterziehstrümpfe mit Kompression – ermöglichen das Tragen normaler Schuhe

- Kompressionsbereich **10–15 mmHg**
- **Weiche** Unterziehstrümpfe mit **flachen, außenliegenden** Nähten
- Vom Zeh bis zur Ferse **gepolsterte Sohle** für mehr Komfort
- **Bakterien- und geruchshemmende** Eigenschaften²



Transition

- Leichte Kompression im **Fuß und Fußgelenk**
- 2 Stück



Complete

- Leichte Kompression im **Fuß, Fußgelenk und Wade**
- 2 Stück

Verordnung auf einem
Grünen Rezept für Selbst-
zahler

Markieren Sie rechts oben die 7 „Hilfsmittel“ und tragen Sie folgendes auf dem Rezept ein:

- 1 Die **genaue Indikation/Diagnose** (ICD-10 Code)
- 2 Die **Anzahl** der MAK und die **betroffene Seite**
- 3 Die **Kompressionsklasse/den Druck** in mmHg
- 4 Den **Produktnamen**
- 5 Die **Hilfsmittelnummer**



aut idem	1	Diagnose: Ulcus cruris venosum
aut idem	2	1 Stück rechts
aut idem	3	23 – 32 mmHG
aut idem	4	Medizinisches adaptives Kompressionssystem/Compreflex® Standard Calf
aut idem	5	Nr. 17.06.23.2005
6664		Abgabedatum in der Apotheke
Bei Arbeitsunfall auszufüllen!		
Unfalltag	Unfallbetrieb oder Arbeitgeberrnummer	

(Rezeptbeispiel)

¹ Es ist sicherzustellen, dass mit der Kompressionsversorgung der Druck von distal nach proximal (körperfern nach körpernah) abnimmt (degressiver Druckverlauf).

² Eigenschaften werden durch eine hautfreundliche, biokompatible Ausrüstung erzielt.

Größen- und Bestellübersicht

Compreflex® Standard Calf – für die Wade

Hilfsmittelnummer: 17.06.23.2005


	Small		Medium		Large		X-Large		XX-Large	
	Regular	Tall								
D	29–39 cm		34–44 cm		40–50 cm		46–56 cm		54–64 cm	
C	29–39 cm		34–44 cm		40–50 cm		46–56 cm		54–64 cm	
B1	24–34 cm		29–39 cm		34–44 cm		39–49 cm		44–55 cm	
B	19–26 cm		21–30 cm		26–36 cm		31–41 cm		36–46 cm	
L1	30–33,9 cm	34–42 cm								
Artikel-Nr.	332088	332089	332090	332091	332092	332093	332094	332095	332096	332097
PZN	18652252	18652269	18652275	18652281	18652298	18652306	18652312	18652329	18652335	18652341

Compreflex® Standard Calf perfekt kombinieren

Unterziehstrümpfe mit Kompression

Verordnung auf einem Grünen Rezept für Selbstzahler


	Small	Medium	Large	X-Large	XX-Large
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Schuhgrößen					
Herren	<39	39–42	42–44	44–47	44,5–47
Damen	<38	38–40	40–43	>43	-
C	29–39 cm	34–44 cm	40–50 cm	46–56 cm	54–64 cm
B	19–26 cm	21–30 cm	26–36 cm	31–41 cm	36–46 cm
Unterziehstrumpf Complete					
Artikel-Nr.	332141	332142	332143	332144	332145
PZN	18652660	18652677	18652683	18652708	18652714
Unterziehstrumpf Transition					
Artikel-Nr.	332137	332138	332139	332146	332147
PZN	18652720	18652737	18652743	18652766	18652795

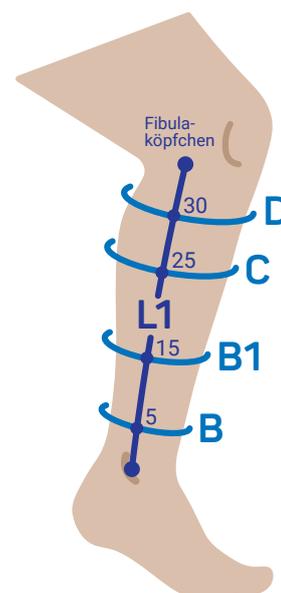

Compreboot® Standard Foot – für den Fuß

Hilfsmittelnummer: 17.06.23.3005

	Small		Medium/Large		X-Large/XX-Large	
	Regular	Long	Regular	Long	Regular	Long
Y	28–36 cm	28–36 cm	≤39 cm	≤39 cm	≤44 cm	≤44 cm
A	22–26 cm	22–26 cm	≤30 cm	≤30 cm	≤33 cm	≤33 cm
Ai	14–18 cm	19–23 cm	18–20 cm	23–25 cm	20–22 cm	25–27 cm
Artikel-Nr.	332131	332132	332133	332134	332135	332136
PZN	18652602	18652619	18652625	18652631	18652648	18652654

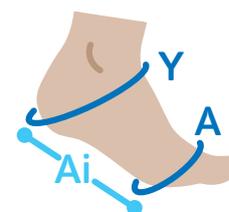

Klettverschluss-Verlängerung für Compreflex® Standard Calf

Artikel-Nr.	332100
PZN	18652803

Auch erhältlich:
**Pütter-
Verbände**
von HARTMANN